


Bedienungsanleitung

Schönheitsgerät 9-in-1

H5050.1/2 · H5050.2/2

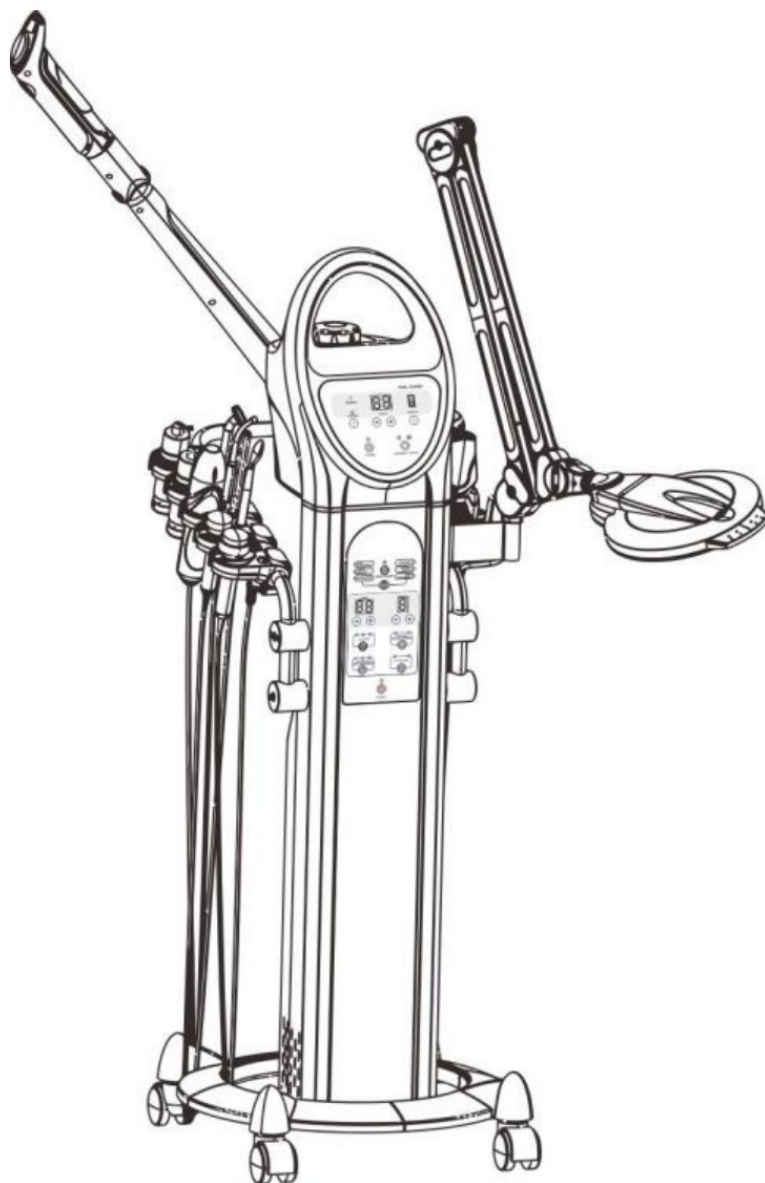

VERSION 1.26



Achtung

- Dieses Produkt wurde für die Verwendung durch Kosmetikfachkräfte in Kosmetikstudios entwickelt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass jede unsachgemäße Verwendung des Geräts zum Verlust der Garantie führt.
- Nehmen Sie ohne Genehmigung keine Änderungen am Gerät vor.
- Wir haften nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

Gegenanzeigen

Dieses Produkt darf nicht angewendet werden bei:

- Personen mit Metallimplantaten im Körper.
- Personen mit Herzschrittmacher oder Herzproblemen.
- Schwangeren Frauen.
- Personen mit empfindlicher Haut, Verletzungen, Entzündungen oder jeglichen Hautproblemen oder Hauterkrankungen.

Bei Personen, die sich in medizinischer Behandlung oder in einem Diagnoseprozess befinden, darf das Produkt nur mit ärztlicher Genehmigung verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Prüfen Sie vor der ersten Verwendung und nach jedem Gebrauch, ob das Gerät und das Netzkabel Schäden aufweisen.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Reinigung oder jeglicher Wartung beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen es Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sein könnte.
- Wenn das Netzkabel defekt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler oder einen Fachtechniker.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann, und stellen Sie sicher, dass Sie es an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Trennen Sie am Ende des Arbeitstages das Gerät vom Netz und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Wenn Sie eine Störung im Betrieb des Produkts feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Fachtechniker.


Sicherheitshinweise

- Das Gerät und das Zubehör müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Geräts entsprechen.
- Die Steckdose muss zugänglich sein, falls Sie das Gerät jederzeit schnell vom Netz trennen müssen.
- Ziehen Sie stets am Stecker selbst und nicht am Netzkabel.
- Manipulieren Sie niemals elektrische Bauteile und öffnen/reparieren Sie kein Bauteil des Geräts. Nur Ihr Händler oder ein Fachtechniker darf das Gerät reparieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es oder das Netzkabel sichtbar beschädigt ist.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen.

Achtung (Dampfbetrieb)

- Bevor Sie die Haupteinheit einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Wasserbecher fest zugeschraubt ist, der Wasserstand zwischen der höchsten und niedrigsten Markierung liegt und die Einfüllabdeckung dicht verschlossen ist.

- Wenn während des Betriebs ätherisches Öl hinzugefügt werden muss, tun Sie dies erst, nachdem Sie den Sprühnebel pausiert haben.
- Das Baumwollpad im Sockel für ätherisches Öl muss täglich gereinigt werden, nachdem Sie die Aromatherapie oder den Kräuternebel beendet haben.
- Warten Sie vor der Gesichtsbedampfung, bis der Nebel gleichmäßig und stabil aus der Sprühöffnung austritt.
- Die Sprühöffnung befindet sich 40 cm vom Gesicht der Kundin/des Kunden entfernt, und der Dampf sollte gleichmäßig vom Kinn zum gesamten Gesicht geführt werden, um Verbrühungen durch heißen Dampf zu vermeiden.
- Ozon hat eine desinfizierende Wirkung, kann jedoch die Haut schädigen und die Nährstoffe der Kräuter zerstören; daher ist es wichtig, je nach Hauttyp die geeignete Anwendungsdauer zu wählen.

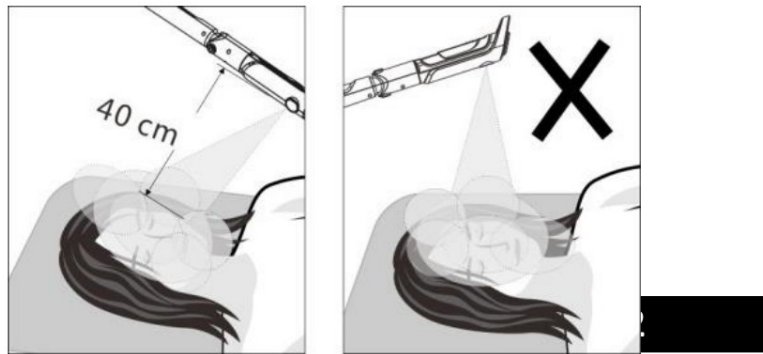

Abstand 40 cm zum Gesicht · niemals von oben sprühen

Warnhinweise

- Verstellen Sie den Sprüharm nicht mit übermäßiger Kraft, um Schäden an den Gelenken im Inneren des Sprüharms zu vermeiden.
- Der Wasserbecher darf nicht direkt nach dem Sprühbetrieb abgenommen werden, da sonst Verbrühungsgefahr besteht. Warten Sie, bis der Wasserbecher abgekühlt ist, und nehmen Sie ihn dann ab.
- Vermeiden Sie unbedingt ein Überfüllen mit Wasser; andernfalls wird nicht nur die Haupteinheit beeinträchtigt, sondern es kann auch zu einem Stromleck kommen.
- Wenn unter der Haupteinheit oder an der Kräuterabdeckung Wasser- oder Gasaustritt auftritt, unterbrechen Sie zuerst die Stromzufuhr der Haupteinheit und prüfen Sie dann, ob der Wasserbecher oder die Kräuterabdeckung richtig montiert ist. Lässt sich das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an Ihre örtliche Vertretung.
- Der Netzstecker der Haupteinheit muss über eine gute Erdung verfügen.

Hinweise zum Betrieb der Spray- und Vacuum-Funktionen

1. Prüfen Sie sorgfältig die Kennzeichnung am flexiblen Luftschlauch, um einen falschen Anschluss zu vermeiden.
2. Die Haupteinheit muss pausiert werden, wenn während des Gebrauchs die Sprühflasche oder der Saugkopf gewechselt werden soll.
3. Knicken Sie während des Betriebs der Vacuum- oder Spray-Funktion den flexiblen Schlauch nicht und blockieren Sie den Lufteinlass nicht, da dies die Haupteinheit direkt beschädigen kann.
4. Jeder Riss an der Düse des flexiblen Schlauchs beeinträchtigt unmittelbar die Wirkung; schneiden Sie den gerissenen Teil mit einer Schere ab und verbinden Sie ihn erneut mit dem entsprechenden Anschluss.
5. Beim Betrieb der Spray-Funktion ist zu beachten:
 - Regeln Sie die Sprühnebelmenge, um Verschwendung des Erfrischungsmittels zu vermeiden.
 - Um zu verhindern, dass Wassertropfen auf den Hals gelangen, sollte dieser mit einer Wasserschale oder einem Handtuch geschützt werden.
 - Sprühen Sie NICHT in Richtung Nasenlöcher oder Mund, um die Atmung zu gewährleisten.
 - Füllen Sie die Sprühflasche NICHT mit Flüssigkeiten niedriger Viskosität, um Verstopfungen zu vermeiden.
 - Die Sprühflasche sollte nach jedem Gebrauch rechtzeitig mit destilliertem oder gereinigtem Wasser gereinigt, trockengewischt und für den nächsten Gebrauch sterilisiert werden.
6. Beim Betrieb der Vacuum-Funktion ist zu beachten:
 - Die Hautpartien sollten vor dem Betrieb der Vacuum-Funktion gereinigt und aufgeweicht werden.
 - Die Saugstärke des Vacuum-Schlauchs sollte mittel eingestellt werden; eine hohe Intensität kann Hautläsionen und Blutgerinnung unter der Hautoberfläche verursachen. Die Kosmetikerin sollte es zuerst an der eigenen Hand ausprobieren und nach dem Einstellen der Saugleistung zu den Arbeitsbereichen übergehen.
 - Wenn die Behandlung an festen Hautpartien erfolgt, sollte die Druckzeit des Druckentlastungs-Lufteinlasses mit den Fingern kontrolliert werden, um zu langes Saugen und Bluterguss zu vermeiden.
 - Die Saugfrequenz sollte bei öligem, dicker Haut erhöht werden; bei Haut mit Teleangiektasien darf nicht gesaugt werden.
 - NICHT an der Augenhaut oder an einem entzündeten Gesicht anwenden.
 - Verwenden Sie die Vacuum-Saugung NICHT zu häufig, um eine Vergrößerung der Hautporen zu vermeiden.
 - Der Vacuum-Stab sollte nach dem Gebrauch rechtzeitig abgenommen und für den nächsten Gebrauch gereinigt, trockengewischt und sterilisiert werden.
 - Der saubere Schwammfilter sollte nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden. Verwenden Sie den Vacuum-Stab NICHT ohne Schwammfilter, da dies die Haupteinheit direkt beschädigt.

Hinweis zum Ultraschallbetrieb

7. Die Sonde muss sauber gehalten werden; reinigen und sterilisieren Sie die Sonde nach dem Gebrauch mit Ethanol oder anderen Mitteln.

8. Richten Sie die Sonde bei der Verwendung von Ultraschall NICHT auf die Augen.
9. Das Pflegeserum sollte rechtzeitig ergänzt werden, wenn es nicht ausreicht, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
10. Die Behandlungszeit sollte 15 Minuten nicht überschreiten und für kleine zu behandelnde Bereiche entsprechend verkürzt werden; eine zu lange Zeit ermüdet die Haut und beeinträchtigt die Aufnahme. Die Sonde sollte nicht lange an einer Hautstelle verweilen, um Hautläsionen zu vermeiden.
11. Vermeiden Sie während der Behandlung eine lange Anwendung bei maximaler Energieabgabe, da dies nicht nur die Aufnahme der Haut beeinträchtigt, sondern sogar Hautläsionen verursachen kann.

Hinweis zum Betrieb der galvanischen Zwitterionen-Einschleusung

12. Das Zwitterionen-Einschleusungsgerät wird normalerweise nach der Hautreinigung und vor der Massage verwendet. Vor der Behandlung sollte das Gesicht gereinigt und trocken sein, um zu verhindern, dass Rückstände von Reinigungsmitteln in die Hautbasis gelangen.
13. Die Sonde wird fest mit einem Baumwollpad umwickelt, und der Strom wird von schwach zu stark zur allmählichen Anpassung eingestellt, sodass stets ein leichtes Kribbeln erhalten bleibt.
14. Während der Behandlung dürfen die Hände der Kosmetikerin KEINEN Metallteil der Sonde berühren.
15. Die Einschleusung ist geeignet für trockene Haut (Wassermangel), gealterte Haut (Nährstoffmangel) und ölige Haut. Je nach Hauttyp können unterschiedliche flüssige Schönheitsprodukte ausgewählt werden, wobei das Produkt für ölige Haut das Eindringen verhindert.
16. Reinigen Sie nach dem Betrieb den Roller und den Metallstab und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
17. Wenn der Pol auf positive Elektrode eingestellt ist, wird das Kribbeln der Rollersonde stärker empfunden als bei negativer Elektrode und umgekehrt schwächer. Bitte wählen Sie nach Bedarf.
18. Während der Behandlung darf kein Metallschmuck getragen werden; Personen mit Goldzähnen oder Metall im Körper dürfen das Gerät nicht verwenden.
19. Personen mit empfindlicher Haut, Verletzungen, Entzündungen oder Teleangiectasien sowie Schwangere dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
20. Der pH-Wert der Nährlösung sollte an die positive und negative Elektrode der Roller angepasst sein: bei positiver Elektrode sollte die eingeschleuste Lösung sauer (+) sein, bei negativer Elektrode basisch (-). Ist der pH-Wert der Nährlösung nicht angegeben, kann pH-Testpapier zur Bestimmung verwendet werden.
21. Berühren Sie während des Betriebs NICHT direkt den Metallteil des Rollers oder der runden Sonde. Bei versehentlicher Berührung aktiviert die Haupteinheit den automatischen Schutz; trennen Sie dann sofort die Sonde, und die Haupteinheit hebt den Schutz auf und setzt die Behandlung fort.

Achtung (Skin Scrubber / Schaber)

22. Halten Sie den Arbeitskopf des Schabermessers nicht lange auf der Haut, um Hautverletzungen zu vermeiden.
23. Achten Sie bei der Hautpflege auf die aufgewendete Kraft; ideal ist es, das Schabermesser in einem Winkel von 45 Grad zur Haut zu halten (siehe Abbildungen rechts).
24. Tragen Sie Essenz auf die Hautoberfläche auf, um die Feuchtigkeit zu erhalten.
25. Halten Sie das Schabermesser bei der Einschleusungsmassage in einem Winkel von 20 Grad zur Haut (siehe Abbildung rechts).
26. Ziehen Sie das Kabel des Zubehörs nicht übermäßig zur Haupteinheit.
27. Behandeln Sie das Schabermesser bei der Verwendung sanft und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch, tauchen Sie es jedoch nicht zum Reinigen in Wasser. Wischen Sie es nach der Reinigung trocken, sterilisieren Sie es und halten Sie es sauber und trocken.
28. Reinigen und sterilisieren Sie den Sensor nach jedem Gebrauch und halten Sie ihn sauber und trocken.
29. Wenn das Kabel beschädigt ist, empfehlen wir die Verwendung von Zubehör der Reparaturstelle oder des Originalherstellers.

30. Es ist NICHT zulässig, das Schabermesser im Abgabezustand ohne Betrieb zu belassen, da dies zu Überhitzung des Schabermessers führen, seine Lebensdauer rasch verkürzen und Verbrühungen der Haut verursachen kann!

Achtung (Lupenleuchte)

31. Achten Sie beim Einstellen oder Bewegen der Lupenleuchte darauf, die Finger nicht zwischen den oberen und unteren Arm zu bringen, um Einklemmen zu vermeiden (siehe Abbildung).
32. Reinigen Sie die Haut vor dem Betrieb.
33. Schalten Sie nach dem Betrieb die Stromzufuhr aus.
34. Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Netz, halten Sie es sauber und bewahren Sie es an einem geeigneten Ort auf.

Hinweise zur Nutzung der Funktionen der Haupteinheit

35. Während des Betriebs dürfen die Kabel zwischen Zubehör und Haupteinheit nicht übermäßig gespannt werden.
36. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein spezifisches Kabel oder eine spezifische Baugruppe des Herstellers oder der Wartungsabteilung ersetzt werden. Es wird dringend empfohlen, Zubehör des Originalherstellers zu verwenden.
37. Bei jeder Störung muss die Haupteinheit ausgeschaltet und der Stecker gezogen werden. Lassen Sie das Gerät von der Vertretung oder einem Fachtechniker prüfen und warten. Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.
38. Es ist verboten, das Gerät in Badezimmern oder feuchten Räumen aufzustellen oder zu verwenden.
39. Es ist verboten, es zusammen mit brennbaren oder explosiven Gegenständen aufzubewahren.

Bei Verwendung der Heißdampf-Funktion

40. Es ist verboten, ölige Substanzen in den Wasserbecher oder das Kräuternetz zu geben; dies kann zu Problemen beim Wassersprühen führen.
41. Es ist nicht erlaubt, mit der Dampföffnung von oben auf das Gesicht zu sprühen, da dies zu Verbrühungen führen kann.
42. Es ist nicht erlaubt, dieses Gerät in einer übermäßig feuchten Umgebung zu betreiben, z. B. im Badezimmer.
43. Es ist nicht erlaubt, unter direkter Sonneneinstrahlung zu arbeiten, da dies verschiedene instabile Zustände verursacht.
44. Bei außergewöhnlichen Problemen wenden Sie sich bitte an die Vertretung, damit ein Fachtechniker die Reparatur durchführt, anstatt das Gehäuse der Haupteinheit selbst zu öffnen.
45. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wählen Sie besser Zubehör des Originalherstellers. Reparaturen durch nicht fachkundiges Personal sind nicht erlaubt; wenden Sie sich zum Austausch an eine autorisierte Reparaturstelle.

Bei Verwendung der Hochfrequenz-Elektrotherapie

46. Während der Hochfrequenz-Elektrotherapie darf kein Metall berührt werden; getragener Metallschmuck ist abzulegen.
47. Personen mit empfindlicher Haut, fleckiger Haut, Rosazea, verletzter Hautoberfläche, Schwangere sowie Personen mit anderen implantierten Geräten (z. B. Herzschrittmacher) dürfen diese Funktion NICHT verwenden.
48. Verwenden Sie bei der Hochfrequenz-Elektrotherapie KEINE Cremes oder Gesichtsmasken mit Ethanolgehalt. Muss ein Toner mit Ethanolgehalt verwendet werden, kann er nach der Hochfrequenz-Elektrotherapie aufgetragen werden.
49. Richten Sie die Elektrotherapie-Röhren NICHT auf den Augapfel.
50. Berühren Sie bei eingeschalteter Haupteinheit NICHT den Haupteingang der Hochfrequenz-Elektrotherapie oder den Eingang des Handstücks.

51. Der Stecker des flexiblen Zubehörkabels sollte fest mit den entsprechenden Ausgängen der Haupteinheit verbunden sein.
52. Dieses Gerät sollte von professionellen Kosmetikerinnen bedient werden, da beim Betrieb des Zubehörs Hochfrequenzstörungen entstehen. Nähern Sie sich NICHT anderen elektronischen Geräten. VORSICHT bei der Anwendung.

Bei Verwendung der galvanischen Zwitterionen-Einschleusung

53. Personen mit folgenden Erkrankungen dürfen diese Funktion nicht verwenden: Herzerkrankungen, Infektionskrankheiten, Neurosen sowie Personen mit Metall im Körper während des Behandlungsverlaufs.
54. Lassen Sie die Arbeits- und Ausgangssonden NICHT längere Zeit gegenseitig berühren.
55. Wenn das Pflegeserum nicht ausreicht, um Feuchtigkeit zu spenden, sollte es rechtzeitig ergänzt werden.
56. Verwenden Sie KEINEN Rollersonde, der sich nicht drehen lässt; er sollte rechtzeitig ausgetauscht werden.
57. Verhindern Sie während des Gebrauchs das Verspritzen von Wasser oder anderen korrosiven Flüssigkeiten auf die Haupteinheit.
58. Verwenden Sie KEINE runde Sonde oder Rollersonde mit beschädigter, rostiger oder abgenutzter Oberfläche, um Hautverletzungen zu vermeiden. Schützen Sie die Sonde sorgfältig vor Kratzern durch harte Gegenstände.

Bei Verwendung der Ultraschall-Funktion

59. Belassen Sie die Sonde nicht ohne Gesichtsbehandlung im Abgabezustand; Überhitzung verkürzt ihre Lebensdauer.
60. Versuchen Sie nicht, die Edelstahlsonde und das Handstück zu trennen, da dies die Sonde beschädigt.
61. Es ist verboten, die Sonde zum Reinigen in Wasser zu tauchen, da dies die Sonde beschädigt.
62. Die Sonde muss ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt oder die Oberfläche zerkratzt ist.

Bei Verwendung der rotierenden Bürste

- Verwenden Sie sie nicht sehr lange, da sonst das Bürstenhandstück überhitzt.
- Wechseln Sie die Bürste nicht während des Betriebs.
- Greifen Sie die Bürste nicht, während sie in Betrieb ist oder wenn Sie diese Funktion starten.
- Verwenden Sie keine kristallisierte Bürste mit Abnutzung.


Bei Verwendung der Spray- und Vacuum-Funktion

63. Achten Sie auf den flexiblen Schlauch, der Zubehör und Haupteinheit verbindet, und ziehen Sie ihn NICHT übermäßig.
64. Verhindern Sie während des Gebrauchs das Verspritzen von Wasser oder anderen korrosiven Flüssigkeiten auf die Haupteinheit.
65. Es ist verboten, den flexiblen Schlauch der Spray-Funktion mit dem Ausgang der Vacuum-Funktion zu verbinden sowie den flexiblen Schlauch der Vacuum-Funktion mit der Düse der Sprühflasche; andernfalls wird die Behandlungsflüssigkeit in die Sprühflasche zurückgesaugt und die Haupteinheit direkt beschädigt.
66. Es ist verboten, Saugköpfe mit Kanten, scharfen Rändern, Abnutzung oder Beschädigung zu verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall rechtzeitig an Ihren Händler oder eine autorisierte Wartungsstelle zum Austausch.

Packliste

Bezeichnung	Menge	Bezeichnung	Menge
Haupteinheit	1 Satz	Rollersonde	1 St.
Netzkabel	1 St.	Augensonde	1 St.
Gesichtssonde	1 St.	Hochfrequenz-Elektrotherapie-Handstück	1 St.
Bürstenhandstück	1 St.	Pilzförmige Glas-Elektrotherapie-Röhre	1 St.
Kristallisierte kleine Bürste	1 St.	Löffelförmige Glas-Elektrotherapie-Röhre	1 St.
Flaum-Bürste (klein)	1 St.	Punkt-Glas-Elektrotherapie-Röhre	1 St.
Kristallisierte große Bürste	1 St.	Stab-Glas-Elektrotherapie-Röhre	1 St.
EVA-Bürste (groß)	1 St.	Vacuum-Schlauch	1 St.
Flaum-Bürste (groß)	1 St.	Spray-Schlauch	1 St.
Zottel-Bürste (groß)	1 St.	Trinkhalm	1 St.
Sprühflasche	2 St.	Schwammfilter	3 St.
Saugkopf	1 St.	Hautschaber (Skin Scraper)	1 St.
Lupenleuchte	1 St.	Bedienungsanleitung	1 Expl.
Düsenhülse	1 St.	Schraubendreher	1 St.
Sprühpistole	1 St.		

Vorstellung der Haupteinheit

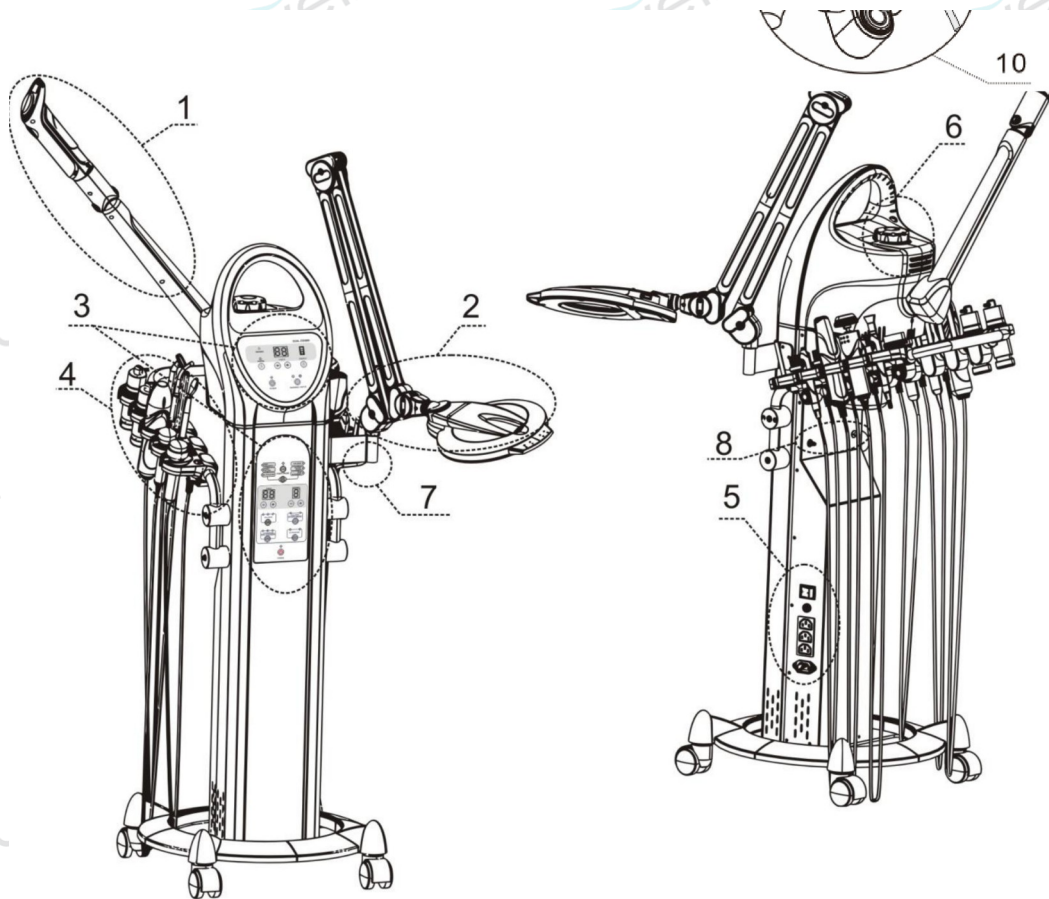


Vorder- und Rückansicht der Haupteinheit

1. Sprüharm 2. Lupenleuchte 3. Bedienfeld 4. Zubehörhalter


5. Netzanschluss 6. Wassereinfüll-Schublade 7. Lupenhalter 8. Ausgang der Spray- und Vacuum-Funktion

Zubehörhalter und Anschlüsse: 1. Galvanik-Sonde 2. Bürstenhandstück 3. Hochfrequenz-Handstück 4. Sprühflasche 5. Gesichtssonde 6. Augensonde 7. Skin-Scrubber-Messer 8. Vacuum-Stab 9. Glas-Elektrotherapie-Röhre / Bürstenhalter 10. Zubehör-Ausgangsanschluss 11. Sprühpistole

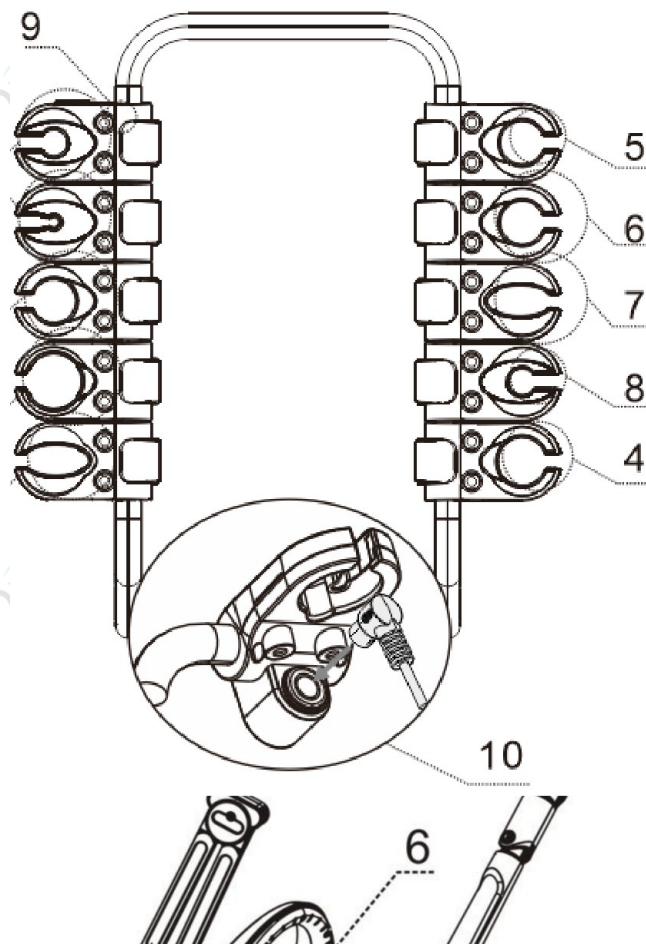

Zubehörhalter und Anschlüsse

Rückseitiges Anschlussfeld: 1. Hauptnetzschalter 2. Sicherungshalter 3. Netzausgangsbuchse 4. Netzeingangsbuchse

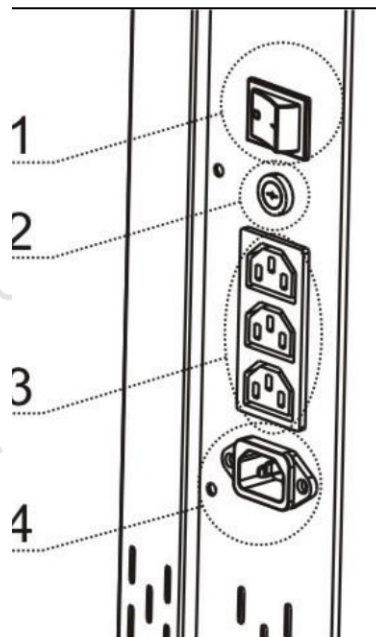

Rückseitiges Anschlussfeld


Zubehör

Ultraschall

1. Gesichtssonde 2. Stecker des flexiblen Kabels der Gesichtssonde 3. Flexibles Kabel der Gesichtssonde 4. Augensonde 5. Stecker des flexiblen Kabels der Augensonde 6. Flexibles Kabel der Augensonde


Accessories

•Ultrasonic:

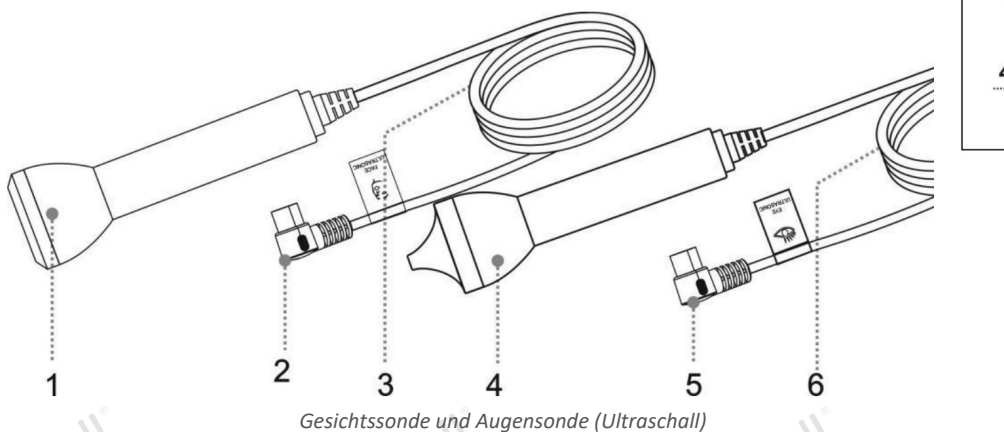


Skin Scrubber

1. Skin Scrubber 2. Stecker des flexiblen Kabels des Schabermessers 3. Flexibles Kabel des Schabermessers

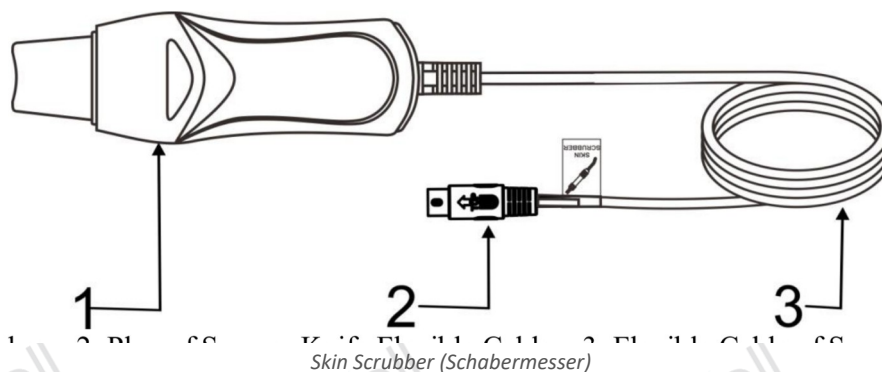


Galvanik

1. Einschleusungssonde 2. Stecker des flexiblen Kabels der Einschleusungssonde 3. Flexibles Kabel der Einschleusungssonde 4. Roller-Sonde (Gesicht) 5. Runde Sonde (Augen) 6. Kugel-Sonde (Gesicht)

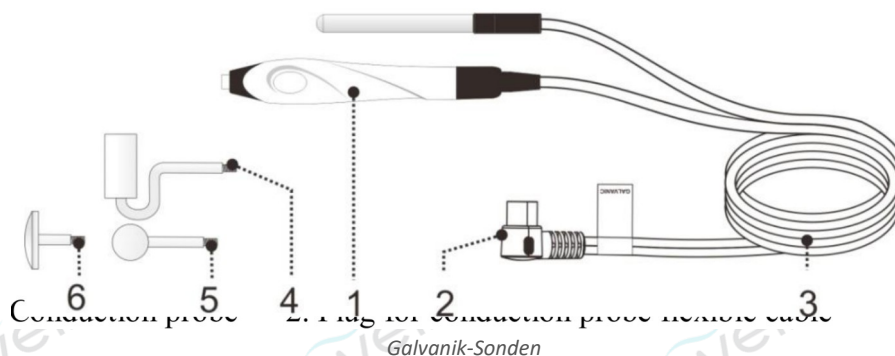

Hochfrequenz-Elektrotherapie


1. Elektrotherapie-Röhre
2. Hochfrequenz-Elektrotherapie-Handstück
3. Stecker des flexiblen Kabels des Elektrotherapie-Handstücks
4. Flexibles Kabel des Elektrotherapie-Handstücks

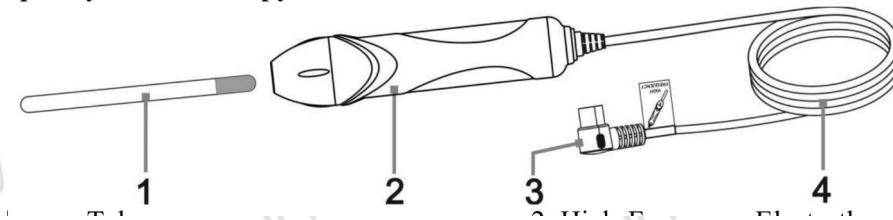

Hochfrequenz-Handstück und Röhre

Verschiedene Glas-Elektrotherapie-Röhren eignen sich für die Behandlung unterschiedlicher Partien:


- A: Pilzförmige Glas-Elektrotherapie-Röhre — große Flächen wie Wange, Stirn, Hals usw.
- B: Löffelförmige Glas-Elektrotherapie-Röhre — mittlere Flächen wie Kinn usw.
- C: Punkt-Glas-Elektrotherapie-Röhre — kleine Flächen wie die Nasenfalte usw.
- D: Stab-Glas-Elektrotherapie-Röhre — indirekte Behandlung für Kundinnen/Kunden.

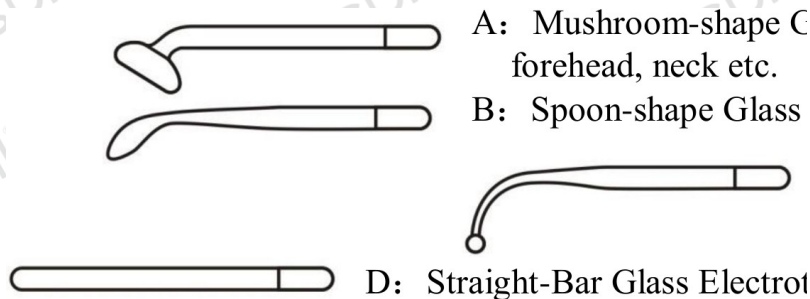

Glasröhren A · B · C · D

Montage und Demontage der Elektrotherapie-Röhre


1. Glasteil der Elektrotherapie-Röhre
2. Metallelektrode der Elektrotherapie-Röhre. Halten Sie beim Montieren und Demontieren der Elektrotherapie-Röhre die Teile innerhalb der gestrichelten Linie und halten Sie einen Abstand von mehr als 30 mm zum Metallteil.

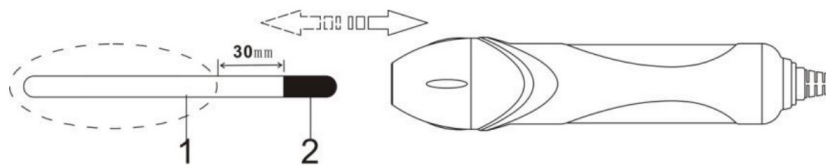

Montage/Demontage der Röhre (Abstand > 30 mm)

Bürstenhandstück

1. Bürstenkopf
2. Bürstenhandstück
3. Stecker des flexiblen Bürstenkabels
4. Flexibles Bürstenkabel

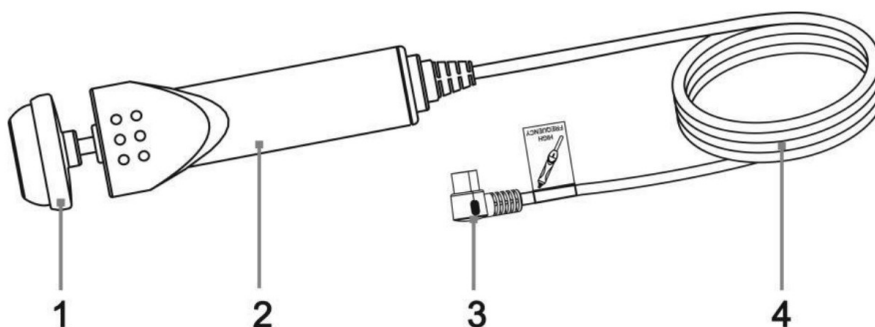


Bürstenhandstück

Bürsten

- Kristallisierte kleine Bürste: Reinigung kleiner Flächen von Hornhaut und Schwielen an Händen und Füßen.
- Flaum-Bürste (klein): Reinigung und Massage kleiner Hautflächen, z. B. im Gesicht.
- Kristallisierte große Bürste: Reinigung großer Flächen von Hornhaut und Schwielen an Händen und Füßen.
- EVA-Bürste (groß): Reinigung und Massage großer Hautflächen, z. B. im Gesicht.
- Flaum-Bürste (groß): Reinigung und Massage großer Hautflächen, z. B. im Gesicht.
- Zottel-Bürste (groß): Reinigung und Massage großer Hautflächen im Gesicht und an anderen Stellen.

Spray-Vacuum-Zubehör


1. Sprühflasche 2. Flexibler Luftschlauch der Sprühflasche 3. Trichterförmiger Saugkopf 4. Flachmund-Saugkopf
5. Rundmund-Saugkopf 6. Flexibler Luftschlauch des Saugstabs 7. Saugstab

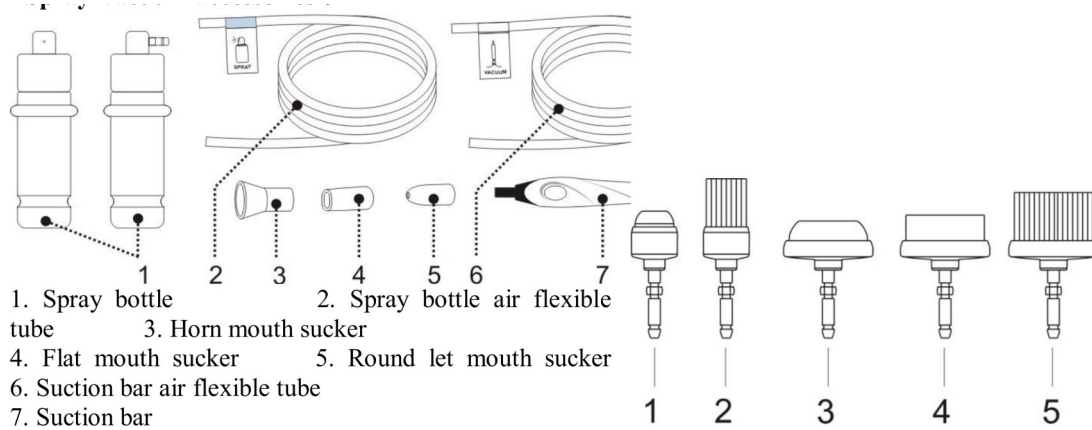

Spray-Vacuum-Zubehör


Sprühflasche

1. Düse 2. Deckel der Flasche 3. Ansaugröhrchen 4. Sprühflasche 5. Lufteinlassanschluss 6. Entlüftung

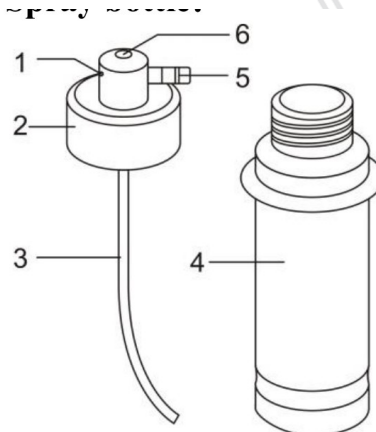


Sprühpistole

1. Abzug (regelt die Nebelmenge) 2. Flasche 3. Griff

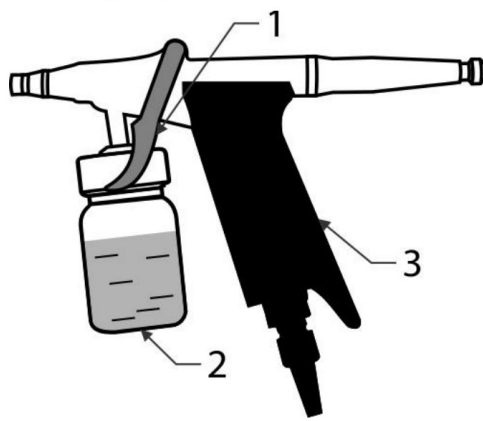


Saugstab

1. Rundmund-Saugkopf 2. Dichtring des Saugkopfs 3. Druckentlastungs-Entlüftung 4. Saugstab 5. Dichtring des Stabs 6. Schwammfilter 7. Saugstab-Ende

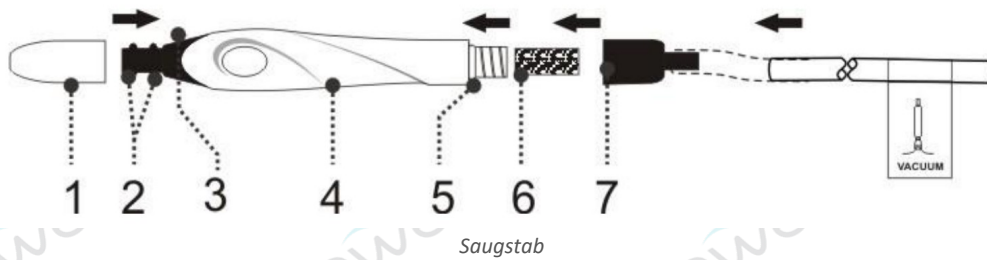

Vorbereitung

67. Nehmen Sie die Haupteinheit und den Sockel aus dem Karton, richten Sie die 4 Schraublöcher des Sockels an der Haupteinheit aus (siehe gestrichelter Kreis) und ziehen Sie sie mit Schrauben fest.
68. Setzen Sie (in Pfeilrichtung) den Dampferzeuger ein und drücken Sie ihn zusammen; stellen Sie sicher, dass die Netzsteckverbindung guten Kontakt hat.


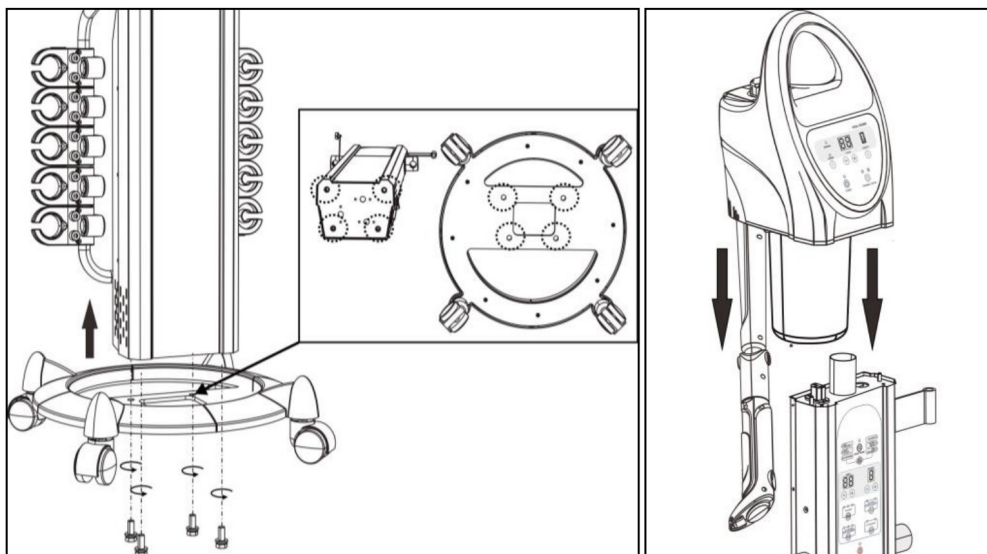


Montage von Sockel und Dampferzeuger

69. Entriegelung des Sprüharms: Beim Auspacken der Maschine ist der Sprüharm in fester Position verriegelt. Ziehen Sie die Verriegelung mit einer Hand heraus (in Richtung des schwarzen Pfeils in der Abbildung), drehen Sie den Sprüharm in die horizontale Position (siehe folgende Abbildung) und lösen Sie die Verriegelung des Sprüharms, um die Entriegelung abzuschließen.
70. Drehen Sie den Zubehörhalter nach oben (in Pfeilrichtung).
71. Montieren Sie das Befestigungsbauteil, klemmen Sie das Rohr mit den Bauteilen 1 und 2 fest und ziehen Sie es mit den Schrauben (3) fest.


Installation der Funktionen

72. a. Führen Sie zuerst die Düsenhülle in Pfeilrichtung bis zur gestrichelten Linie in die Düse ein. b. Stecken Sie den Düsenanschluss in den Ausgang der Spray-Funktion an der Haupteinheit (Hinweis: Der Ausgang muss vollständig umschlossen sein). c. Schieben Sie schließlich die Düsenhülle in Pfeilrichtung (bis zur gestrichelten Linie) in den Ausgang der Spray-Funktion und fixieren Sie den Düsenanschluss. Die Sprühflasche wird am anderen Ende angeschlossen; damit ist die Installation dieser Funktion abgeschlossen.

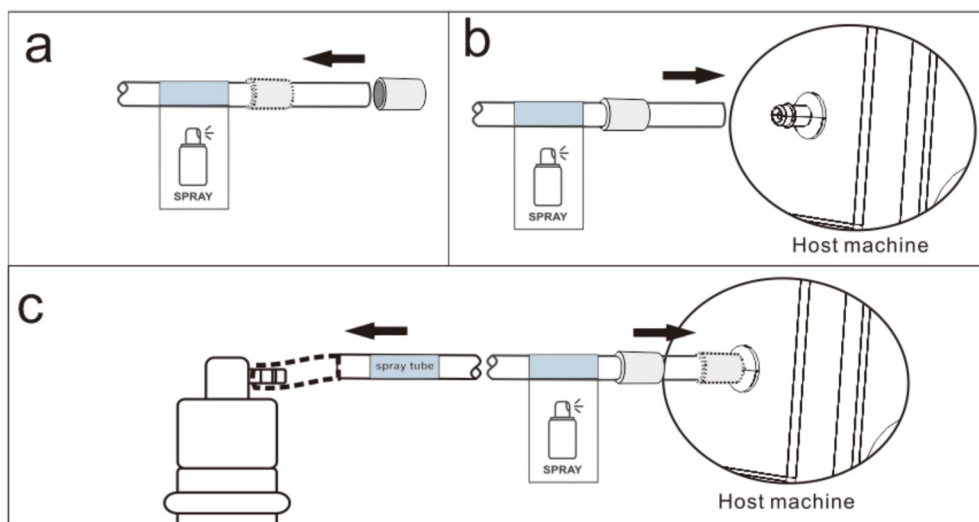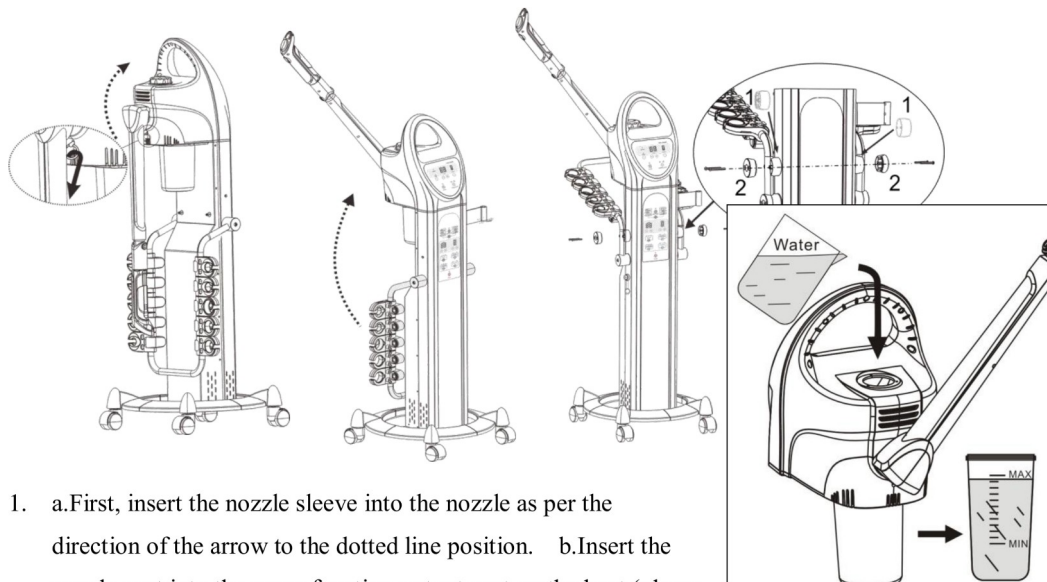

Anschluss der Sprühdüse (a · b · c)


73. Stecken Sie ein Ende des flexiblen Luftschlauchs mit der Kennzeichnung „vacuum tube“ wirksam in den Einlass des Saugstabs und das andere Ende in den Ausgang der Vacuum-Funktion der Haupteinheit.

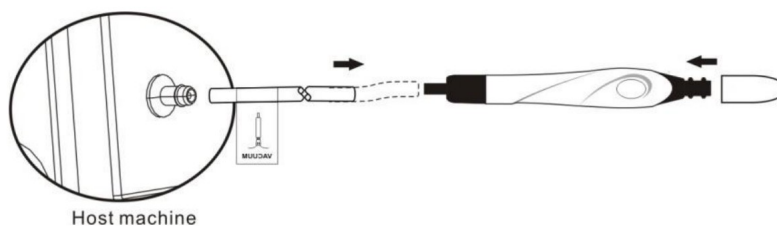

Anschluss des Vacuum-Schlauchs

74. Wasser einfüllen: Öffnen Sie die Wassereinfüll-Abdeckung und füllen Sie mit einem Messbecher destilliertes oder gereinigtes Wasser in die Schublade. Der Wasserstand muss zwischen der „MAX“- und der „MIN“-Linie liegen. Nutzbares Fassungsvermögen: 520 ml. Mindestwasserstand: 280 ml.

Heißdampf-Funktion

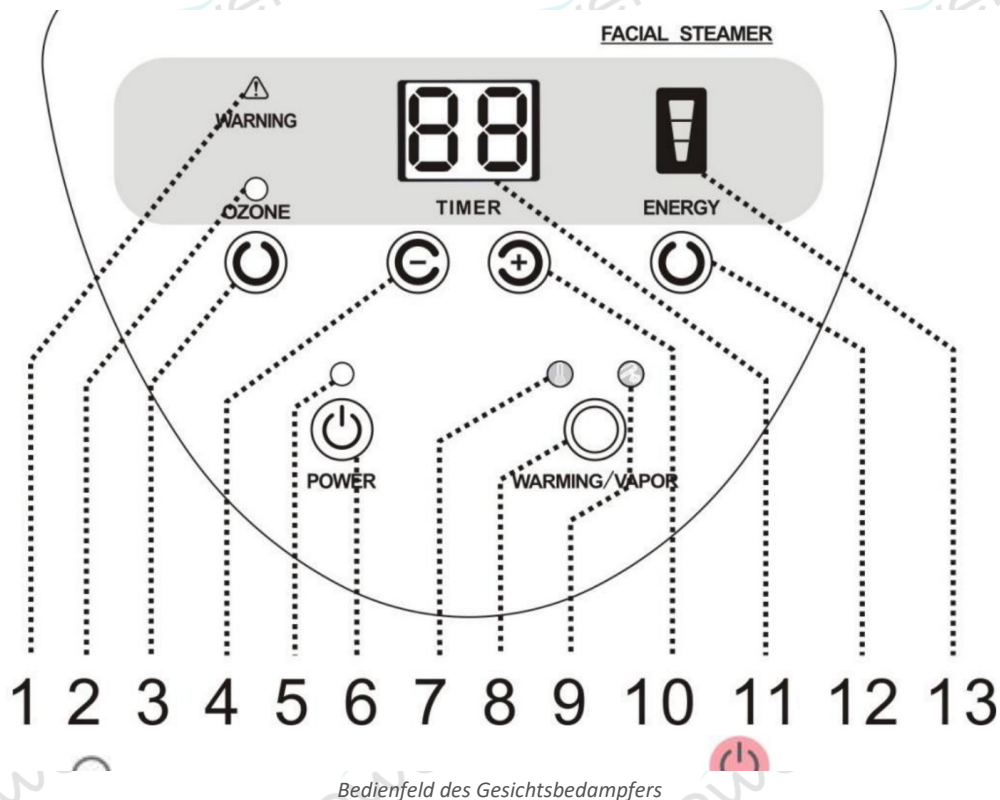

Elemente des Bedienfelds

1. Warnanzeige niedriger Wasserstand
2. Ozon-Betriebsanzeige
3. Ozon-Netzschalter
4. Taste Zeit verringern
5. Betriebsanzeige
6. Netzschalter
7. Wärme-Betriebsanzeige
8. Taste Wärme oder Heißdampf einschalten
9. Heißdampf-Betriebsanzeige
10. Taste Zeit erhöhen
11. Zeitanzeigefenster
12. Energie-Auswahltaste
13. Energieanzeigefenster

Bedienung des Bedienfelds

75. Stecken Sie den Netzstecker ein.
76. Beim Einschalten der Netztaste „POWER“ leuchtet die Betriebsanzeige; die Maschine geht in den Standby-Zustand.
 - Das Zeitfenster zeigt „15“ Minuten an.
 - Das Energiefenster zeigt die höchste Stufe an.
 - Die Ozon-Betriebsanzeige ist aus (Ozon-Schalter aus).
 - Die Dampf-Betriebsanzeige ist aus (WARMING/VAPOR-Schalter aus).
77. Schalten Sie die Heißdampf-Taste „WARMING/VAPOR“ ein.
 - **Heißdampf-Funktion:** Schalten Sie den „WARMING/VAPOR“-Schalter ein; die Dampf-Betriebsanzeige leuchtet. Die Haupteinheit beginnt zu heizen, und nach etwa sechs Minuten tritt Dampf aus der Düse aus.
 - **Wärme-Funktion:** Schalten Sie den „WARMING/VAPOR“-Schalter ein; die Wärme-Betriebsanzeige leuchtet. Die Haupteinheit beginnt zu heizen.
78. Zeiteinstellung: Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ für „TIMER“, um die gewünschte Arbeitszeit einzustellen. Bei aktiver Dampfanzeige: Bereich 1–30 Min., Vorgabe 15 Min. Bei aktiver Wärmeanzeige: Bereich 1–90 Min., Vorgabe 30 Min.
79. Energieeinstellung: Drücken Sie „ENERGY“, um die Nebelabgabe zu wählen; es stehen hohe, mittlere und niedrige Nebelstufen zur Auswahl. Ein voll leuchtendes Anzeigefenster bedeutet die höchste Energie, umgekehrt die niedrigste. Vor dem Austreten des Nebels sollte die höchste Stufe gewählt und der Nebel dann nach Bedarf angepasst werden.
80. Ozon-Funktion einschalten: Drücken Sie den Ozon-Schalter; die Ozon-Betriebsanzeige leuchtet. Die Ozonleitung wird aktiviert, und im Dampf ist deutlich Ozon mit erkennbarer Zerstäubung wahrnehmbar.

81. Wasserstandserkennung: Die Haupteinheit erkennt beim Heizen automatisch den Wasserstand. Liegt der Wasserstand im Normalbereich (zwischen Maximum und Minimum), heizt die Haupteinheit kontinuierlich weiter. Wird ein zu hoher oder zu niedriger Wasserstand erkannt (bei zu hohem Stand zeigt das Zeitfenster „E2“, bei zu niedrigem Stand „E1“), schaltet die Haupteinheit die Heizung sofort ab. Die Anzeige auf der „WARMING/VAPOR“-Taste erlischt, und der Summer gibt kontinuierlich das Alarmsignal „De De“ ab, bis der Wasserstand wieder normal ist und alle gesperrten Tasten entriegelt werden; drücken Sie dann „WARMING/VAPOR“, um fortzufahren.




heating “” or
 or level between
 us heating ;
 water level was
 the water level
 ost machine turn

WARMING/VAPOR ”
 continuously until
 ie all the locked

rework

gle to fit different

360 degree.
 overexertion, it is

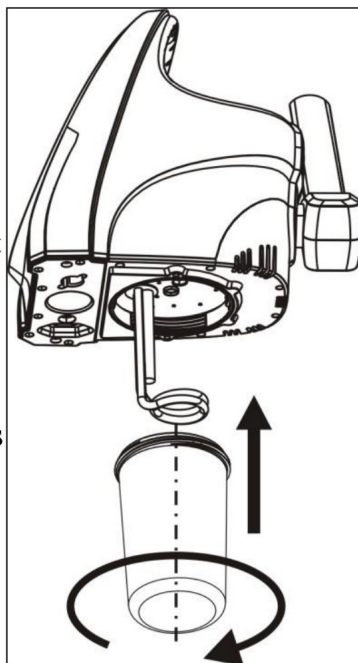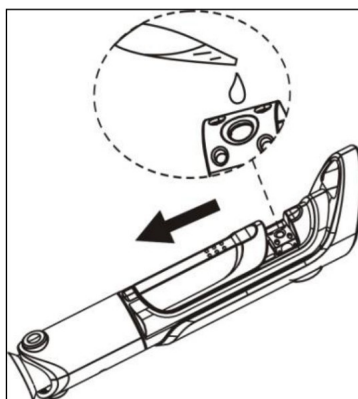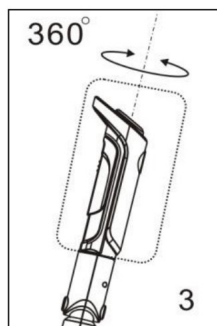



Wasserstandserkennung und Wasserbecher

Einstellung von Sprüharm und Sprühkopf

Der Sprüharm ist speziell konstruiert und lässt sich in verschiedene Winkel einstellen, um sich unterschiedlichen Situationen anzupassen:

- 130 Grad in Links-Rechts-Richtung einstellbar.
- 60 Grad in Vor-Zurück-Richtung einstellbar.
- Der Sprühkopf kann um 360 Grad gedreht werden.

200 degree can be adjust

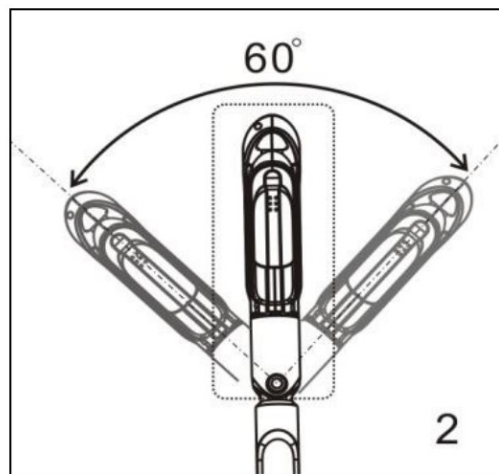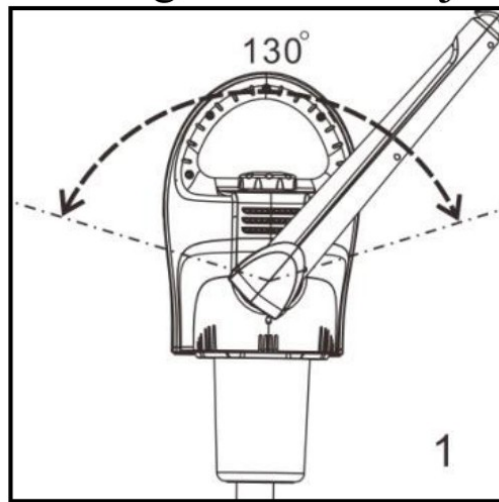

Verstellbereich des Sprüharms


Hinweis: Nicht mit übermäßiger Kraft verstellen, da das innere Gelenk leicht beschädigt wird.

Ätherisches Öl hinzufügen

Wenn eine Sprühtherapie mit ätherischem Öl gewünscht wird, öffnen Sie die Schiebeabdeckung für ätherisches Öl oben an der Düse und geben Sie mit einer Bürette ätherisches Öl auf das Baumwollpad (ein oder zwei Tropfen genügen). Zum Wechsel des ätherischen Öls entnehmen Sie den Sockel mit einer Pinzette, tauschen die Baumwolle, setzen ihn wieder ein und geben neues Öl hinzu.

Einbau und Ausbau des Wasserbechers

Trennen Sie vor dem Abnehmen des Wasserbechers die Stromzufuhr. Lassen Sie den Wasserbecher abkühlen und nehmen Sie ihn dann ab. Halten Sie die Haupteinheit mit einer Hand und drehen Sie den Boden des Bechers mit der anderen Hand im Uhrzeigersinn. Zum Einbau umgekehrt: Trennen Sie vor dem Einbau die Stromzufuhr, halten Sie die Haupteinheit mit einer Hand und drehen Sie den Boden des Bechers mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn.

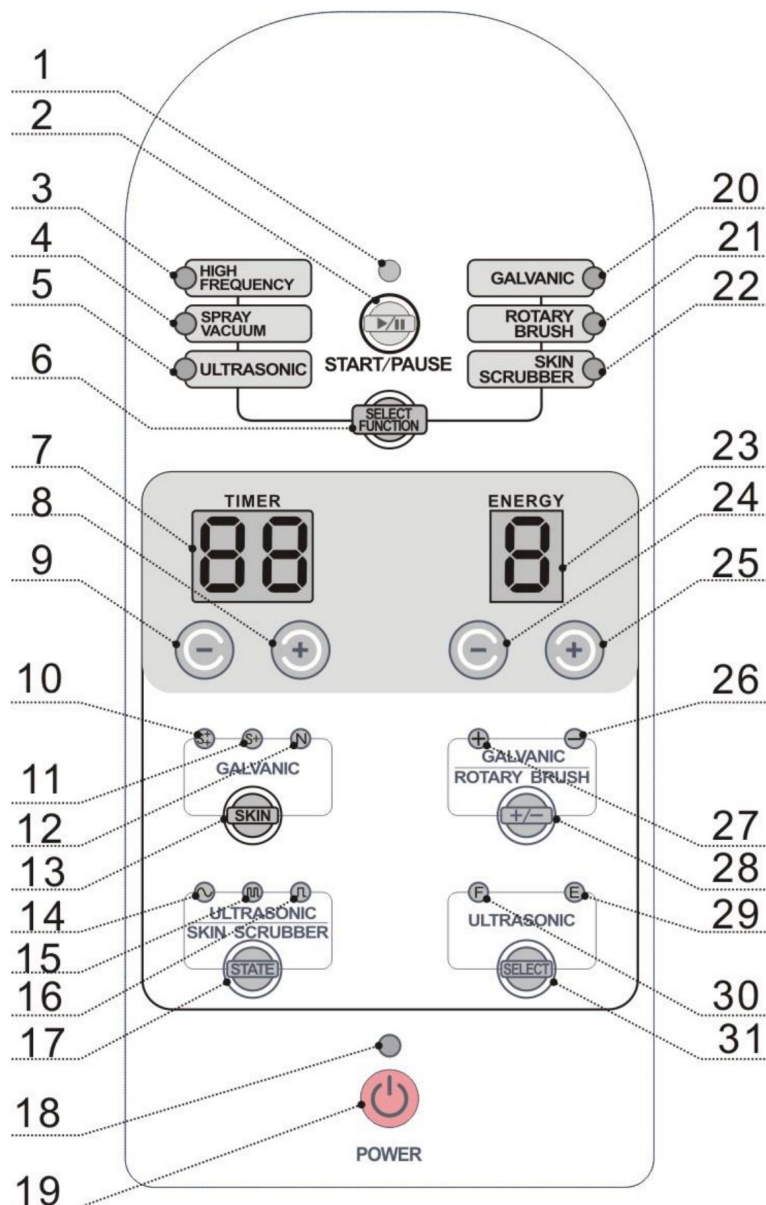

Wenn der Indikator "HIGH FREQUENCY" leuchtet, ist die Host-Maschine

Haupt-Bedienfeld (Funktionen 1–31)

1. Pause-Anzeige 2. Start/Pause 3. Anzeige Hochfrequenz-Elektrotherapie 4. Anzeige Spray/Vacuum 5. Anzeige Ultraschallwelle 6. Funktionsauswahltaste 7. Zeitanzeigefenster 8. Taste Zeit erhöhen 9. Taste Zeit verringern 10. Anzeige extrem empfindliche Haut 11. Anzeige empfindliche Haut 12. Anzeige normale Haut 13. Hauttyp-Auswahltaste 14. Anzeige Dauerwelle 15. Anzeige Mischwelle 16. Anzeige Breitimpulsquelle
17. Anzeige gewählte Wellenform 18. Betriebsanzeige 19. Netzschalter 20. Anzeige galvanische Zwitterionen-Einschleusung 21. Anzeige Bürstenfunktion 22. Anzeige Skin Scrubber 23. Energieanzeigefenster 24. Taste Energie verringern 25. Taste Energie erhöhen 26. Anzeige Kationen-Einschleusung 27. Anzeige Anionen-Einschleusung 28. Auswahltaste Ionen-Einschleusung 29. Anzeige Augensonde 30. Anzeige Gesichtssonde 31. Sonden-Auswahltaste


Hochfrequenz-Elektrotherapie

Funktionseinstellung

Drücken Sie im Standby-Zustand „SELECT FUNCTION“, um die Hochfrequenz-Elektrotherapie auszuwählen. Die Anzeige „HIGH FREQUENCY“ leuchtet, und die Haupteinheit geht in den Einstellzustand; in diesem Zustand kann nach Bedarf eingestellt werden. Drücken Sie nach der Einstellung die Taste „Start/Pause“, um die Abgabe der Haupteinheit einzuschalten und mit der Behandlung zu beginnen.

Direkte Elektrotherapie

82. Die Kosmetikerin hält das Handstück der Hochfrequenz-Elektrotherapie (siehe Abbildung rechts). Berühren Sie die Glas-Elektrotherapie-Röhre NICHT mit der Hand oder Metall, schalten Sie die Haupteinheit ein und stellen Sie „ENERGY“ auf die niedrigste Stufe.
83. Bringen Sie die Glas-Elektrotherapie-Röhre mit der zu behandelnden Partie der Kundin/des Kunden in Kontakt und drücken Sie „Start/Pause“, bis die Anzeige leuchtet. Erhöhen Sie langsam mit der „ENERGY“-Taste die Energieabgabe; die Glasröhre erzeugt eine Ionisationsleuchte, bis ein warmer Hochfrequenzstrom abgegeben wird. Wenn die Kundin/der Kunde Gesichtsschmierung oder eine Maske trägt, bewegen Sie die Glasröhre langsam vom Hals zu Kinn, Gesicht, Wange, Nase und Stirn. Passen Sie dabei die „ENERGY“-Stufe langsam nach Bedarf an. Wird auf der Gesichtshaut Wärme erzeugt, wirkt die direkte Hochfrequenz-Elektrotherapie beruhigend und besänftigend. Zugleich hat sie eine keimtötende Wirkung und eignet sich für ölige und zu Akne neigende Haut.

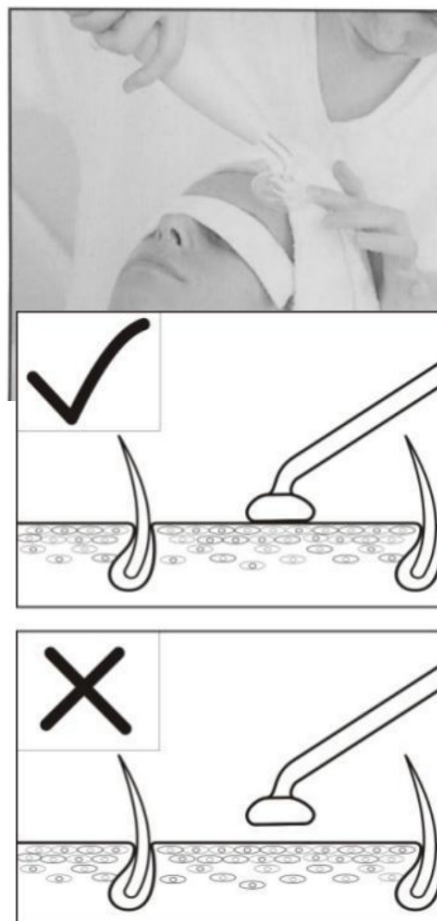

Röhrenkontakt: richtig / falsch

84. Regeln Sie nach dem Betrieb zuerst „ENERGY“ langsam herunter und drücken Sie „Start/Pause“, bis die Pause-Anzeige leuchtet; die Abgabe der Haupteinheit pausiert. Nehmen Sie erst dann die Glas-Elektrotherapie-Röhre vom Gesicht.

Funktionen der direkten Elektrotherapie

- Warme Vibration beruhigt die Haut wirksam.
- Regt die Blutzirkulation an und versorgt die Haut mit Nährstoffen, um Glanz und Elastizität zu verbessern.
- Fördert den Zellstoffwechsel und unterstützt Atmung und Ausscheidung der Haut.
- Die Wärmewirkung auf der Haut erhöht die Zelldurchlässigkeit, verbessert die Aufnahmefähigkeit der Haut und steigert die Behandlungswirkung.

Indirekte Elektrotherapie

Zuerst hält die Kundin/der Kunde die Stab-Elektrotherapie-Röhre, schaltet die Stromzufuhr ein, drückt „Start/Pause“ und stellt „ENERGY“ nach Bedarf ein; die Kosmetikerin massiert die zu behandelnde Partie. Während des gesamten Vorgangs berührt die Kosmetikerin die Elektrode nicht; bevor der Elektrodenstab abgenommen wird, muss „Start/Pause“ gedrückt werden, bis die Pause-Anzeige leuchtet, und erst nach dem Stoppen der Abgabe weitergearbeitet werden.



Funktionen der indirekten Elektrotherapie

- Regt die Blutzirkulation an und fördert den Zellstoffwechsel.
- Reguliert und stellt die Aufnahme von Nährstoffen sowie die Widerstandskraft gegen Bakterien wieder her.
- Steigert durch die Stromwirkung die Aktivität der Basalzellen der Haut und verbessert so die Massagewirkung.

Hinweis zum Betrieb der Hochfrequenz-Elektrotherapie


85. Während des normalen Betriebs des Elektrotherapie-Handstücks sind Quietschgeräusche zu hören.
86. Bei der direkten Elektrotherapie kann ein Funke entstehen, wenn die Glasröhre einen Abstand von weniger als 2,5 cm zur Haut hält; dies reizt die Haut und kann unangenehm sein. Daher sollte die Energiestufe vor dem Hautkontakt auf das Minimum eingestellt werden. Ist der Funke spürbar, kann ein trockenes Baumwolltuch auf das Gesicht gelegt werden.

87. Die Elektrodenröhre sollte bei verfügbarer direkter Elektrotherapie ohne Spalt eng an das Gesicht angelegt werden, da sonst leicht Funken entstehen und die Haut gereizt wird.
88. Zur Gesichtsbehandlung: 8 Min. bei öligter Haut, 3–5 Min. bei trockener Haut. Die Stromintensität ist bei öligter Haut stärker als bei trockener Haut.
89. Bei der indirekten Elektrotherapie sollte die Kosmetikerin eine Hand am Gesicht der Kundin/des Kunden halten, um eine Unterbrechung des Stroms und eine Beeinträchtigung der Wirkung zu vermeiden.
90. Zur Vermeidung eines Stromschlags drücken Sie zuerst „Start/Pause“, bevor die Glasröhre die Haut berührt, und erhöhen Sie dann langsam die Energie.
91. Beim Abnehmen der Glasröhre stellen Sie zuerst die Energie auf das Minimum und drücken „Start/Pause“, um die Abgabe abzuschalten, bis die Pause-Anzeige leuchtet; nehmen Sie sie dann ab.
92. „POWER“ muss beim Einbauen und Ausbauen der Glas-Elektrotherapie-Röhre ausgeschaltet sein.
93. Jede Glas-Elektrotherapie-Röhre muss vor und nach dem Gebrauch sauber, trocken und sterilisiert gehalten werden.
94. Das Elektrotherapie-Handstück kann mit einem Tuch gereinigt werden; NICHT in Wasser reinigen. Bei öliger Verschmutzung kann es mit reinem Alkohol gereinigt und trocken gehalten werden.

Spray- und Vacuum-Funktion

Spray and vacuum function:

Spray function:

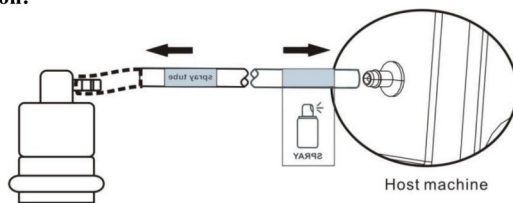


Firstly checks if the flexible tube of spray bottle connects appropriately with interface between host and spray bottle (see the Fig. right); switches on the power of host, adjust working time and energy level, and the host is under condition of pause output.

Under start up of host output, hold tightly the spray bottle by hands, and presses slightly the vent at top of spray bottle by fingers, then the mist will spray from the mouth; two spray bottles are prepared, for different liquids, and the bottle could be switched alternatively based on demand; the bottle should be pause for output when switch the spray bottle.

It should be careful for treatment of critical parts e.g. Mouth, nose, eyes. Please close the eye, mouth to prevent liquid sucked into the naris and should spray out toward below of chin, and keeps certain distance with face. After spray, pauses the host, and absorbs remained liquid on surface with cotton pellet or soft paper.

Vacuum function:

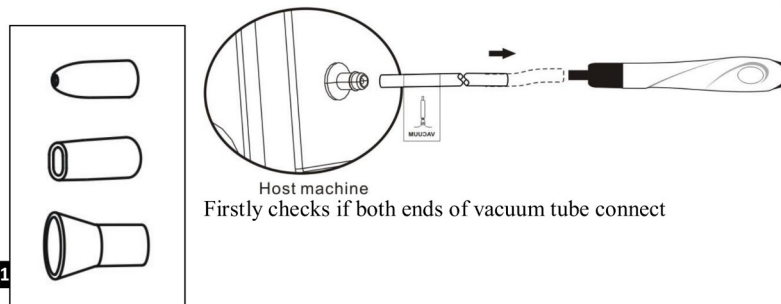

Host machine
Firstly checks if both ends of vacuum tube connect



Spray- und Vacuum-Behandlung

Spray-Funktion

Prüfen Sie zunächst, ob der flexible Schlauch der Sprühflasche korrekt mit der Schnittstelle zwischen Haupteinheit und Sprühflasche verbunden ist (siehe Abbildung rechts); schalten Sie die Haupteinheit ein, stellen Sie Arbeitszeit und Energiestufe ein; die Haupteinheit befindet sich im Pause-Zustand.

Bei eingeschalteter Abgabe halten Sie die Sprühflasche fest in der Hand und drücken mit den Fingern leicht die Entlüftung oben an der Flasche; der Nebel tritt dann aus der Öffnung aus. Zwei Sprühflaschen für unterschiedliche Flüssigkeiten stehen zur Verfügung und können nach Bedarf abwechselnd gewechselt werden; die Abgabe der Haupteinheit sollte beim Wechsel der Sprühflasche pausiert werden.

Bei kritischen Partien wie Mund, Nase und Augen ist Vorsicht geboten. Bitten Sie, Augen und Mund zu schließen, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Nasenlöcher gesaugt wird; sprühen Sie in Richtung unterhalb des Kinns und halten Sie einen gewissen Abstand zum Gesicht. Pausieren Sie nach dem Sprühen die Haupteinheit und nehmen Sie die restliche Flüssigkeit mit einem Baumwollpad oder weichem Papier auf.

Vacuum-Funktion

Prüfen Sie zunächst, ob beide Enden des Vacuum-Schlauchs korrekt mit der entsprechenden Schnittstelle verbunden sind (siehe Abbildung rechts); prüfen Sie am Ende des Saugstabs, ob der Schwammfilter vorhanden ist; falls nicht, setzen Sie den Schwammfilter ein und fixieren Sie den Saugstab; verbinden Sie das vordere Ende des Saugstabs mit dem transparenten Saugkopf. Achten Sie bei der Installation darauf, den Kopf beim Einsetzen langsam zu drehen, damit der Dichtring seine Form behält und die Luftdichtheit gewährleistet ist. Schalten Sie die Haupteinheit ein, stellen Sie Arbeitszeit und Energiestufe ein; die Haupteinheit befindet sich im Pause-Zustand.

Halten Sie bei eingeschalteter Abgabe den Saugstab fest in der Hand (wie einen Stift), führen Sie ihn an die Arbeitsstelle, bringen Sie die Düse des transparenten Saugkopfs mit der Haut in Kontakt und drücken Sie leicht auf


die Druckentlastungs-Entlüftung; die mit dem Saugkopf in Kontakt stehende Haut wird angesaugt. Bewegen Sie den Stab über die betreffenden Partien, wo Mitesser und Akne abgesaugt werden dürfen. Je nach Hautbereich sind unterschiedliche Saugköpfe zu wählen:

- Der Rundmund-Saugkopf wird für Mitesser und Akne auf kleinen Hautflächen verwendet.
- Der Flachmund-Saugkopf wird für Mitesser und Akne auf schmalen Hautflächen verwendet.
- Der Trichterförmige Saugkopf wird für Mitesser und Akne auf großen Hautflächen verwendet.

Tägliche Wartung

95. Das flexible Kabel von Sonde und Haupteinheit muss ordentlich verlegt werden. NICHT verdrehen.
96. Verwenden Sie die Sonde mit Sorgfalt. Die Sonde muss sauber und trocken gehalten und nach dem Gebrauch mit Ethanol oder anderen Mitteln sterilisiert werden.
97. Jede Glas-Elektrotherapie-Röhre muss sorgfältig verwendet und vor und nach dem Gebrauch sauber, trocken und sterilisiert gehalten werden.
98. Die Dichtheit der Elektrotherapie-Röhre sollte regelmäßig geprüft werden. Prüfmethode: Setzen Sie die zu prüfende Röhre in das Handstück, legen Sie das Handstück stabil auf den Tisch, verbinden Sie es mit dem Kabel der Haupteinheit, schalten Sie ein und erhöhen Sie schrittweise die Energieabgabe; das Aufleuchten in der Röhre ist normal.
99. Der Saugkopf sollte sauber gehalten, nach dem Gebrauch gereinigt und sterilisiert und sachgemäß aufbewahrt werden.
100. Die Düse der Sprühflasche sollte sauber und frei von Verstopfungen gehalten werden.
101. Schützen Sie den flexiblen Schlauch vor Beschädigungen, um die Wirkung zu erhalten.
102. Wischen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab und stellen Sie es in einen trockenen, belüfteten Bereich; die Kabel sollten ordentlich und nicht verdreht verlegt werden.
103. Das Gerät sollte mit einem trockenen Tuch abgewischt werden; NICHT mit Wasser benetzen.
104. Schalten Sie den Hauptschalter nach der täglichen Nutzung aus und ziehen Sie am Ende des Arbeitstages den Stecker.
105. Das Gerät sollte NICHT in Bereichen mit Sonneneinstrahlung, Regen, Feuchtigkeit, Staub oder Rauchansammlung aufgestellt werden.

Ultraschall-Funktion

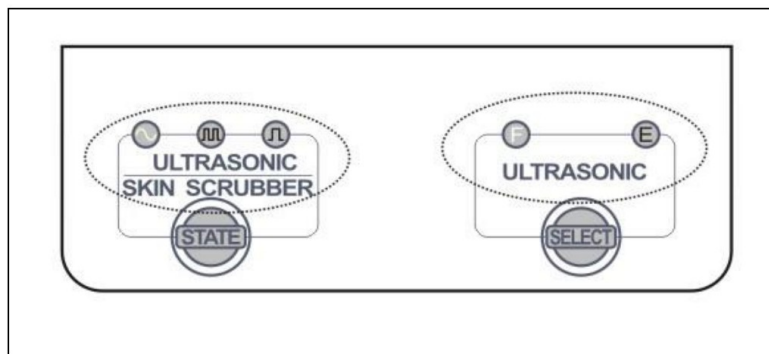

d-by, press "  " to select ultrasonic wave function.
indicator "  " lights, the host machine

Ultraschall-Bedienfeld


Drücken Sie im Standby-Zustand „SELECT FUNCTION“, um die Ultraschallwellen-Funktion auszuwählen. Ist die Ultraschallwellen-Funktion gewählt, leuchtet die Anzeige „ULTRASONIC“, und die Haupteinheit geht in den Einstellzustand für Ultraschall: Zeitanzeige „15“ Min., Energieanzeige „5“, Sondauswahl links auf Gesichtssonde („F“), Wellenformauswahl links auf Dauerwelle. In diesem Zustand können Zeit und Energie sowie Sonde und Wellenform nach Bedarf eingestellt werden.

Auswahl der Ausgangssonde: Drücken Sie die Taste „SELECT“ der Ultraschallsteuerung, um die Ausgangssonde zu wählen. Leuchtet „F“, ist die Gesichtssonde gewählt; leuchtet „E“, ist die Augensonde gewählt.

Auswahl der Wellenform: Drücken Sie „STATE“, um die Wellenform zu wählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet für Dauerwelle, Mischwelle bzw. Breitimpulswelle.


Drücken Sie nach abgeschlossener Einstellung „Start/Pause“, um die Abgabe der Haupteinheit zu starten oder zu pausieren.

Galvanik-Funktion

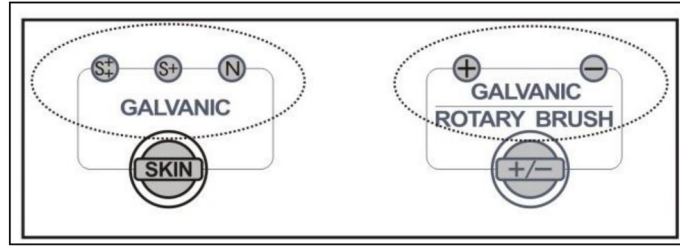

Under the status of stand-by, press "SELECT FUNCTION" key to select Galvanic function. The "GALVANIC" lights, the host machine enters the adjustment status; under this s

Galvanik-Bedienfeld

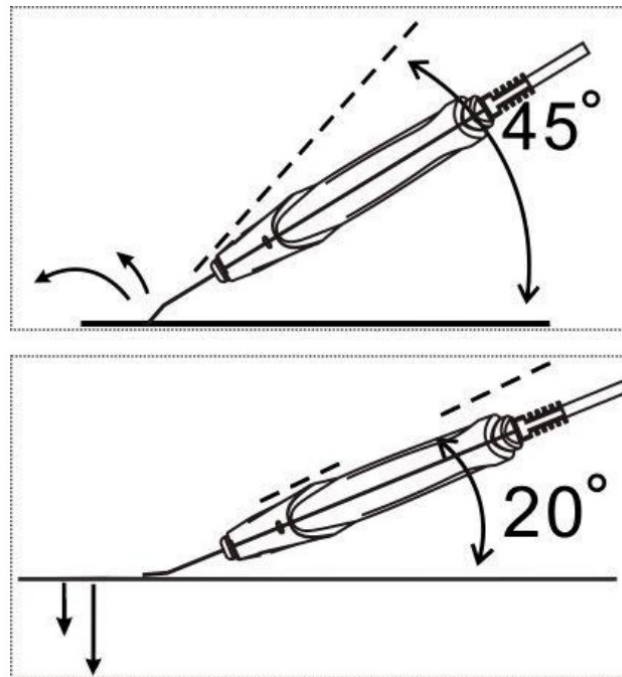

Sondenwinkel: 45° Reinigung · 20° Einschleusung

Drücken Sie im Standby-Zustand „SELECT FUNCTION“, um die Galvanik-Funktion auszuwählen. Die Anzeige „GALVANIC“ leuchtet, und die Haupteinheit geht in den Einstellzustand; in diesem Zustand kann nach Bedarf eingestellt werden.

Auswahl des Hauttyps: Drücken Sie „SKIN“, um den passenden Hauttyp zu wählen. „N“ = normale Haut, „S+“ = empfindliche Haut, „S++“ = extrem empfindliche Haut.

Auswahl des Ionen-Einschleusungspols: Drücken Sie „+/-“, um den Ausgangspol für Sonden mit rotem flexiblem Kabel zu wählen. „+“ = Kationen-Einschleusung, „-“ = Anionen-Einschleusung.

Starten oder Pausieren der Abgabe: Drücken Sie im Standby- oder Einstellzustand „Start/Pause“, um die Abgabe zu starten oder zu pausieren; bei laufender Abgabe leuchtet die Start-Anzeige, bei Pause oder Standby die Pause-Anzeige.

Drei Einschleusungsmethoden der Zwitterionen-Funktion

1. Einpolige Einschleusung durch die Kosmetikerin

- Tragen Sie die Hälfte der Pflanzenessenz direkt auf die Haut auf und tränken Sie mit der anderen Hälfte das Baumwollpad, das auf die Sonde gerollt wird.
- Schalten Sie die Haupteinheit ein und drücken Sie „POWER“, stellen Sie „ENERGY“ auf das Minimum, lassen Sie die Kundin/den Kunden den Elektrodenstab halten, während die Kosmetikerin die Sonde am Hals ansetzt,

drücken Sie „Start/Pause“, starten Sie die Haupteinheit, drücken Sie „+/-“ für den Kationen-Zustand und passen Sie die Energieabgabe mit „ENERGY“ an (ein leichtes Kribbeln ist spürbar).


- Die Sonde bewegt sich langsam in Z-Form über Gesicht oder Halspartie und bleibt während der gesamten Dauer von 3–5 Min. in Hautkontakt.
- Drücken Sie nach dem Betrieb „Start/Pause“, um die Abgabe zu pausieren, schalten Sie „POWER“ ein und nehmen Sie dann die Sonde sowie den von der Kundin/dem Kunden gehaltenen Elektrodenstab ab.


2. Ausschleusung von Unreinheiten

Bei der Ausschleusung von Unreinheiten wird die bewegte Sonde auf negative Elektrode eingestellt, während der von der Kundin/dem Kunden gehaltene Elektrodenstab bzw. die Sonde mit der positiven Elektrode verbunden wird. Verwenden Sie spezielle Essenz zur Ausschleusung oder Kochsalzlösung, um das Baumwollpad zu tränken und auf die Sonde zu rollen; oder legen Sie eine dünne Baumwolllage bzw. eine mit Essenz getränkte Maske auf die Behandlungspartie. Drücken Sie dann „+/-“, um den Anionen-Einschleusungszustand einzustellen; die übrigen Schritte entsprechen der Nährstoff-Einschleusung.

Rotierende Bürste (Reinigung)

ig

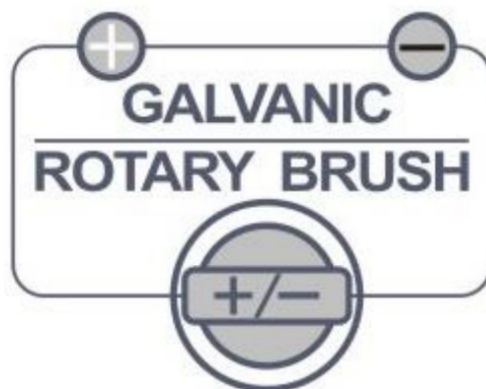

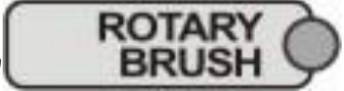nd-by, press "  " to select Rotary b
"  " lights, the host mach

Bedienfeld der rotierenden Bürste

Funktionseinstellung

Drücken Sie im Standby-Zustand „SELECT FUNCTION“, um die Reinigungsfunktion der rotierenden Bürste auszuwählen. Die Anzeige „ROTARY BRUSH“ leuchtet, und die Haupteinheit geht in den Einstellzustand: Zeitanzeige „15“, Energieanzeige „5“, die Anzeige für Drehung im Uhrzeigersinn links leuchtet, die Start-Anzeige rechts ist aus. In diesem Zustand können Arbeitszeit und Energieabgabe eingestellt sowie die Drehrichtung der Bürste gewählt werden.

Auswahl der Drehrichtung: Drücken Sie die Taste „+/-“, um den Ausgangszustand der Bürste zu wählen. „+“ = Drehung im Uhrzeigersinn, „-“ = Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Wird die Drehrichtung im Betrieb geändert, geht die Haupteinheit in den Schutzzustand und schaltet automatisch um, sobald die Bürste stehen bleibt. Drücken Sie nach der Einstellung „Start/Pause“, um die Abgabe einzuschalten und mit der Behandlung zu beginnen.


Bürste wechseln

106. Bürste abnehmen: Halten Sie das Bürstenhandstück in einer Hand und den Kunststoffteil der Bürste in der anderen, ziehen Sie in entgegengesetzte Richtung; die Bürste löst sich leicht mit einem hörbaren „Ka“.
107. Bürste aufsetzen: Halten Sie das Bürstenhandstück in einer Hand und den Kunststoffteil der Bürste in der anderen, drehen und drücken Sie in entgegengesetzte Richtung; die Bürste rastet leicht mit einem hörbaren „Ka“ ein.

Zum Ab- oder Aufsetzen darf nur der Kunststoffteil von Hand gedrückt oder gezogen werden, nicht das Bürstenmaterial (z. B. EVA oder Flaum), da dies die Wirkung beeinträchtigt oder die Bürste zerstört.

Hautreinigung

108. Weichen Sie die Haut zunächst mit dem Sprüher oder klarem Wasser auf.
109. Tragen Sie ein Hautpflegeprodukt (z. B. Reinigungsmilch oder Reinigungsgel) gleichmäßig auf die Haut auf, wählen Sie je nach Beschaffenheit und zu reinigendem Bereich die passende Bürste und setzen Sie sie auf das Handstück, tauchen Sie etwas Wasser auf die Bürste, führen Sie sie an die zu reinigende Haut und schalten Sie die Haupteinheit ein, um mit Reinigung und Massage zu beginnen.
110. Halten Sie die Haut während der gesamten Reinigung feucht.

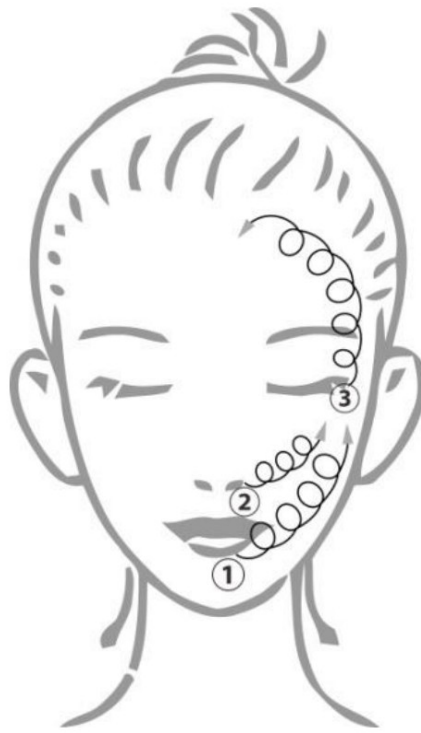

Bewegungsrichtung der Bürste

111. Entfernen Sie nach der Bürstenreinigung das Pflegeprodukt mit einem Handtuch oder Kosmetiktuch und reinigen Sie die Haut anschließend mit einem feuchten Tuch und Kosmetikwatte.

Hinweise zur Bürstenfunktion

112. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Bürste in das Handstück eingesetzt ist.
113. Verringern Sie die Drehzahl der Bürste, bevor Sie die Haut der Kundin/des Kunden berühren; bei Hautkontakt muss der Druck leicht sein, um Unbehagen zu vermeiden.
114. Verwenden Sie beim Reinigen oder Massieren dickflüssige Pflegeprodukte und verringern Sie die Drehzahl, damit die Produkte nicht durch schnelle Drehung verspritzt werden und Verschwendung oder Verschmutzung verursachen.
115. Muss die Bürste während der Pflege gewechselt werden, stoppen Sie die Abgabe der Haupteinheit und warten Sie, bis die Bürste steht, bevor Sie sie ab- und aufsetzen.
116. Reinigen und sterilisieren Sie alle verwendeten Bürsten nach der Arbeit und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
117. Das Bürstenhandstück darf nicht mit Wasser gereinigt werden; wischen Sie es mit einem Tuch sauber und bewahren Sie es trocken auf.

Skin-Scrubber-Funktion



Drücken Sie "  " to select Skin Scrubber fu

Skin-Scrubber-Bedienfeld





Funktionseinstellung

Drücken Sie im Standby-Zustand „SELECT FUNCTION“, um die Skin-Scrubber-Funktion auszuwählen. Die Anzeige „SKIN SCRUBBER“ leuchtet, und die Haupteinheit geht in den Einstellzustand: Zeitanzeige „15“, Energieanzeige „5“, Dauerwellen-Anzeige an, Start-Anzeige aus. Drücken Sie in diesem Zustand „Start/Pause“, um die Abgabe zu starten oder zu pausieren.

Funktionseinstellung im Standby: Zeiteinstellung mit „+“ und „-“ (Bereich 1–30 Min.); Energieeinstellung mit „+“ und „-“ (Stufen 1–9); Wellenformauswahl mit „STATE“ (Dauerwelle, Mischwelle oder Breitimpulswelle). Drücken Sie nach der Einstellung „Start/Pause“, um die Gesichtsbehandlung zu starten.

Hautreinigung

118. Weichen Sie die zu reinigende Haut mit dem Sprüher oder Reinigungswasser auf.
119. Legen Sie den Sensor am Handgelenk der Kundin/des Kunden an.
120. Drücken Sie die „ENERGY“-Taste, um die Energie auf die passende Stärke einzustellen.
121. Tragen Sie Hautpflegeprodukte (z. B. Reinigungsmilch) gleichmäßig auf die Hautoberfläche auf; halten Sie die Haut während des gesamten Vorgangs feucht.
122. Beachten Sie die Darstellung A, B, C, D.

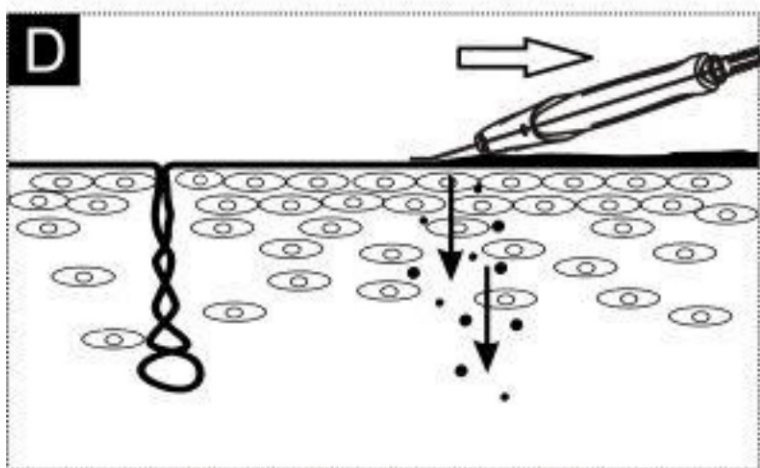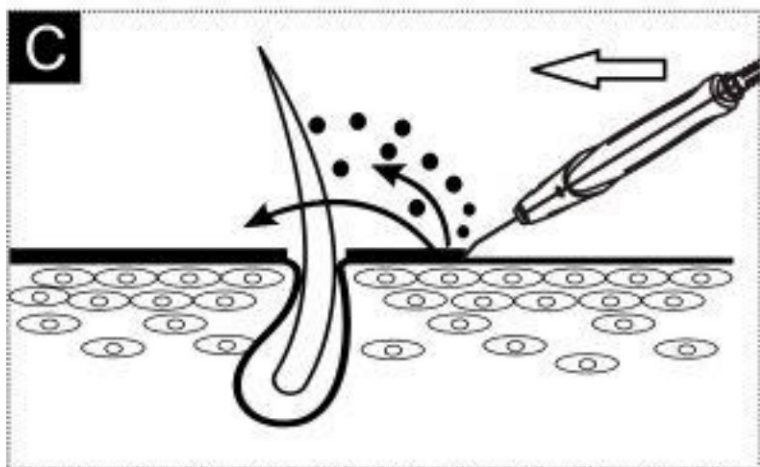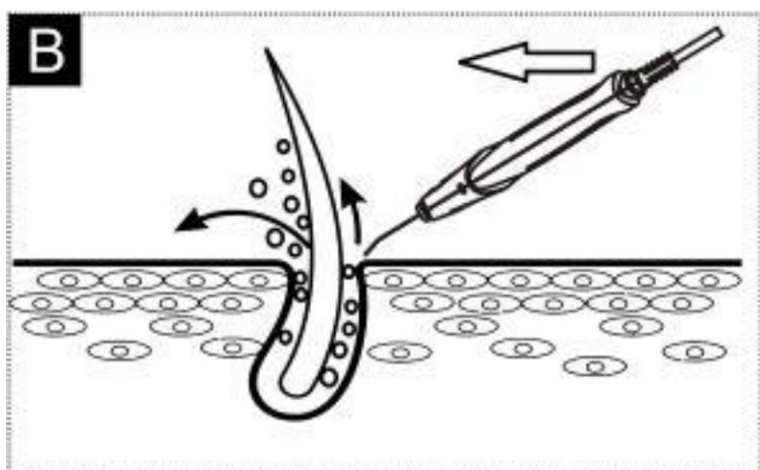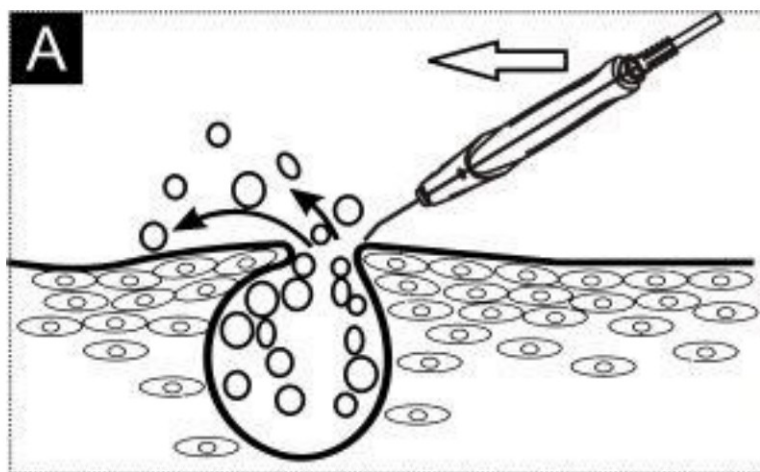

A. Schmerzlose Aknebeseitigung (Abbildung A)

Der Ultraschall zerlegt reife Akne durch Vibration in kurzer Zeit in kleinere Partikel; der gesamte Vorgang ist schmerzlos.

B. Beseitigung von Ausschlägen (Abbildung B)

Mit einer Vibrationsfrequenz von 25.000 Mal können Ausschläge in den Poren und Kosmetikrückstände sehr schnell beseitigt werden.


C. Hautreinigung (Abbildung C)

Das Schabermesser entfernt Schmutz und gealterte Haut.

D. Einschleusungsmassage (Abbildung D)

Legen Sie den Kopf des Schabermessers flach auf die Hautoberfläche; mit einer Zieh-Schub-Bewegung kann die Essenz wirksam in die Haut eingeschleust werden (siehe Abbildung D).

Bedienungshinweise (Lupenleuchte)

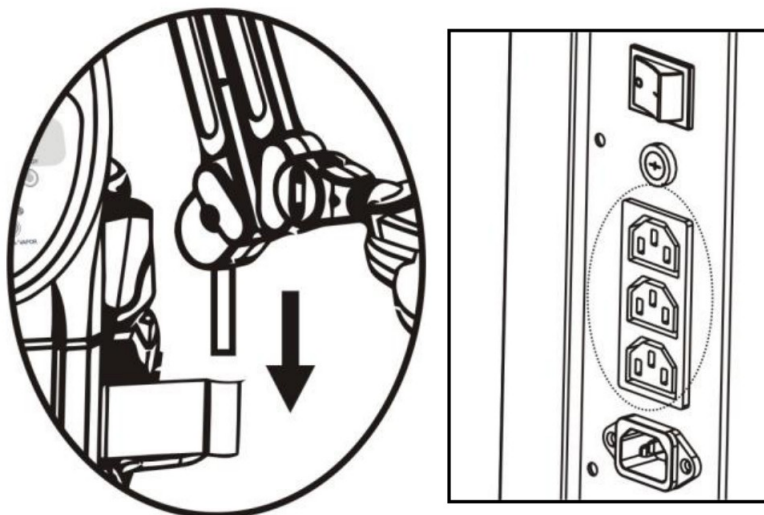

Einbau der Lupenleuchte und Anschlüsse

123. Setzen Sie die Lupenleuchte in die Haupteinheit ein (siehe Abbildung rechts).
124. Verbinden Sie den Stecker entsprechend mit der Buchse (siehe Abbildung rechts).
125. Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung und stellen Sie über das Einstellgelenk die korrekte Position ein.
126. Schalten Sie den Netzschalter ein und beginnen Sie mit der Behandlung.

Spezifikationen und technische Daten

Produktbezeichnung	9-in-1-Schönheitsgerät
Artikelnr.	H5050
Funktionen	Gesichtsbedampfer, Lupenleuchte, Ultraschall, Skin Scrubber, Galvanik, Hochfrequenz, rotierende Bürste, Spray und Vacuum
Nennspannung	AC 100-120 V~ / AC 220-240 V~
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	800 W / 850 W
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 440 x 550 mm
Nettogewicht	22,5 kg

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts!

- Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie alle in dieser Anleitung enthaltenen Warnhinweise.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit auf und händigen Sie, wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, auch die Anleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.
- Einige Komponenten des Produkts können von der Abbildung in Katalogen, Websites, Broschüren usw. abweichen.
- Zur Verbesserung des Produkts behält sich der Hersteller das Recht vor, dessen Eigenschaften und/oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Importiert von: WEELEKO BARCELONA SL · Pol. Ind. La Valldan · Camí de Garreta, 92 · 08600 Berga · Barcelona - Spanien · T. +34 93 824 90 20 · E. info@weelko.com