

PRESOFIT PRO

Appareil professionnel de pressothérapie avec combinaison corporelle réglable : 16 canaux, 32 poches d'air et 8 programmes de travail — Modèle certifié IDMRTSE8



Pressothérapie séquentielle

16 canaux de travail et 32 poches d'air avec chevauchement partiel entre poches contiguës

8 programmes automatiques

Modes A à H, avec des séquences de gonflage et de dégonflage différentes

Pression réglable

Trois niveaux de travail, de 75 à 225 mmHg, et séances jusqu'à 60 minutes

Combinaison corporelle réglable

Jambes, fessiers, hanches, abdomen et taille, avec un système de 3 tailles

Sommaire

PRESOFIT PRO · Manuel d'instructions

01	Informations générales	03
02	Principes de fonctionnement	05
03	Applications esthétiques	07
04	Contre-indications	08
05	Règles de sécurité	10
06	Description de l'appareil	12
07	Installation et raccordement	17
08	Fonctionnement	21
09	Protocole de traitement	26
10	Mise en place de la combinaison	28
11	Les séances	30
12	Précautions pendant le traitement	31
13	Nettoyage et entretien	32
14	Résolution des problèmes	33
15	Caractéristiques techniques et conformité	35
16	Garantie et service technique	38
17	Fin de vie et recyclage	41
A	Fiche d'évaluation préalable et consentement éclairé	42
B	Registre des séances	45
C	Guide rapide de cabine	46
D	Index des figures	47

01 INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRESOFIT PRO est le nom commercial exclusif de Sunmarket Wellness pour l'appareil professionnel de pressothérapie portant la référence IDMRTSE8. Il s'agit d'un système de compression pneumatique séquentielle composé d'une unité de commande à écran tactile et d'une combinaison corporelle réglable qui couvre les jambes, les fessiers, les hanches, l'abdomen et la taille. L'appareil fonctionne avec 16 canaux et 32 poches d'air, intègre 8 programmes automatiques et permet de régler la pression de travail sur trois niveaux, entre 75 et 225 mmHg.

1.1 Description de l'appareil

L'ensemble se compose d'une unité principale de table et d'une combinaison corporelle qui lui est reliée par deux faisceaux multivoies. L'unité gère le remplissage et la vidange des poches d'air de la combinaison selon le programme, la pression et les temps configurés par le professionnel sur l'écran :

- **Unité de commande** : boîtier de table avec écran tactile couleur de 8 pouces, compresseur intégré, deux connecteurs d'air ronds, interrupteur général et prise d'alimentation sur le panneau arrière.
- **Combinaison corporelle** : vêtement intégral d'une seule pièce avec 32 poches d'air réparties sur 16 canaux de travail, réglable en 3 tailles au moyen de fermetures latérales et d'une fermeture centrale supérieure.
- **Programmation** : 8 modes automatiques identifiés de A à H, trois niveaux de pression, durée de séance réglable et réglage indépendant du temps de gonflage de chaque canal.
- **Commande par zones** : trois accès directs qui activent ou désactivent des groupes de canaux, ainsi que la fermeture individuelle de n'importe quel canal.

1.2 Usage prévu et utilisateurs

L'appareil est destiné à un usage professionnel en cabine, dans les instituts de beauté, les spas et les centres de bien-être. Il ne doit être utilisé que par du personnel disposant d'une formation technique spécifique et après lecture intégrale de ce manuel. PRESOFIT PRO a une finalité exclusivement esthétique et de bien-être : ce n'est pas un dispositif médical et il n'est pas destiné à la prévention, au diagnostic ni au traitement d'une quelconque pathologie, ni à intervenir sur des troubles circulatoires, un lymphœdème ou d'autres conditions médicales.

NOTE

Cet appareil ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. En présence d'une pathologie, d'un traitement médical en cours ou d'un doute sur l'adéquation de la séance, demandez une autorisation médicale écrite préalable avant d'appliquer le traitement. Sunmarket Wellness décline toute responsabilité en cas d'utilisation de l'appareil par des personnes ne disposant pas de la qualification adéquate.

1.3 Identification du produit

Indiquez toujours ces données lorsque vous demandez des pièces de rechange, une assistance technique ou la documentation de conformité :

Nom commercial	PRESOFIT PRO · nom commercial exclusif de Sunmarket Wellness
Référence	IDMRTSE8
Modèle certifié	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Catégorie	Machines de pressothérapie professionnelle · appareils d'esthétique
Fabricant et importateur	PostQuam Cosmetic S.L. · Ctra. Burgos-Portugal km 115, 47270 Cigales (Valladolid), Espagne
Origine	Conçu en Italie · Fabriqué en Chine
Distributeur	Sunmarket Wellness S.L.U. · Valence, Espagne · www.sunmarket.es

1.4 Symboles utilisés dans ce manuel

Trois niveaux d'avertissement sont utilisés tout au long du document. Respectez-les à tout moment :

SYMBOLE	SIGNIFICATION
DANGER	Risque pour la sécurité des personnes ou de dommage grave à l'appareil. Le non-respect peut provoquer des lésions.
ATTENTION	Situation pouvant compromettre le résultat du traitement ou la durée de vie de l'appareil.
NOTE	Information complémentaire ou recommandation de bonnes pratiques.

02 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

2.1 La pressothérapie esthétique

La pressothérapie est une technique d'esthétique professionnelle fondée sur la compression pneumatique contrôlée. La combinaison enveloppe le corps et l'unité règle le gonflage et le dégonflage de ses poches d'air selon des cycles programmés, de sorte que la pression parcourt la zone traitée de façon ordonnée.

Le résultat est un massage mécanique rythmé et reproductible, dont l'intensité, le parcours et le rythme se règlent depuis l'écran. En cabine, elle est utilisée comme technologie de confort corporel et comme appui des protocoles esthétiques de modelage de la silhouette, d'amélioration visuelle de l'aspect de la peau et de sensation de repos dans les jambes.

2.2 Compression séquentielle par canaux

La combinaison répartit 32 poches d'air sur 16 canaux de travail, 16 poches de chaque côté du corps. Chaque canal se remplit et se vide de manière indépendante, et le programme sélectionné détermine l'ordre : canal par canal en séquence ascendante, par paires enchaînées, en cumulant des canaux successifs, en deux parcours simultanés ou sur toute la combinaison à la fois.

Cette architecture permet au professionnel de moduler la sensation de la séance sans changer d'accessoire : la même combinaison peut offrir un massage doux et progressif ou une compression enveloppante et plus marquée, uniquement par le mode, la pression et les temps de gonflage.

2.3 Chevauchement entre poches adjacentes

Chaque poche d'air se superpose partiellement à la poche contiguë. Ce chevauchement évite les zones sans pression entre canaux consécutifs et rend la transition d'une poche à la suivante continue, au lieu d'être par paliers. Pendant la séance, la perception est celle d'une compression progressive et homogène, mieux adaptée au contour corporel.

NOTE

Le chevauchement entre poches est une caractéristique de construction de la combinaison et ne demande aucun réglage de la part du professionnel.

2.4 Effets en cabine

- **Modelage de la silhouette** : la compression séquentielle s'intègre comme complément dans les protocoles corporels de modelage et de réduction de contour, dans une approche esthétique.
- **Aspect de la peau** : appui dans les traitements visant à améliorer visuellement l'aspect de la cellulite et de la peau d'orange.
- **Sensation de légèreté** : aide à réduire la sensation de lourdeur dans les jambes, dans une approche de bien-être esthétique.
- **Confort et repos** : le massage rythmé apporte une expérience de relaxation corporelle, en particulier avec les modes à haute fréquence et le mode de compression globale.

- **Synergie avec la cosmétique de cabine** : la séance peut être associée à une cosmétique drainante ou réductrice et à des bandes froides dans le protocole, toujours dans le cadre d'un traitement esthétique.

03 APPLICATIONS ESTHÉTIQUES

PRESOFIT PRO a été conçu pour une utilisation en cabine avec une finalité exclusivement esthétique et de bien-être. Ses applications habituelles sont :

- Protocoles corporels esthétiques de bien-être et de confort
- Complément dans les programmes de modelage de la silhouette
- Appui dans les traitements visant à améliorer visuellement l'aspect de la cellulite
- Travail esthétique sur la sensation de rétention d'eau, dans une perspective cosmétique
- Sensation de jambes fatiguées et lourdes en fin de journée
- Séances de repos corporel après un effort physique ou de longues journées
- Préparation et clôture d'autres traitements corporels en cabine
- Complément de protocoles avec cosmétique drainante ou réductrice

3.1 Zones de travail de la combinaison

- Jambes
- Fessiers
- Hanches
- Abdomen
- Taille
- Travail corporel inférieur complet avec combinaison intégrale

NOTE

La combinaison ne comprend pas de bras et l'appareil n'accepte pas d'extension avec des modules de bras. Toutes les applications décrites concernent le bas du corps ainsi que la zone abdominale et la taille.

DANGER

La pressothérapie de cet appareil doit être décrite et utilisée uniquement dans une approche esthétique. Elle n'est pas destinée au traitement de pathologies, de maladies circulatoires, d'un lymphœdème ou d'autres conditions médicales, et elle ne doit pas être présentée comme telle au client, ni en cabine ni dans aucun support de communication du centre.

04 CONTRE-INDICATIONS

DANGER

N'appliquez pas le traitement à une personne relevant des cas suivants. Au moindre doute, exigez un rapport ou une autorisation médicale écrite avant la première séance.

4.1 Contre-indications absolues

- Grossesse ou suspicion de grossesse
- Thrombose veineuse profonde, thrombophlébite ou phlébothrombose récentes
- Processus infectieux actifs
- Infections cutanées, plaies ouvertes, brûlures ou dermatite sur la zone de travail
- Insuffisance cardiaque
- Porteurs de stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre dispositif électronique implanté
- Épilepsie
- Processus oncologiques actifs, sauf indication médicale expresse
- Inflammations aiguës et états fébriles
- Varices importantes ou tortueuses
- Lymphangite
- Insuffisance respiratoire ou rénale importante
- Troubles de la tension artérielle non contrôlés
- Tout problème circulatoire non évalué préalablement par un professionnel de santé

4.2 Contre-indications relatives

Elles exigent une évaluation individuelle et, le cas échéant, une autorisation médicale préalable. Travaillez au niveau de pression le plus bas, avec des durées courtes et une surveillance continue :

- Personnes sous traitement médical ou en cours de diagnostic
- Diabète avec neuropathie ou altération de la sensibilité
- Altérations de la sensibilité cutanée
- Hernies abdominales ou inguinales : évitez le travail abdominal
- Menstruations, si le travail abdominal provoque une gêne
- Suites opératoires sans autorisation médicale définitive
- Fragilité capillaire importante ou tendance aux hématomes
- Tension artérielle basse
- Âge avancé avec pathologie circulatoire associée
- Personnes de moins de 18 ans

4.3 Zones et situations à exclure

- Ne travaillez pas sur des zones présentant une infection active, une lésion cutanée ou une inflammation récente : désactivez les canaux correspondants ou interrompez la séance.
- N'appliquez pas de pression abdominale en cas de hernie ou de chirurgie abdominale récente : fermez les zones 3 et 4.

- N'utilisez pas la combinaison sur des prothèses externes, des pansements rigides ou des dispositifs susceptibles d'être comprimés contre la peau.
- Interrompez immédiatement la séance en cas de douleur, de fourmillements persistants, de vertige ou de toute sensation désagréable.

4.4 Évaluation préalable

Avant la première séance, réalisez l'anamnèse du client et consignez-la. L'annexe A de ce manuel comprend une fiche d'évaluation préalable et de consentement éclairé prête à imprimer. Revoyez le questionnaire à chaque nouvelle visite, car l'état de santé, les traitements et les circonstances personnelles peuvent avoir changé.

- Consignez les réponses du client et sa signature avant la première séance.
- Reprenez les points de risque à chaque visite ultérieure, même oralement.
- Conservez l'autorisation médicale écrite lorsque le cas l'exige.
- Notez dans le registre des séances de l'annexe B les paramètres appliqués et les incidents observés.

05 RÈGLES DE SÉCURITÉ

5.1 Sécurité électrique

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise reliée à la terre et dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique (220 – 230 V, 50/60 Hz).
- Ne démontez pas l'appareil et n'effectuez aucune opération non décrite dans ce manuel. Toutes les réparations relèvent du service technique agréé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ni avec les mains mouillées. Ne laissez pas tomber de liquide sur l'unité ni à l'intérieur.
- Ne modifiez pas et n'épissez pas les câbles. Ne placez pas l'appareil là où le câble d'alimentation peut être piétiné ou coincé.
- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'unité et n'obstruez pas les grilles de ventilation.
- Placez l'appareil sur une surface stable, sèche et de niveau, où il ne peut ni basculer ni tomber.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise à la fin de la journée.

DANGER

Retirez immédiatement la fiche de la prise électrique si l'une de ces situations se produit :

- L'appareil a été mouillé ou du liquide a pénétré à l'intérieur.
- L'appareil dégage une odeur de brûlé ou émet un bruit anormal.
- Le câble d'alimentation est cassé ou détérioré.
- Le boîtier présente des ruptures ou des dommages visibles.

5.2 Sécurité pendant l'utilisation

- Réalisez toujours l'évaluation préalable du client et écarter toutes les contre-indications de la section 4.
- Commencez toujours par le niveau de pression 1 et n'augmentez que si le client le tolère confortablement. Le traitement ne doit jamais être douloureux.
- Maintenez la communication avec le client pendant toute la séance et vérifiez régulièrement son confort.
- Ne laissez pas le client sans surveillance pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Assurez-vous que le client peut alerter à tout moment et que la combinaison peut être ouverte rapidement.
- Retirez bagues, montres, bracelets et objets rigides des zones couvertes par la combinaison.
- Ne faites pas fonctionner la combinaison à vide pendant des périodes prolongées.
- Arrêtez la séance en cas de gêne, de douleur, de vertige ou de sensation de pression excessive.

5.3 Hygiène

- Utilisez des sacs hygiéniques pour les jambes à chaque séance et avec chaque client.
- Utilisez un pantalon jetable en cellulose ou un vêtement équivalent sous la combinaison.

- Ouvrez la partie textile de la combinaison pour la nettoyer et la désinfecter après chaque utilisation.
- Remplacez le matériel jetable entre chaque client, sans exception.

5.4 Utilisation de la combinaison

- Ne forcez pas les fermetures et ne fermez pas la combinaison sur un client dont la taille ne correspond pas au réglage sélectionné.
- Ne tirez pas brusquement sur les tuyaux et ne les pliez pas excessivement : c'est le point le plus délicat de l'ensemble.
- Ne placez pas d'objets pointus, de boucles métalliques ni de cosmétiques en flacon rigide à l'intérieur de la combinaison.
- N'appliquez pas de cosmétiques directement sur le textile : utilisez toujours un vêtement ou un sac intermédiaire.
- Vérifiez avant chaque séance qu'aucune poche ne présente de coupure, de perforation ni de couture ouverte.

06 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

6.1 Unité principale

L'unité principale abrite le compresseur et l'électronique de commande. La face supérieure porte l'écran tactile couleur de 8 pouces, depuis lequel s'effectue toute la programmation, et la face avant inférieure le bouton lumineux de mise en marche. Son format de table permet de la placer près de la table de soins, sur un plan de travail ou sur une desserte.



FIGURE 01 Unité principale PRESOFIT PRO avec l'écran tactile de 8 pouces.



FIGURE 02 Vue latérale de l'unité : boîtier de table avec pieds antidérapants.

6.2 Écran de travail

L'écran de travail réunit en une seule vue tous les paramètres de la séance. La silhouette centrale représente la combinaison et ses canaux ; sur les côtés apparaissent les temps de gonflage de chaque canal, regroupés par zones ; et à droite, les sélecteurs de zone, de mode, de pression et de durée.

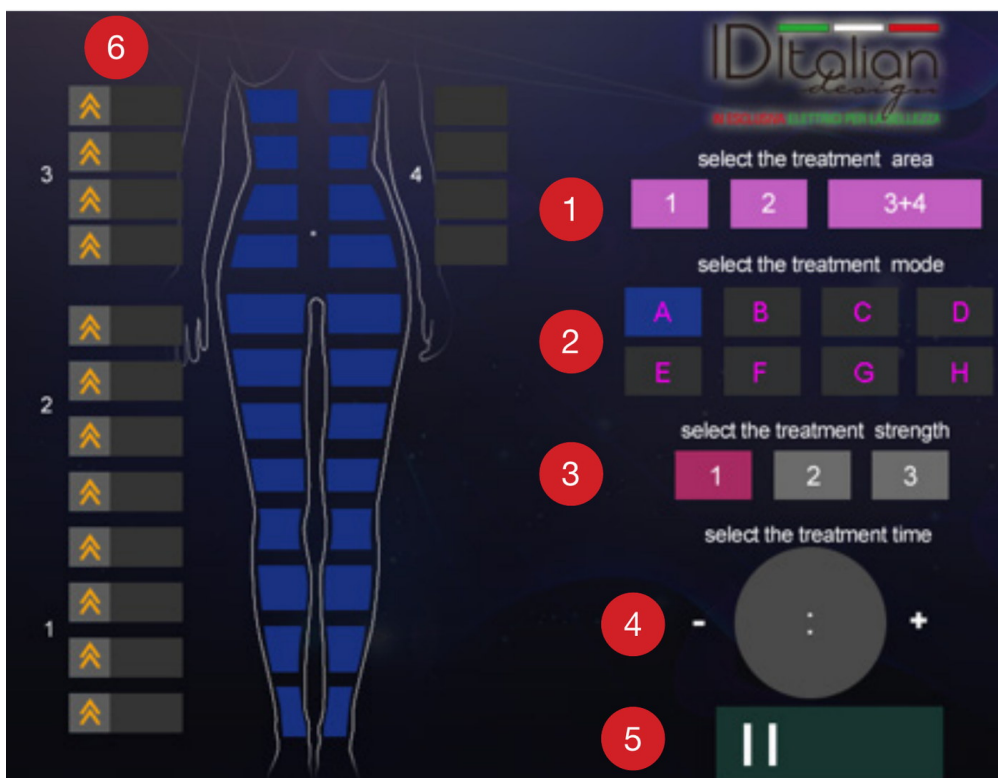


FIGURE 03 Écran de travail avec les zones de commande numérotées de 1 à 6.

- ① Sélection de la zone de traitement : accès directs de zone 1, 2 et 3+4
- ② Sélection du mode de travail, de A à H
- ③ Sélection de la force de pression : niveaux 1, 2 et 3
- ④ Réglage de la durée de séance, avec les signes moins et plus
- ⑤ Marche, pause et arrêt, avec indication visuelle de l'état
- ⑥ Temps de gonflage de chaque canal, regroupé par zones

6.3 Panneau arrière

Le panneau arrière comporte les deux connecteurs ronds multivoies auxquels se raccorde la combinaison, l'interrupteur général avec porte-fusible et la prise d'alimentation.

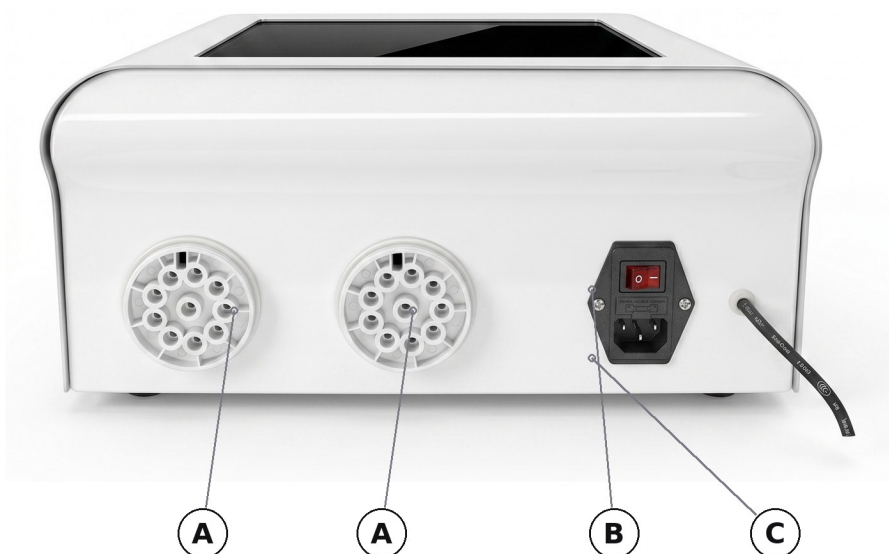


FIGURE 04 Panneau arrière : connecteurs d'air, interrupteur général et prise d'alimentation.

Ⓐ Connecteurs ronds multivoies pour les tuyaux de la combinaison

Ⓑ Interrupteur général de mise en marche et porte-fusible

Ⓒ Prise d'alimentation et câble secteur

6.4 Combinaison corporelle

La combinaison est un vêtement intégral d'une seule pièce couvrant les jambes, les fessiers, les hanches, l'abdomen et la taille. Elle intègre 32 poches d'air réparties sur 16 canaux, des fermetures latérales de taille, une fermeture centrale pour élargir la partie supérieure et des bandes textiles qui recouvrent tuyaux et connecteurs.



FIGURE 05 Combinaison corporelle avec ses éléments numérotés de 1 à 7.

① Fermeture latérale gauche de réglage de la largeur

② Fermeture latérale droite de réglage de la largeur

③ Fermeture centrale de réglage de la partie supérieure

④ Bande textile recouvrant les tuyaux du côté gauche

- 5

Bande textile recouvrant les tuyaux du côté droit
- 6

Faisceau de tuyaux d'air
- 7

Connecteurs ronds de raccordement à l'unité



FIGURE 06 Combinaison corporelle étendue, avec la sangle de maintien de la zone de taille.

Dimensions de la combinaison

Longueur totale approximative	140 cm
Zone supérieure longue	environ 60 cm
Zone supérieure courte	45 cm
Panneau central, largeur	33 cm
Panneau central, hauteur	31,5 / 58 cm
Zone inférieure longue	58,5 cm
Zone du pied, longueur	40 cm
Zone du pied, largeur	30 cm
Zone du pied, hauteur	26 cm
Système de tailles	3 tailles au moyen de fermetures latérales et d'un réglage central supérieur

Dimensions indicatives fournies par le fabricant. De légères variations entre unités sont possibles, s'agissant d'un vêtement textile confectionné.

6.5 Contenu de la livraison

- 1 unité principale PRESOFIT PRO avec écran tactile

• 1 combinaison corporelle réglable d'une seule pièce
- Jeu de tuyaux d'air

• 2 connecteurs ronds multivoies

• 1 câble d'alimentation

- 1 manuel d'instructions



FIGURE 07 Combinaison corporelle et housse textile de protection.



FIGURE 08 Faisceau de tuyaux et connecteurs ronds de la combinaison.

07 INSTALLATION ET RACCORDEMENT

7.1 Emplacement de l'appareil

- Placez l'unité sur une surface stable, sèche et de niveau, près de la table de soins et d'une prise reliée à la terre.
- Laissez un espace libre autour du boîtier pour la ventilation du compresseur.
- Acheminez les tuyaux sans tension, sans pliure serrée et hors des zones de passage.
- Évitez les environnements humides, la proximité de sources d'eau et l'exposition directe au soleil.
- Travaillez dans une pièce à température ambiante confortable et correctement ventilée.

7.2 Raccordement des tuyaux à l'unité

La combinaison est livrée avec tous les tuyaux déjà raccordés au vêtement ; à la mise en service, il suffit donc de raccorder les deux connecteurs ronds à l'unité principale.

- 1 Présentez le connecteur rond face à la prise correspondante du panneau arrière.
- 2 Faites coïncider l'orifice du connecteur avec l'ergot de la prise : c'est le guide de position qui assure un raccordement correct.
- 3 Insérez le connecteur en suivant ce guide, sans forcer.
- 4 Tournez l'écrou rond jusqu'à fixer l'ensemble. Il n'est pas nécessaire de serrer à fond pour obtenir un raccordement correct.
- 5 Répétez l'opération avec le second connecteur.

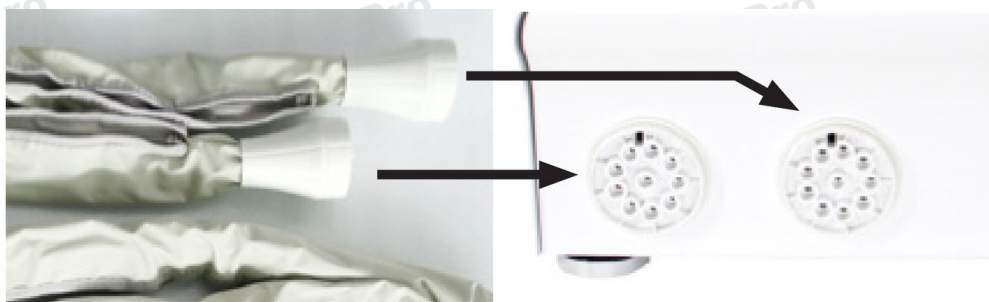


FIGURE 09 Raccordement des connecteurs ronds de la combinaison aux prises de l'unité.

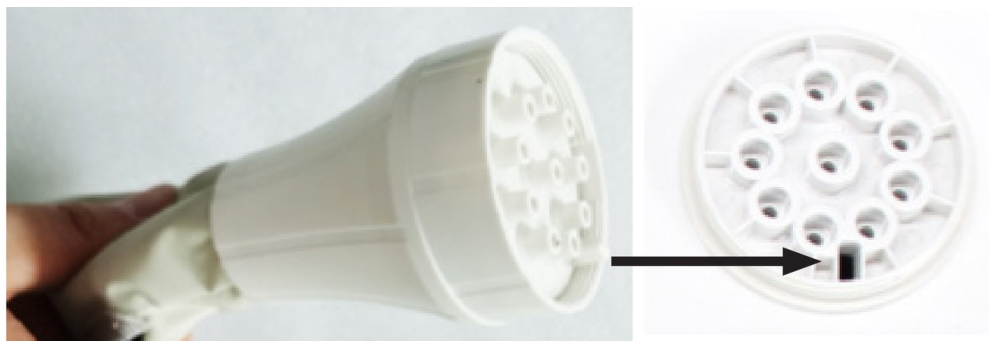


FIGURE 10 Guide de position : orifice du connecteur et ergot de la prise.



FIGURE 11 Fixation du connecteur en tournant l'écrou rond.

ATTENTION

Un connecteur mal raccordé ou un écrou non serré provoque des pertes d'air, un remplissage inégal des canaux et une séance sans la pression programmée. Vérifiez le raccordement des deux connecteurs avant chaque séance.

7.3 Réglage de la combinaison à la taille

La combinaison accepte trois tailles. Le réglage de la largeur s'effectue avec les bandes de fermeture latérales, qui comportent trois pièces de chaque côté ; si la partie supérieure nécessite plus d'aisance, la fermeture centrale peut être ouverte à moitié ou entièrement.

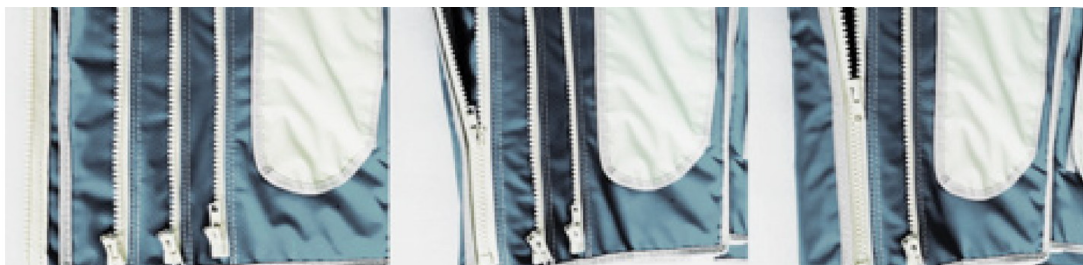


FIGURE 12 Bandes de fermeture latérales : trois positions de réglage de la largeur.



FIGURE 13 Ouverture de la fermeture centrale pour élargir la partie supérieure de la combinaison.



FIGURE 14 Détail de la fermeture centrale supérieure ouverte.



FIGURE 15 Intérieur de la combinaison et rabat de réglage de la zone supérieure.

- Sélectionnez la position de fermeture latérale correspondant au contour du client, la même des deux côtés.
- Si le réglage latéral ne suffit pas pour le haut du corps, ouvrez la fermeture centrale à moitié ou entièrement.
- Vérifiez que la combinaison est ajustée sans comprimer avant de lancer le remplissage : la main à plat doit pouvoir se glisser entre le vêtement et le corps.
- Les bandes textiles recouvrent tuyaux et connecteurs pour une finition plus nette pendant la séance et n'ont pas besoin d'être manipulées, sauf pour raccorder ou retirer les tuyaux.

7.4 Rangement de la combinaison

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le système de tuyaux peut être retiré et la combinaison pliée en deux parties pour gagner de la place.
- Rangez le vêtement sec, sans pliures forcées et à l'abri de la poussière et de la chaleur.
- Ne stockez pas la combinaison comprimée sous d'autres objets ni sur des surfaces à arêtes vives.
- Conservez l'emballage d'origine : c'est le meilleur support pour un transport sûr.

08 FONCTIONNEMENT

8.1 Mise en marche

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
- 2 Vérifiez que les deux connecteurs de la combinaison sont correctement raccordés et fixés.
- 3 Actionnez l'interrupteur général situé sur le panneau arrière.
- 4 Appuyez sur le bouton de mise en marche en façade de l'unité.
- 5 Attendez la fin de l'écran d'accueil et accédez à l'écran de travail.

8.2 Écran d'accueil et langue

Après la mise sous tension, l'écran d'accueil apparaît avec une barre de progression. La flèche de gauche donne ensuite accès à la sélection de la langue et la flèche de droite entre directement dans l'écran de travail. Le menu des langues propose l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, le portugais et le polonais. La langue sélectionnée est conservée pour les séances suivantes.

8.3 Sélection des zones de travail

L'écran comporte trois accès directs correspondant aux quatre zones dans lesquelles la combinaison est divisée, permettant d'activer ou de désactiver plusieurs canaux à la fois. Les zones 3 et 4 sont commandées ensemble par un accès unique. La configuration par défaut a toutes les zones activées.

ACCÈS DIRECT	ZONE DE LA COMBINAISON	UTILISATION HABITUELLE
1	Zone inférieure : jambes	Travail centré sur les jambes, le reste de la combinaison restant non rempli
2	Zone intermédiaire : cuisses, hanches et fessiers	Protocoles de modelage du bas du corps
3+4	Zone supérieure : abdomen et taille, côté gauche et droit	S'activent et se désactivent toujours ensemble

8.4 Numérotation des canaux

Pour expliquer l'ordre de gonflage, les canaux sont numérotés de 1 à 16 depuis le bas jusqu'au haut du corps. Les canaux de la zone supérieure travaillent par paires : le canal 9 agit en même temps que le 13, le 10 que le 14, le 11 que le 15 et le 12 que le 16. Pour cette raison, seules les positions 1 à 12 sont utilisées dans la programmation, et tout réglage effectué sur le canal 9 s'applique automatiquement au canal 13.

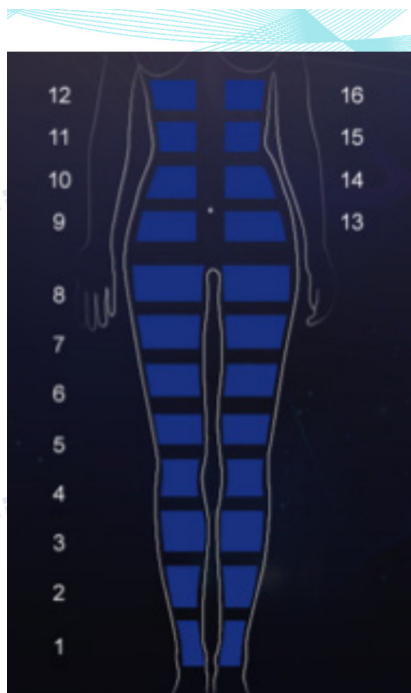


FIGURE 16 Numérotation des canaux de la combinaison, de 1 à 16, avec les paires de la zone supérieure.

NOTE

Les descriptions des modes de travail de la section 8.5 utilisent cette numérotation de 1 à 12. Gardez-la à l'esprit pour interpréter les séquences de gonflage.

8.5 Programmes de travail

L'appareil intègre 8 modes automatiques identifiés de A à H. Chaque mode définit une séquence différente de gonflage et de dégonflage des canaux. Pour changer de mode, il faut d'abord mettre le fonctionnement en pause. Le choix dépend du type de sensation de compression recherché, de la tolérance du client et de l'objectif esthétique de la séance.

Mode A • combiné, usage quotidien — parcourt les modes B à H en cycles successifs, en consacrant quelques minutes à chaque schéma. C'est l'option globale et polyvalente, adaptée aux protocoles généraux d'entretien esthétique, aux premières séances et aux clients qui préfèrent une expérience variée. Le temps de gonflage des canaux ne peut pas être modifié pendant le fonctionnement de ce mode.

Mode B • péristaltique doux — gonfle de 1 à 12, canal par canal, en séquence ascendante du bas vers le haut, et répète le cycle. Il procure un massage progressif et ordonné, sans forte accumulation de pression. Il convient aux séances d'entretien, au travail régulier et aux clients qui préfèrent une compression modérée.

Mode C · compression enchaînée — gonfle 1, puis 1+2, ensuite 2+3, 3+4 et ainsi de suite jusqu'à 11+12. La pression se déplace par paires de canaux et génère une sensation de poussée glissante, avec une perception claire de progression ascendante. C'est une option de travail esthétique continu sur les jambes, les fessiers et l'abdomen.

Mode D · accumulation et entraînement — gonfle 1, puis 1+2, ensuite 1+2+3 et 1+2+3+4 ; à partir de là il déplace le bloc de quatre canaux, 2+3+4+5, 3+4+5+6, 4+5+6+7, jusqu'à 9+10+11+12, puis répète. Il combine accumulation et entraînement, renforçant ainsi la sensation de compression progressive sur de larges zones de la combinaison tout en conservant une progression ordonnée.

Mode E · pression progressive ascendante — gonfle 1, puis 1+2, ensuite 1+2+3, et continue à cumuler les canaux jusqu'à compléter 1 à 12 avec toute la combinaison en charge. C'est le schéma de compression enveloppante le plus intense et celui dont la perception cumulative est la plus marquée sur le bas du corps et la zone abdominale.

Mode F · double parcours simultané — travaille deux séquences en même temps : une ligne 1+9, 2+10, 3+11, 4+12 et une autre 5+9, 6+10, 7+11, 8+12. Il répartit le travail sur deux parcours parallèles et produit un massage à haute fréquence orienté vers la relaxation corporelle générale. Il s'utilise habituellement dans les séances de confort et après la pratique sportive.

Mode G · double parcours à rythme élevé — suit le même schéma de deux parcours simultanés que le mode F, à un rythme élevé. Le fabricant le présente comme un programme dynamique pour les séances de repos corporel et pour un travail global moins localisé.

Mode H · compression globale — gonfle toute la combinaison en même temps, la dégonfle d'un bloc et répète le cycle. C'est le mode le plus uniforme et le plus direct, avec une perception très nette de pression conjointe sur les jambes, les fessiers, les hanches et l'abdomen. Il s'utilise habituellement en fin de séance, après d'autres modes, pour clore le protocole par une compression enveloppante.

NOTE

Les séquences décrites correspondent au manuel du fabricant du modèle ID MRTSE8. Si le fabricant met à jour à l'avenir le micrologiciel de l'écran, la correspondance entre lettre et schéma pourrait varier : comparez toujours la séquence observée en cabine avec ce tableau et signalez toute différence au distributeur.

8.6 Pression de travail

La force de pression se sélectionne à l'écran sur trois niveaux. Le niveau 1 est le réglage normal de travail et le point de départ recommandé pour tout nouveau client :

NIVEAU	PRESSIION	ÉQUIVALENCE	UTILISATION
1	75 mmHg · 10 kPa	0,1 bar	Niveau de départ et de travail habituel en cabine

NIVEAU	PRESSION	ÉQUIVALENCE	UTILISATION
2	150 mmHg · 20 kPa	0,2 bar	Clients qui tolèrent confortablement le niveau 1 et demandent plus d'intensité
3	225 mmHg · 30 kPa	0,3 bar	Intensité maximale, uniquement avec tolérance expresse et surveillance continue

ATTENTION

Augmentez toujours la pression progressivement et uniquement avec l'accord du client. Une pression supérieure à celle tolérée n'améliore pas le résultat esthétique et peut provoquer gêne, marques ou hématomes, en particulier chez les personnes présentant une fragilité capillaire.

8.7 Durée de séance

La durée de travail se règle à l'écran avec les signes moins et plus, et le maximum programmable est de 60 minutes. Le fabricant indique une plage de travail de 10 à 60 minutes. En mode A, le temps de gonflage des canaux ne peut pas être modifié pendant le fonctionnement. Une fois la durée programmée écoulée, l'appareil arrête le cycle et les poches se vident.

8.8 Temps de gonflage par canal

Chaque canal peut être gonflé pendant une durée propre, de 0 à 18 secondes. La valeur par défaut est de 10 secondes par canal et chaque appui augmente le réglage de 3 secondes, en parcourant la séquence 0, 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Les canaux de la partie supérieure droite et gauche du corps sont commandés ensemble depuis les quatre boutons situés à gauche de l'écran.

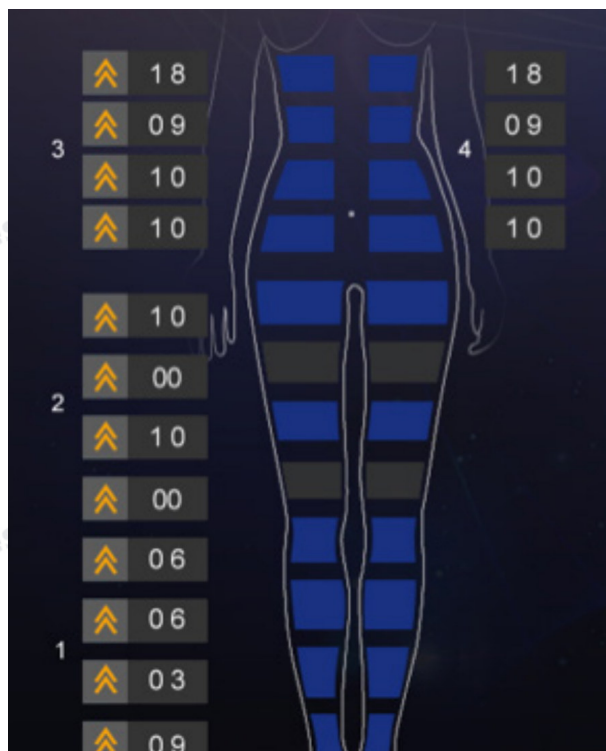


FIGURE 17 Réglage du temps de gonflage de chaque canal. Les canaux sur 00 restent fermés.

- Un temps de gonflage plus long produit une compression plus soutenue à ce point du parcours.
- Un temps plus court accélère le passage de la pression par ce canal et donne une sensation plus fluide.
- Si un canal est réglé sur **00**, ce canal est fermé et ne se remplit pas pendant la séance.
- La fermeture individuelle des canaux permet d'exclure un point précis sans renoncer au reste de la combinaison : c'est le réglage qui complète les accès directs de zone.
- Dans certains modes, le temps de gonflage ne peut pas être modifié pendant le cycle.

8.9 Marche, pause et fin de séance

- L'indicateur de l'écran montre l'état de fonctionnement : en marche, avec le signal clignotant et le minuteur qui décompte ; en pause, avec le signal fixe.
- Mettez le cycle en pause avant de changer de mode de travail.
- La pause conserve la configuration de la séance, qui peut donc être reprise sans reprogrammer.
- À la fin, arrêtez le cycle, attendez que les poches se vident complètement et ouvrez la combinaison une fois la séance arrêtée.
- N'ouvrez pas les fermetures lorsque les canaux sont en charge.

09 PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Séquence de travail recommandée pour une séance complète de pressothérapie esthétique en cabine :



FIGURE 18 Combinaison disposée sur la table de soins, prête à recevoir le client.

- 1 Consultez la fiche d'évaluation préalable du client et confirmez qu'aucune contre-indication ne s'applique.
- 2 Préparez la table de soins et étendez la combinaison ouverte, avec les tuyaux orientés vers le côté de l'unité.
- 3 Fournissez au client un pantalon jetable en cellulose ou un vêtement équivalent et des sacs hygiéniques pour les jambes.
- 4 Si le protocole le prévoit, appliquez la cosmétique drainante ou réductrice et réalisez le massage manuel préalable avant de mettre la combinaison en place.
- 5 Réglez la combinaison à la taille du client avec les fermetures latérales et, si nécessaire, avec la fermeture centrale.
- 6 Vérifiez que le vêtement est uniforme, sans plis marqués et sans comprimer en aucun point.
- 7 Sélectionnez à l'écran les zones de travail, le mode, le niveau de pression 1 et la durée de séance.

- 8 Lancez le cycle et confirmez la sensation avec le client pendant les premières minutes ; ajustez la pression ou les temps de gonflage si nécessaire.
- 9 Surveillez toute la séance et gardez le contact avec le client.
- 10 À la fin, arrêtez le cycle, attendez la vidange complète, ouvrez la combinaison et aidez le client à se relever calmement.
- 11 Retirez le matériel jetable, nettoyez et désinfectez la combinaison et notez la séance dans le registre de l'annexe B.

NOTE

Lorsque la pressothérapie s'intègre dans un traitement combiné, appliquez-la en fin de séance, après les autres méthodes employées.

9.1 Repères indicatifs par objectif esthétique

OBJECTIF DU PROTOCOLE	CONFIGURATION DE DÉPART	OBSERVATIONS
Première séance et évaluation de la tolérance	Mode A · pression 1 · 20 minutes	Permet de connaître la réponse du client à différents schémas avant de choisir un mode fixe
Entretien esthétique général	Mode B · pression 1 · 30 minutes	Compression modérée et continue, adaptée aux séances régulières
Modelage du bas du corps	Mode C ou D · pression 1 ou 2 · 30 à 40 minutes	Travail séquentiel marqué sur les jambes, les fessiers et l'abdomen
Sensation de jambes fatiguées	Mode B ou F · pression 1 · 25 à 30 minutes	Zones 1 et 2 actives ; la zone supérieure peut être fermée
Séance de confort et de repos	Mode F ou G · pression 1 · 20 à 30 minutes	Rythme élevé et perception enveloppante, indiquée après un effort physique
Clôture d'un protocole corporel	Mode H · pression 1 · 10 minutes	Compression globale pour terminer la séance

Repères indicatifs de cabine, et non des prescriptions. Le professionnel adapte le mode, la pression et la durée à chaque client, à sa tolérance et à l'ensemble du protocole esthétique.

10 MISE EN PLACE DE LA COMBINAISON

Une mise en place soignée de la combinaison détermine une bonne partie du résultat de la séance et du confort du client. Suivez cette séquence à chaque visite :

- 1 Étendez la combinaison entièrement ouverte sur la table, la zone des pieds orientée vers l'extrémité inférieure.
- 2 Confirmez que le client porte le pantalon jetable et les sacs hygiéniques.
- 3 Demandez au client de s'allonger sur la combinaison ouverte, les jambes centrées dans les jambières.
- 4 Fermez d'abord les jambières, puis la zone des hanches et des fessiers, et enfin l'abdomen et la taille.
- 5 Réglez les fermetures latérales à la taille adéquate, la même des deux côtés.
- 6 Si la partie supérieure est serrée, ouvrez la fermeture centrale à moitié ou entièrement.
- 7 Disposez le faisceau de tuyaux le long de la table, sans le faire passer sur le client et sans pliure serrée.
- 8 Vérifiez que les bandes textiles recouvrent tuyaux et connecteurs et que rien n'appuie contre la peau.
- 9 Vérifiez avec la main à plat que le vêtement est ajusté sans comprimer avant de lancer le cycle.

ATTENTION

La combinaison ne doit pas être fermée de force sur un client dont la taille dépasse le réglage disponible. Forcer les fermetures endommage le vêtement et compromet la sécurité et le confort de la séance.

NOTE

Un vêtement présentant des plis marqués répartit la pression de façon inégale. Consacrez quelques secondes à lisser le textile avant de démarrer : c'est le geste qui améliore le plus la perception du client.



FIGURE 19 PRESOFIT PRO installé en cabine, avec l'unité sur le plan de travail et la combinaison sur la table.

11 LES SÉANCES

À finalité esthétique, les séances de pressothérapie se situent habituellement entre 30 et 45 minutes, selon l'objectif de travail et la sensibilité de chaque client. Le minuteur de l'appareil permet de programmer jusqu'à 60 minutes, et le fabricant indique une plage de travail de 10 à 60 minutes.

Quant à la fréquence, le repère général en cabine est de 2 à 3 séances par semaine, un jour sur deux. Le nombre total de séances dépend de l'objectif esthétique fixé, du point de départ du client et de sa régularité ; il n'existe pas de nombre fixe applicable à tous les cas.

Les premières séances doivent être envisagées avec la pression 1 et une durée courte, afin d'évaluer la tolérance. Ensuite, le professionnel décide de maintenir les paramètres ou de les ajuster, toujours dans la plage de confort indiquée par le client lui-même.

Lorsque la pressothérapie est utilisée dans un traitement combiné, elle s'applique en fin de séance, après les autres méthodes employées. Les résultats sont variables et dépendent de facteurs individuels, du nombre de séances et des habitudes personnelles de chaque client.

12 PRÉCAUTIONS PENDANT LE TRAITEMENT

- 1 Commencez toujours au niveau de pression 1 et ajustez selon les sensations indiquées par le client, progressivement et du moins au plus.
- 2 Maintenez la communication avec le client tout au long de la séance et confirmez régulièrement son confort.
- 3 Ne laissez pas le client sans surveillance pendant le fonctionnement de l'appareil.
- 4 Désactivez les zones qui ne seront pas travaillées et fermez les canaux à exclure avant de lancer le cycle.
- 5 Mettez le fonctionnement en pause avant de changer de mode de travail.
- 6 Arrêtez la séance en cas de douleur, de fourmillements persistants, de vertige, de pâleur ou de toute sensation désagréable.
- 7 Utilisez des sacs hygiéniques et du matériel jetable à chaque séance et avec chaque client.
- 8 Ne laissez pas le client se relever avec la combinaison fermée ni avec les canaux en charge.
- 9 Proposez de l'eau à la fin et laissez quelques minutes de repos avant que le client ne se lève.

13 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

13.1 Nettoyage après chaque séance

- Arrêtez le cycle et débranchez l'appareil du secteur avant toute opération de nettoyage.
- Ouvrez la partie textile de la combinaison pour nettoyer et désinfecter l'intérieur juste après la fin de la séance.
- Nettoyez les surfaces de la combinaison avec un chiffon doux humecté d'eau ou d'un désinfectant non agressif, et séchez-les complètement avant de la ranger.
- N'immergez ni la combinaison ni aucun composant, et ne versez pas de liquide sur l'unité.
- Nettoyez le boîtier et l'écran avec un chiffon sec ou légèrement humide, sans produits abrasifs ni solvants.
- Retirez le matériel jetable utilisé et remplacez-le pour le client suivant.

13.2 Entretien des tuyaux et des connecteurs

- Manipulez le raccordement et les tuyaux avec douceur : ne tirez pas brusquement et ne les pliez pas excessivement.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fissures, d'écrasements et de fuites d'air.
- Contrôlez l'état des écrous de fixation et de l'ergot de guidage de chaque connecteur.
- Remplacez tout tuyau ou connecteur endommagé par une pièce d'origine.

13.3 Entretien périodique

- Vérifiez l'état des fermetures, des coutures et des sangles de la combinaison.
- Contrôlez le câble d'alimentation avant chaque journée de travail ; s'il est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- Maintenez les grilles de ventilation de l'unité dégagées et éliminez la poussière accumulée.
- Rangez l'appareil dans un environnement propre, sec et à l'abri d'une chaleur excessive.
- Le porte-fusible se trouve à côté de la prise d'alimentation du panneau arrière. Remplacez le fusible uniquement par un autre de mêmes caractéristiques et appareil débranché.
- Toute autre intervention relève exclusivement du service technique agréé.

ATTENTION

Les produits abrasifs, les solvants et l'alcool en concentration élevée détériorent le revêtement du textile et les soudures des poches. Utilisez uniquement des désinfectants compatibles avec ce type de matériel technique.

14 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Avant de contacter le service technique, vérifiez les points suivants :

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Câble mal branché ; interrupteur arrière éteint ; fusible grillé	Vérifiez le câble et la prise reliée à la terre, actionnez l'interrupteur arrière et remplacez le fusible par un identique, appareil débranché
L'écran s'allume mais il n'y a pas d'air	Cycle en pause ; toutes les zones désactivées ; durée de séance non programmée	Vérifiez l'indicateur de marche, activez les zones nécessaires et programmez la durée de travail
Un canal ne se gonfle pas	Temps du canal réglé sur 00 ; zone désactivée ; connecteur mal raccordé	Réglez le temps du canal au-dessus de 00, activez la zone correspondante et vérifiez le raccordement du connecteur
La pression semble faible	Niveau de pression 1 avec des temps de gonflage courts ; fuite sur un connecteur ou un tuyau	Augmentez le niveau de pression ou le temps de gonflage et vérifiez le raccordement des deux connecteurs et l'état des tuyaux
Le remplissage est inégal entre les côtés	Connecteur partiellement inséré ; tuyau écrasé ou plié	Retirez le connecteur, alignez-le avec l'ergot de guidage, réinsérez-le et serrez l'écrou ; supprimez les pliures des tuyaux
Impossible de changer de mode	Le cycle est en marche	Mettez le fonctionnement en pause puis sélectionnez le nouveau mode
Impossible de régler le temps de gonflage	Mode A en fonctionnement, ou autre mode n'acceptant pas le réglage en marche	Mettez le cycle en pause ou sélectionnez un mode qui autorise le réglage
Le client signale une pression excessive	Niveau de pression trop élevé ; combinaison réglée sur une taille insuffisante	Redescendez au niveau 1, mettez le cycle en pause et réajustez les fermetures latérales ou ouvrez la fermeture centrale
La combinaison perd de l'air	Poche perforée, couture ouverte ou tuyau endommagé	Suspendez l'utilisation, identifiez le point de fuite et demandez une pièce d'origine au service technique

DANGER

Si le problème persiste, ou en cas d'odeur de brûlé, de bruits anormaux, d'humidité à l'intérieur de l'appareil ou de dommages visibles, débranchez immédiatement l'unité du secteur et contactez le service technique. N'ouvrez pas le boîtier : toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel technique agréé.

15 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONFORMITÉ

Nom commercial	PRESOFIT PRO · exclusif de Sunmarket Wellness
Référence	IDMRTSE8
Modèle certifié	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Catégorie	Machines de pressothérapie professionnelle · appareils d'esthétique
Usage	Professionnel, en instituts de beauté
Canaux de travail	16
Poches d'air	32, avec chevauchement partiel entre poches adjacentes
Répartition des poches	16 poches de chaque côté du corps
Numérotation des canaux	1 à 16, avec les paires 9=13, 10=14, 11=15 et 12=16
Programmes	8 modes automatiques, de A à H
Pression de travail	75 – 225 mmHg, réglable sur 3 niveaux
Plages de pression	10 / 20 / 30 kPa · 0,1 / 0,2 / 0,3 bar
Accès directs de zone	3, correspondant aux zones 1, 2 et 3+4
Durée de séance	10 – 60 minutes
Temps de gonflage par canal	0 – 18 secondes, par paliers de 3 secondes
Temps par défaut par canal	10 secondes
Fermeture des canaux	En réglant le temps de gonflage du canal sur 00
Écran	Tactile couleur de 8 pouces
Langues de l'écran	Espagnol, anglais, allemand, français, italien, portugais et polonais
Sorties d'air	2 connecteurs ronds multivoies sur le panneau arrière
Combinaison	Corporelle intégrale, réglable en 3 tailles

Couverture de la combinaison	Jambes, fessiers, hanches, abdomen et taille
Bras	Non inclus · l'appareil n'accepte pas d'extension avec des bras
Longueur totale de la combinaison	environ 140 cm
Système de tailles	Fermetures latérales à 3 positions et fermeture centrale supérieure
Alimentation	220 – 230 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe énergétique	C
Protection électrique	Interrupteur général et porte-fusible sur le panneau arrière
Structure de l'unité	Connecteur pour tuyaux, poignée d'urgence, alimentation intégrée et interrupteur de mise en marche
Origine	Conçu en Italie · Fabriqué en Chine
Fabricant et importateur	PostQuam Cosmetic S.L.
Distributeur	Sunmarket Wellness S.L.U.

15.1 Conformité

L'appareil porte le marquage CE. PostQuam Cosmetic S.L. a établi la déclaration UE de conformité du produit IDMRTSE8, identifié comme IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS 8432729114645, qui couvre les directives et les normes harmonisées suivantes :

CE · Compatibilité électromagnétique	Directive 2014/30/UE
Normes appliquées · CEM	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Basse tension	Directive 2014/35/UE
Normes appliquées · Basse tension	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Directive 2011/65/UE

Normes appliquées · RoHS

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC
62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC
62321-8:2017

NOTE

La déclaration UE de conformité originale, signée par le fabricant, est disponible auprès du distributeur. Indiquez la référence IDMRTSE8 lors de la demande. L'appareil n'est pas un dispositif médical et son marquage CE ne couvre aucune finalité médicale.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce manuel, ainsi que les caractéristiques et les composants du produit, sans préavis. Certains composants peuvent différer des images présentées.

16 GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE

L'appareil est fourni avec la garantie commerciale du distributeur. L'unité principale et l'ensemble textile ont des durées différentes, car la combinaison est soumise à une usure propre à l'utilisation continue en cabine.

16.1 Portée et durées

ÉLÉMENT	DURÉE	OBSERVATIONS
Unité principale : électronique de commande, compresseur, écran et structure	2 ans	À compter de la date de la facture d'achat
Combinaison corporelle et poches d'air	1 an	Vêtement soumis à l'usure due à l'utilisation en cabine
Tuyaux d'air et connecteurs	1 an	Remplacement par pièce d'origine
Fermetures, sangles et bandes textiles	Non couverts	Éléments d'usure et de remplacement périodique
Matériel jetable et hygiénique	Non couvert	Consommable renouvelé à chaque séance

La durée court à compter de la date de la facture d'achat et couvre l'acheteur professionnel qui y figure. Cette garantie commerciale s'entend sans préjudice des droits reconnus à l'acheteur par la réglementation applicable.

16.2 Ce qui est couvert

- Défauts de fabrication et de matériaux empêchant le fonctionnement normal de l'appareil.
- Défaillances de l'électronique de commande, du compresseur et de l'écran dans le délai indiqué.
- Fuites d'air dans les tuyaux, les connecteurs et les poches imputables à un défaut d'origine.
- Main-d'œuvre et pièces de rechange d'origine nécessaires à la réparation.
- Diagnostic préalable et assistance téléphonique du service technique.

16.3 Ce qui n'est pas couvert

- L'usure normale de la combinaison, des fermetures et des sangles de maintien.
- Ruptures, coupures, perforations ou brûlures du matériau textile survenues pendant l'utilisation.
- Dommages dus à une tension de réseau différente de celle indiquée sur la plaque signalétique ou à des installations sans mise à la terre.
- Dommages dus à des chocs, des chutes, un transport inadapté ou un stockage en milieu humide.
- Dommages dus à des liquides, des cosmétiques ou des désinfectants renversés sur l'unité ou introduits dans la combinaison.

- Pannes provoquées par une manipulation, un démontage ou une réparation effectuée par du personnel non agréé.
- Utilisation de l'appareil avec des accessoires ou des pièces qui ne sont pas d'origine.
- Usage non professionnel, usage contraire à ce manuel ou non-respect des contre-indications et des repères de durée et de pression.
- Travaux de nettoyage et d'entretien périodique décrits à la section 13.
- Dommages esthétiques n'affectant pas le fonctionnement de l'appareil.

ATTENTION

L'ouverture du boîtier, le remplacement de composants internes ou toute intervention réalisée par du personnel non agréé annulent immédiatement la garantie. Le remplacement du fusible et les tâches de nettoyage décrites à la section 13 sont les seules opérations qui incombent à l'utilisateur.

16.4 Comment déclarer un incident

- 1 Arrêtez l'appareil, débranchez-le du secteur et cessez de l'utiliser.
- 2 Consultez d'abord la section 14 : une bonne partie des incidents se résolvent en vérifiant le raccordement des connecteurs, l'activation de la zone à l'écran ou le temps de gonflage du canal.
- 3 Rassemblez le numéro de série de la plaque signalétique ainsi que la date et le numéro de la facture d'achat.
- 4 Décrivez la panne avec le plus de détails possible : mode de travail, niveau de pression, moment d'apparition et comportement observé.
- 5 Joignez des photographies ou une courte vidéo du problème et de la plaque signalétique.
- 6 Contactez le service technique du distributeur par téléphone, courriel ou WhatsApp.
- 7 Conservez l'emballage d'origine ou un équivalent : il est indispensable pour un transport sûr si l'unité doit être récupérée.
- 8 N'expédiez pas l'appareil sans avoir convenu au préalable de l'enlèvement avec le service technique.

16.5 Services du distributeur

Sunmarket Wellness dispose de son propre service technique avec des pièces d'origine et accompagne le centre pendant toute la durée de vie de l'appareil :

- Assistance téléphonique et par WhatsApp pour les questions d'utilisation et de mise en place de la combinaison.
- Formation à l'utilisation de l'appareil, par téléphone ou dans les locaux du distributeur, sur demande.
- Conseil pour la mise en service de l'appareil dans le centre.
- Pièces d'origine pour la combinaison, les tuyaux et les connecteurs.
- Mises à jour de cette documentation.

16.6 Données de votre appareil

Notez ici les données de votre appareil dès sa réception. La plaque signalétique se trouve sur l'unité principale, et le numéro de série est la première donnée demandée par le service technique.

Numéro de série	
Date d'achat	
Numéro de facture	
Distributeur	
Contact du service technique	

17 FIN DE VIE ET RECYCLAGE

En fin de vie, l'appareil et ses accessoires doivent être éliminés séparément des autres déchets.

17.1 Unité principale

- Ne déposez pas l'unité dans le conteneur de déchets ménagers ni dans celui des déchets commerciaux généraux.
- Remettez-la à un point de collecte agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, ou au distributeur lors de l'achat d'un appareil équivalent.
- Débranchez et retirez le câble d'alimentation avant la remise.
- La collecte séparée permet de récupérer les matériaux valorisables et évite que les composants électroniques ne rejoignent le flux général des déchets.

17.2 Combinaison, emballage et accessoires

- Séparez le carton de l'emballage et déposez-le dans le conteneur papier et carton.
- Déposez les plastiques de protection dans le conteneur correspondant.
- La combinaison, les tuyaux et les connecteurs hors d'usage sont gérés comme des déchets non recyclables, sauf indication contraire de la réglementation locale.
- Le matériel hygiénique jetable est éliminé avec les déchets généraux du centre, selon son protocole interne.

NOTE

Consultez toujours les règles de collecte en vigueur dans votre commune : le classement et les points de dépôt peuvent varier.

A ANNEXE A · FICHE D'ÉVALUATION PRÉALABLE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Cette annexe réunit en un seul document imprimable l'évaluation préalable de la personne utilisatrice et son consentement éclairé pour les séances de pressothérapie esthétique. Remplissez et signez un exemplaire avant la première séance et revoyez le questionnaire à chaque nouvelle visite.

NOTE

Modèle indicatif. Adaptez-le aux données et aux procédures de votre centre et faites-le relire par votre conseil juridique avant de l'utiliser : Sunmarket Wellness ne fournit pas de conseil juridique et la responsabilité du document finalement utilisé incombe au centre.

DONNÉES DU CENTRE ET DE LA PERSONNE UTILISATRICE

Centre _____ Professionnel _____

Nom et prénoms _____

Pièce d'identité _____ Date de naissance _____

Téléphone _____ Courriel _____

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Cochez la case correspondante. Les informations fournies servent uniquement à évaluer l'adéquation de la séance esthétique.

BLOC A · SITUATIONS QUI EMPÊCHENT LA SÉANCE	OUI	NON
Grossesse ou suspicion de grossesse	☐	☐
Thrombose veineuse profonde, thrombophlébite ou phlébothrombose récentes	☐	☐
Stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre dispositif électronique implanté	☐	☐
Épilepsie	☐	☐
Insuffisance cardiaque	☐	☐
Insuffisance respiratoire ou rénale importante	☐	☐
Processus oncologique actif	☐	☐
Fièvre, infection active ou inflammation aiguë	☐	☐
Infection cutanée, plaie ouverte, brûlure ou dermatite sur la zone de travail	☐	☐
Lymphangite	☐	☐

BLOC A · SITUATIONS QUI EMPÊCHENT LA SÉANCE	OUI	NON
Varices importantes ou tortueuses	☐	☐
Tension artérielle non contrôlée	☐	☐
Problème circulatoire non évalué par un professionnel de santé	☐	☐
Personne de moins de 18 ans	☐	☐

DANGER

Une seule réponse affirmative dans le bloc A empêche la réalisation de la séance. N'appliquez pas le traitement tant que la situation persiste et orientez la personne utilisatrice vers son professionnel de santé.

BLOC B · SITUATIONS EXIGEANT UNE ÉVALUATION INDIVIDUELLE	OUI	NON
Traitement médical en cours ou processus diagnostique ouvert	☐	☐
Diabète avec neuropathie ou altération de la sensibilité	☐	☐
Altération de la sensibilité cutanée	☐	☐
Peau très fine, hypersensible ou fragilité capillaire importante	☐	☐
Chirurgie récente sans autorisation médicale définitive	☐	☐
Hernie abdominale ou inguinale	☐	☐
Tension artérielle basse	☐	☐
Menstruations, si un travail abdominal est prévu	☐	☐
Âge avancé avec pathologie circulatoire associée	☐	☐
Tendance aux hématomes ou à marquer facilement	☐	☐

Une réponse affirmative dans le bloc B n'empêche pas nécessairement la séance, mais elle exige une évaluation individuelle, le niveau de pression 1, des durées réduites, une surveillance continue et, le cas échéant, une autorisation médicale écrite préalable.

CONFIGURATION PRÉVUE DE LA SÉANCE

- ☐ Zone 1 · jambes
- ☐ Zone 2 · cuisses, hanches et fessiers
- ☐ Zones 3 et 4 · abdomen et taille
- ☐ Canaux exclus, le cas échéant :
- ☐ Mode de travail et niveau de pression prévus :

DÉCLARATION ET CONSENTEMENT

La personne utilisatrice déclare et accepte ce qui suit :

1. Elle a été informée que le traitement a une finalité exclusivement esthétique et de bien-être, qu'il ne constitue pas un acte médical et qu'il ne remplace aucune évaluation, aucun diagnostic ni aucun traitement médical.
2. Il lui a été expliqué en quoi consiste la pressothérapie esthétique et quelle est la sensation normale pendant la séance : une compression progressive et rythmée des poches d'air sur les zones couvertes par la combinaison.
3. Elle a été informée que des réactions transitoires peuvent apparaître, telles qu'une légère rougeur, des marques du textile ou des coutures de la combinaison et une sensation de légèreté ou de fatigue à la fin.
4. Elle déclare que les informations fournies dans le questionnaire sont exactes et complètes et qu'elle n'a omis aucune circonstance pertinente pour sa sécurité.
5. Elle s'engage à signaler tout changement dans son état de santé, son traitement ou sa médication avant chaque nouvelle séance.
6. Elle s'engage à signaler immédiatement au professionnel toute douleur, gêne, sensation de pression excessive ou toute autre sensation désagréable pendant la séance.
7. Elle comprend que les résultats sont variables, qu'ils dépendent de facteurs individuels, du nombre de séances et des habitudes personnelles, et qu'aucun résultat concret ni aucune réduction de mensurations ne lui a été garanti.
8. Elle a eu la possibilité de poser des questions et a reçu une réponse à toutes avant de signer.
9. Elle consent librement à l'application du traitement et sait qu'elle peut révoquer son consentement à tout moment, sans avoir à le justifier et sans que cela affecte sa relation avec le centre.
10. En cas de doute sur son état de santé, elle s'engage à fournir une autorisation médicale écrite préalable avant de recevoir la séance.

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Responsable du traitement des données : le centre indiqué en en-tête. Finalité : gérer la prestation du service esthétique, évaluer l'adéquation des séances et tenir l'historique des traitements. Base juridique : le consentement de la personne utilisatrice et l'exécution de la relation de service. Conservation : pendant la relation avec le centre puis, ensuite, pendant les délais légalement exigibles. Destinataires : aucune donnée n'est cédée à des tiers sauf obligation légale. Droits : accès, rectification, effacement, limitation, opposition et portabilité, en écrivant au centre ; il est également possible d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Signature de la personne utilisatrice

Signature du professionnel

Date

B ANNEXE B · REGISTRE DES SÉANCES

Enregistrez chaque séance dès qu'elle se termine. L'historique permet d'ajuster les paramètres de la visite suivante, atteste du suivi réalisé et documente tout incident.

Nom et prénoms

Centre

Professionnel

[illegible]

Conservez ce registre avec la fiche d'évaluation préalable de chaque personne utilisatrice et mettez-le à jour à chaque visite.

C ANNEXE C · GUIDE RAPIDE DE CABINE

Résumé opérationnel à garder près de l'appareil. Il ne remplace pas la lecture intégrale du manuel.

Avant de commencer	Fiche d'évaluation préalable signée et revue · sacs hygiéniques et pantalon jetable pour chaque personne
Montage	Deux connecteurs ronds raccordés avec le guide de position et l'écrou serré
Démarrage	Câble sur prise reliée à la terre · interrupteur arrière · bouton de mise en marche · écran de travail
Zones	Accès directs 1, 2 et 3+4 · les zones 3 et 4 s'activent toujours ensemble
Canaux	Numérotation 1 à 12 à l'écran · 9=13, 10=14, 11=15 et 12=16 · un canal sur 00 est fermé
Modes	A combiné · B canal par canal · C par paires · D accumulation et entraînement · E accumulation totale · F et G double parcours · H tout à la fois
Pression	Niveau 1 : 75 mmHg · niveau 2 : 150 mmHg · niveau 3 : 225 mmHg · toujours commencer par le 1
Durées	Séance de 10 à 60 minutes · gonflage par canal de 0 à 18 secondes par paliers de 3 · valeur par défaut 10 secondes
Changement de mode	Mettre le cycle en pause avant de sélectionner un autre mode
Pendant la séance	Communication constante · jamais sans surveillance · arrêter à la moindre gêne
Séance complète	30 à 45 minutes habituellement · 2 ou 3 séances par semaine, un jour sur deux
À la fin	Arrêter le cycle · attendre la vidange complète · ouvrir la combinaison · nettoyer et désinfecter
Fusible	À côté de la prise d'alimentation arrière · remplacer uniquement par un autre de mêmes caractéristiques et appareil débranché

DANGER

En cas d'odeur de brûlé, de bruits anormaux, d'humidité dans l'appareil ou de dommages visibles : arrêtez le cycle, débranchez l'appareil du secteur et contactez le service technique. N'ouvrez pas le boîtier.

D INDEX DES FIGURES

01	Unité principale PRESOFIT PRO avec l'écran tactile de 8 pouces.	12
02	Vue latérale de l'unité : boîtier de table avec pieds antidérapants.	12
03	Écran de travail avec les zones de commande numérotées de 1 à 6.	13
04	Panneau arrière : connecteurs d'air, interrupteur général et prise d'alimentation.	14
05	Combinaison corporelle avec ses éléments numérotés de 1 à 7.	14
06	Combinaison corporelle étendue, avec la sangle de maintien de la zone de taille.	15
07	Combinaison corporelle et housse textile de protection.	16
08	Faisceau de tuyaux et connecteurs ronds de la combinaison.	16
09	Raccordement des connecteurs ronds de la combinaison aux prises de l'unité.	17
10	Guide de position : orifice du connecteur et ergot de la prise.	18
11	Fixation du connecteur en tournant l'écrou rond.	18
12	Bandes de fermeture latérales : trois positions de réglage de la largeur.	19
13	Ouverture de la fermeture centrale pour élargir la partie supérieure de la combinaison.	19
14	Détail de la fermeture centrale supérieure ouverte.	20
15	Intérieur de la combinaison et rabat de réglage de la zone supérieure.	20
16	Numérotation des canaux de la combinaison, de 1 à 16, avec les paires de la zone supérieure.	22
17	Réglage du temps de gonflage de chaque canal. Les canaux sur 00 restent fermés.	25
18	Combinaison disposée sur la table de soins, prête à recevoir le client.	26
19	PRESOFIT PRO installé en cabine, avec l'unité sur le plan de travail et la combinaison sur la table.	29

PresoFit **Pro**

PRESOFIT PRO · IDMRTSE8

Appareil professionnel de pressothérapie pour l'esthétique et le bien-être. Réservé au personnel formé.

D I S T R I B U T E U R

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Tous droits réservés.