

PRESOFIT PRO

Professionelles Pressotherapiegerät mit verstellbarem Körperanzug: 16 Kanäle, 32 Luftkammern und 8 Arbeitsprogramme — Zertifiziertes Modell IDMRTSE8



Sequenzielle Pressotherapie

16 Arbeitskanäle und 32 Luftkammern mit teilweiser Überlappung benachbarter Kammern

8 automatische Programme

Modi A bis H mit unterschiedlichen Aufblas- und Entlüftungssequenzen

Regelbarer Druck

Drei Arbeitsstufen von 75 bis 225 mmHg und Sitzungen bis 60 Minuten

Verstellbarer Körperanzug

Beine, Gesäß, Hüften, Bauch und Taille, mit 3-Größen-System

Inhalt

PRESOFIT PRO · Bedienungsanleitung

01	Allgemeine Informationen	03
02	Funktionsprinzipien	05
03	Kosmetische Anwendungen	07
04	Gegenanzeigen	08
05	Sicherheitsvorschriften	10
06	Beschreibung des Geräts	12
07	Aufstellung und Anschluss	17
08	Betrieb	21
09	Behandlungsprotokoll	26
10	Anlegen des Anzugs beim Kunden	28
11	Die Sitzungen	30
12	Vorsichtsmaßnahmen während der Behandlung	31
13	Reinigung und Wartung	32
14	Störungsbehebung	33
15	Technische Daten und Konformität	35
16	Garantie und technischer Kundendienst	38
17	Entsorgung und Recycling	41
A	Formular zur vorherigen Beurteilung und Einwilligungserklärung	42
B	Sitzungsprotokoll	45
C	Kurzanleitung für die Kabine	46
D	Abbildungsverzeichnis	47

01 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PRESOFIT PRO ist der exklusive Handelsname von Sunmarket Wellness für das professionelle Pressotherapiegerät mit der Referenz ID MRTSE8. Es handelt sich um ein System der sequenziellen pneumatischen Kompression, bestehend aus einer Steuereinheit mit Touchscreen und einem verstellbaren Körperanzug, der Beine, Gesäß, Hüften, Bauch und Taille abdeckt. Das Gerät arbeitet mit 16 Kanälen und 32 Luftkammern, enthält 8 automatische Programme und erlaubt die Einstellung des Arbeitsdrucks in drei Stufen zwischen 75 und 225 mmHg.

1.1 Beschreibung des Geräts

Das Set besteht aus einer Tischeinheit und einem Körperanzug, der über zwei Mehrwege-Schlauchbündel mit ihr verbunden ist. Die Einheit steuert das Füllen und Entleeren der Luftkammern des Anzugs entsprechend dem Programm, dem Druck und den Zeiten, die die Fachkraft am Bildschirm einstellt:

- **Steuereinheit:** Tischgehäuse mit 8-Zoll-Farb-Touchscreen, integriertem Kompressor, zwei runden Luftanschlüssen, Hauptschalter und Netzanschluss auf der Rückseite.
- **Körperanzug:** einteiliges Ganzkörperteil mit 32 Luftkammern, verteilt auf 16 Arbeitskanäle, verstellbar auf 3 Größen über seitliche Reißverschlüsse und einen mittleren oberen Reißverschluss.
- **Programmierung:** 8 automatische Modi von A bis H, drei Druckstufen, einstellbare Sitzungsdauer und unabhängige Einstellung der Aufblaszeit jedes Kanals.
- **Zonensteuerung:** drei Direktzugriffe, die Kanalgruppen aktivieren oder deaktivieren, sowie das einzelne Schließen jedes beliebigen Kanals.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Anwender

Das Gerät ist für den professionellen Einsatz in der Kabine bestimmt, in Kosmetikinstituten, Spas und Wellnesszentren. Es darf ausschließlich von Personal mit spezifischer technischer Ausbildung und nach vollständiger Lektüre dieser Anleitung verwendet werden. PRESOFIT PRO dient ausschließlich kosmetischen und Wohlfühlzwecken: Es ist kein Medizinprodukt und weder zur Vorbeugung, Diagnose noch Behandlung irgendeiner Erkrankung bestimmt, ebenso wenig zum Eingriff bei Kreislaufstörungen, Lymphödemen oder anderen medizinischen Zuständen.

HINWEIS

Dieses Gerät ersetzt nicht die Beurteilung durch eine medizinische Fachperson. Bei jeder Erkrankung, laufenden medizinischen Behandlung oder Zweifeln an der Eignung der Sitzung ist vorab eine schriftliche ärztliche Freigabe einzuholen, bevor die Behandlung angewendet wird. Sunmarket Wellness übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts durch Personen ohne die erforderliche Qualifikation.

1.3 Produktidentifikation

Geben Sie diese Angaben stets an, wenn Sie Ersatzteile, technische Unterstützung oder Konformitätsunterlagen anfordern:

Handelsname	PRESOFIT PRO · exklusiver Handelsname von Sunmarket Wellness
Referenz	IDMRTSE8
Zertifiziertes Modell	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Kategorie	Professionelle Pressotherapiegeräte · Kosmetikapparate
Hersteller und Importeur	PostQuam Cosmetic S.L. · Ctra. Burgos-Portugal km 115, 47270 Cigales (Valladolid), Spanien
Herkunft	Entworfen in Italien · Hergestellt in China
Vertrieb	Sunmarket Wellness S.L.U. · Valencia, Spanien · www.sunmarket.es

1.4 In dieser Anleitung verwendete Symbole

Im gesamten Dokument werden drei Warnstufen verwendet. Beachten Sie sie jederzeit:

SYMBOL	BEDEUTUNG
GEFAHR	Gefahr für die Sicherheit von Personen oder schwerer Geräteschaden. Nichtbeachtung kann Verletzungen verursachen.
ACHTUNG	Situation, die das Behandlungsergebnis oder die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen kann.
HINWEIS	Ergänzende Information oder Empfehlung zur guten Praxis.

02 FUNKTIONSPRINZIPIEN

2.1 Die kosmetische Pressotherapie

Die Pressotherapie ist eine professionelle kosmetische Technik auf Basis kontrollierter pneumatischer Kompression. Der Anzug umschließt den Körper, und die Einheit regelt das Aufblasen und Entlüften der Luftkammern in programmierten Zyklen, sodass der Druck den behandelten Bereich geordnet durchläuft.

Das Ergebnis ist eine rhythmische, reproduzierbare mechanische Massage, deren Intensität, Verlauf und Rhythmus am Bildschirm eingestellt werden. In der Kabine wird sie als Technologie für Körperkomfort und als Unterstützung kosmetischer Protokolle zur Körperformung, zur optischen Verbesserung des Hautbildes und für ein Gefühl der Erholung in den Beinen eingesetzt.

2.2 Sequenzielle Kompression über Kanäle

Der Anzug verteilt 32 Luftkammern auf 16 Arbeitskanäle, 16 Kammern auf jeder Körperseite. Jeder Kanal füllt und entleert sich unabhängig, und das gewählte Programm bestimmt die Reihenfolge: Kanal für Kanal in aufsteigender Folge, in verketteten Paaren, durch Aufsummieren aufeinanderfolgender Kanäle, in zwei gleichzeitigen Verläufen oder im gesamten Anzug gleichzeitig.

Diese Architektur erlaubt es der Fachkraft, das Empfinden der Sitzung ohne Zubehörwechsel zu modulieren: Derselbe Anzug kann eine sanfte, progressive Massage oder eine umhüllende, deutlichere Kompression bieten, allein über Modus, Druck und Aufblaszeiten.

2.3 Überlappung benachbarter Kammern

Jede Luftkammer überlappt teilweise die angrenzende Kammer. Diese Überlappung vermeidet druckfreie Zonen zwischen aufeinanderfolgenden Kanälen und macht den Übergang von einer Kammer zur nächsten kontinuierlich statt stufenförmig. Während der Sitzung entsteht der Eindruck einer progressiven, gleichmäßigen Kompression, die sich besser an die Körperkontur anpasst.

HINWEIS

Die Überlappung der Kammern ist ein konstruktives Merkmal des Anzugs und erfordert keinerlei Einstellung durch die Fachkraft.

2.4 Wirkungen in der Kabine

- **Körperformung:** Die sequenzielle Kompression wird als Ergänzung in kosmetische Körperprotokolle zur Formung und Umfangsreduzierung eingebunden.
- **Hautbild:** Unterstützung bei Behandlungen zur optischen Verbesserung des Erscheinungsbildes von Cellulite und Orangenhaut.
- **Gefühl der Leichtigkeit:** hilft, das Schweregefühl in den Beinen zu verringern, im Rahmen eines kosmetischen Wohlfühlansatzes.
- **Komfort und Erholung:** Die rhythmische Massage vermittelt ein Erlebnis körperlicher Entspannung, besonders mit den hochfrequenten Modi und dem Modus der Gesamtkompression.

- **Synergie mit der Kabinenkosmetik:** Die Sitzung kann innerhalb des Protokolls mit drainierender oder reduzierender Kosmetik und mit Kältewickeln kombiniert werden, stets im Rahmen einer kosmetischen Behandlung.

03 KOSMETISCHE ANWENDUNGEN

PRESOFIT PRO wurde für den Einsatz in der Kabine mit ausschließlich kosmetischer und Wohlfühlzielsetzung entwickelt. Die üblichen Anwendungen sind:

- Kosmetische Körperprotokolle für Wohlbefinden und Komfort
- Ergänzung in Programmen zur Körperformung
- Unterstützung bei Behandlungen zur optischen Verbesserung des Cellulite-Erscheinungsbildes
- Kosmetische Arbeit am Gefühl von Wassereinlagerungen, aus kosmetischer Sicht
- Gefühl müder und schwerer Beine am Ende des Tages
- Sitzungen zur körperlichen Erholung nach körperlicher Anstrengung oder langen Arbeitstagen
- Vorbereitung und Abschluss anderer Körperbehandlungen in der Kabine
- Ergänzung von Protokollen mit drainierender oder reduzierender Kosmetik

3.1 Arbeitszonen des Anzugs

- Beine
- Gesäß
- Hüften
- Bauch
- Taille
- Vollständige Arbeit am Unterkörper mit Ganzkörperanzug

HINWEIS

Der Anzug umfasst keine Arme, und das Gerät lässt keine Erweiterung mit Armmodulen zu. Alle beschriebenen Anwendungen beziehen sich auf den Unterkörper sowie den Bauch- und Tailenbereich.

GEFAHR

Die Pressotherapie dieses Geräts darf ausschließlich aus kosmetischer Sicht beschrieben und eingesetzt werden. Sie ist nicht zur Behandlung von Erkrankungen, Kreislauferkrankungen, Lymphödemen oder anderen medizinischen Zuständen bestimmt und darf dem Kunden weder in der Kabine noch in irgendeinem Kommunikationsmaterial des Instituts so dargestellt werden.

04 GEGENANZEIGEN

GEFAHR

Wenden Sie die Behandlung bei keiner Person an, auf die einer der folgenden Fälle zutrifft. Im geringsten Zweifel verlangen Sie vor der ersten Sitzung einen ärztlichen Bericht oder eine schriftliche ärztliche Freigabe.

4.1 Absolute Gegenanzeigen

- Schwangerschaft oder Verdacht auf Schwangerschaft
- Kürzlich aufgetretene tiefe Venenthrombose, Thrombophlebitis oder Phlebothrombose
- Aktive Infektionsprozesse
- Hautinfektionen, offene Wunden, Verbrennungen oder Dermatitis im Arbeitsbereich
- Herzinsuffizienz
- Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen implantierten elektronischen Geräten
- Epilepsie
- Aktive onkologische Prozesse, außer bei ausdrücklicher ärztlicher Indikation
- Akute Entzündungen und fieberhafte Zustände
- Ausgeprägte oder geschlängelte Krampfadern
- Lymphangitis
- Erhebliche Atem- oder Niereninsuffizienz
- Nicht eingestellte Blutdruckstörungen
- Jedes Kreislaufproblem, das nicht zuvor von einer medizinischen Fachperson beurteilt wurde

4.2 Relative Gegenanzeigen

Sie erfordern eine individuelle Beurteilung und gegebenenfalls eine vorherige ärztliche Freigabe. Arbeiten Sie mit der niedrigsten Druckstufe, kurzen Zeiten und ständiger Überwachung:

- Personen in medizinischer Behandlung oder in einem Diagnoseprozess
- Diabetes mit Neuropathie oder Sensibilitätsstörungen
- Störungen der Hautsensibilität
- Bauch- oder Leistenbrüche: Bauchbereich aussparen
- Menstruation, wenn die Arbeit am Bauch Beschwerden verursacht
- Zustände nach Operationen ohne endgültige ärztliche Freigabe
- Ausgeprägte Kapillarfragilität oder Neigung zu Hämatomen
- Niedriger Blutdruck
- Höheres Alter mit begleitender Kreislauferkrankung
- Personen unter 18 Jahren

4.3 Auszuschließende Bereiche und Situationen

- Arbeiten Sie nicht über Bereichen mit aktiver Infektion, Hautläsion oder kürzlicher Entzündung: Deaktivieren Sie die entsprechenden Kanäle oder brechen Sie die Sitzung ab.
- Wenden Sie bei Hernie oder kürzlicher Bauchoperation keinen Druck auf den Bauch an: Schließen Sie die Zonen 3 und 4.

- Verwenden Sie den Anzug nicht über äußeren Prothesen, starren Verbänden oder Vorrichtungen, die gegen die Haut gedrückt werden könnten.
- Brechen Sie die Sitzung sofort ab bei Schmerzen, anhaltendem Kribbeln, Schwindel oder jeder unangenehmen Empfindung.

4.4 Vorherige Beurteilung

Führen Sie vor der ersten Sitzung die Anamnese des Kunden durch und dokumentieren Sie sie. Anhang A dieser Anleitung enthält ein druckfertiges Formular zur vorherigen Beurteilung und Einwilligungserklärung. Prüfen Sie den Fragebogen bei jedem neuen Besuch erneut, da sich Gesundheitszustand, Medikation und persönliche Umstände geändert haben können.

- Halten Sie die Antworten des Kunden und seine Unterschrift vor der ersten Sitzung fest.
- Gehen Sie die Risikopunkte bei jedem weiteren Besuch durch, zumindest mündlich.
- Bewahren Sie die schriftliche ärztliche Freigabe auf, wenn der Fall dies erfordert.
- Vermerken Sie im Sitzungsprotokoll in Anhang B die angewendeten Parameter und beobachtete Vorkommnisse.

05 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

5.1 Elektrische Sicherheit

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung an (220 – 230 V, 50/60 Hz).
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine in dieser Anleitung nicht beschriebenen Arbeiten aus. Alle Reparaturen obliegen dem autorisierten technischen Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Einheit gelangen.
- Verändern Sie die Kabel nicht und verbinden Sie sie nicht. Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo das Netzkabel betreten oder eingeklemmt werden kann.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Innere der Einheit ein und verdecken Sie die Lüftungsgitter nicht.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene und ebene Fläche, auf der es weder kippen noch herunterfallen kann.
- Ziehen Sie das Netzkabel am Ende des Arbeitstages aus der Steckdose.

GEFAHR

Ziehen Sie den Netzstecker sofort, wenn eine dieser Situationen eintritt:

- Das Gerät ist nass geworden oder es ist Flüssigkeit eingedrungen.
- Das Gerät riecht verbrannt oder gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich.
- Das Netzkabel ist gebrochen oder beschädigt.
- Das Gehäuse weist Brüche oder sichtbare Schäden auf.

5.2 Sicherheit während der Anwendung

- Führen Sie stets die vorherige Beurteilung des Kunden durch und schließen Sie alle Gegenanzeigen aus Abschnitt 4 aus.
- Beginnen Sie immer mit Druckstufe 1 und erhöhen Sie nur, wenn der Kunde es bequem toleriert. Die Behandlung darf niemals schmerzhaft sein.
- Halten Sie während der gesamten Sitzung Kontakt zum Kunden und prüfen Sie regelmäßig sein Wohlbefinden.
- Lassen Sie den Kunden während des Gerätebetriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass der Kunde sich jederzeit bemerkbar machen kann und der Anzug schnell zu öffnen ist.
- Entfernen Sie Ringe, Uhren, Armbänder und starre Gegenstände aus den vom Anzug bedeckten Bereichen.
- Betreiben Sie den Anzug nicht über längere Zeit im leeren Zustand.
- Brechen Sie die Sitzung bei Unbehagen, Schmerzen, Schwindel oder übermäßigem Druckgefühl ab.

5.3 Hygiene

- Verwenden Sie bei jeder Sitzung und bei jedem Kunden Hygienebeutel für die Beine.
- Verwenden Sie unter dem Anzug eine Einweghose aus Zellstoff oder ein gleichwertiges Kleidungsstück.
- Öffnen Sie den Textilteil des Anzugs, um ihn nach jeder Anwendung zu reinigen und zu desinfizieren.
- Wechseln Sie das Einwegmaterial ausnahmslos zwischen den Kunden.

5.4 Umgang mit dem Anzug

- Erzwingen Sie die Reißverschlüsse nicht und schließen Sie den Anzug nicht bei einem Kunden, dessen Größe nicht der gewählten Einstellung entspricht.
- Ziehen Sie nicht ruckartig an den Schläuchen und knicken Sie sie nicht übermäßig: Sie sind der empfindlichste Punkt des Sets.
- Legen Sie keine spitzen Gegenstände, Metallschnallen oder Kosmetik in starren Behältern in den Anzug.
- Tragen Sie Kosmetik nicht direkt auf das Textil auf: Verwenden Sie stets ein Kleidungsstück oder einen Beutel dazwischen.
- Prüfen Sie vor jeder Sitzung, dass keine Kammer Schnitte, Löcher oder offene Nähte aufweist.

06 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

6.1 Haupteinheit

Die Haupteinheit beherbergt den Kompressor und die Steuerelektronik. Auf der Oberseite befindet sich der 8-Zoll-Farb-Touchscreen, über den die gesamte Programmierung erfolgt, und an der unteren Front der beleuchtete Einschalttaster. Das Tischformat erlaubt die Aufstellung neben der Liege, auf einer Arbeitsplatte oder auf einem Beistellwagen.



ABBILDUNG 01 Haupteinheit PRESOFIT PRO mit dem 8-Zoll-Touchscreen.



ABBILDUNG 02 Seitenansicht der Einheit: Tischgehäuse mit rutschfesten Füßen.

6.2 Arbeitsbildschirm

Der Arbeitsbildschirm fasst alle Parameter der Sitzung in einer Ansicht zusammen. Die zentrale Silhouette stellt den Anzug und seine Kanäle dar; an den Seiten erscheinen die Aufblaszeiten jedes Kanals, nach Zonen gruppiert; und rechts die Wahlfelder für Zone, Modus, Druck und Zeit.



ABBILDUNG 03 Arbeitsbildschirm mit den von 1 bis 6 nummerierten Bedienbereichen.

- | | |
|--|--|
| ① Auswahl des Behandlungsbereichs: Zonen-Direktzugriffe 1, 2 und 3+4 | ④ Einstellung der Sitzungsdauer mit Minus- und Pluszeichen |
| ② Auswahl des Arbeitsmodus, von A bis H | ⑤ Start, Pause und Stopp mit optischer Zustandsanzeige |
| ③ Auswahl der Druckstärke: Stufen 1, 2 und 3 | ⑥ Aufblaszeit jedes Kanals, nach Zonen gruppiert |

6.3 Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich die beiden runden Mehrwege-Anschlüsse für den Anzug, der Hauptschalter mit Sicherungshalter und der Netzanschluss.

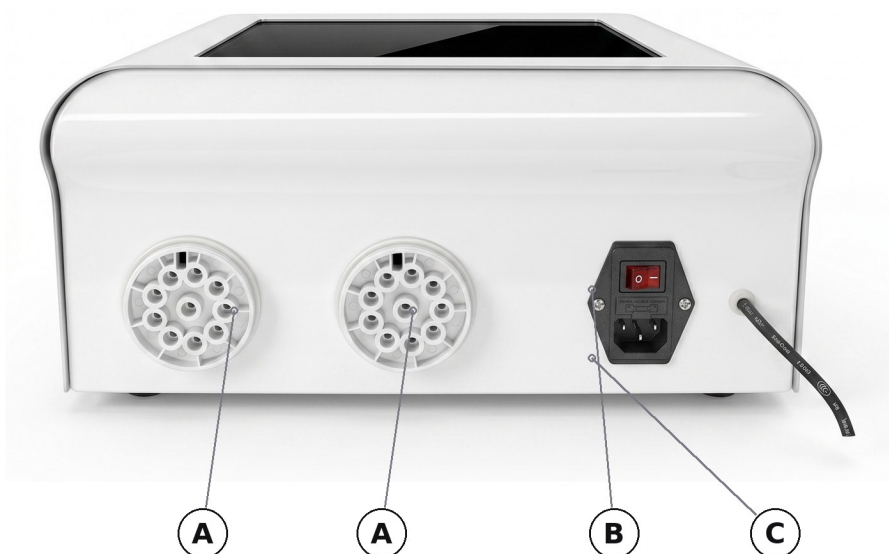


ABBILDUNG 04 Rückseite: Luftanschlüsse, Hauptschalter und Netzanschluss.

- | | |
|---|---|
| <p>Ⓐ Runde Mehrwege-Anschlüsse für die Schläuche des Anzugs</p> | <p>Ⓑ Hauptschalter und Sicherungshalter</p> |
| | <p>Ⓒ Netzanschluss und Netzkabel</p> |

6.4 Körperanzug

Der Anzug ist ein einteiliges Ganzkörperpart, das Beine, Gesäß, Hüften, Bauch und Taille abdeckt. Er enthält 32 Luftkammern, verteilt auf 16 Kanäle, seitliche Größenreißverschlüsse, einen mittleren Reißverschluss zur Erweiterung des Oberteils sowie Textilstreifen, die die Schläuche und Anschlüsse abdecken.



ABBILDUNG 05 Körperanzug mit den von 1 bis 7 nummerierten Elementen.

- | | |
|--|---|
| <p>① Linker seitlicher Reißverschluss zur Weitenverstellung</p> | <p>③ Mittlerer Reißverschluss zur Verstellung des Oberteils</p> |
| <p>② Rechter seitlicher Reißverschluss zur Weitenverstellung</p> | <p>④ Textilstreifen, der die Schläuche der linken Seite abdeckt</p> |

⑤ Textilstreifen, der die Schläuche der rechten Seite abdeckt

⑥ Luftschlauchbündel

⑦ Runde Anschlüsse zur Verbindung mit der Einheit



ABBILDUNG 06 Ausgebreiteter Körperanzug mit dem Haltegurt des Taillenbereichs.

Maße des Anzugs

Ungefähre Gesamtlänge	140 cm
Oberer Bereich, lang	etwa 60 cm
Oberer Bereich, kurz	45 cm
Mittleres Panel, Breite	33 cm
Mittleres Panel, Höhe	31,5 / 58 cm
Unterer Bereich, lang	58,5 cm
Fußbereich, Länge	40 cm
Fußbereich, Breite	30 cm
Fußbereich, Höhe	26 cm
Größensystem	3 Größen über seitliche Reißverschlüsse und obere Mittelverstellung

Richtwerte laut Herstellerangaben. Da es sich um ein konfektioniertes Textilteil handelt, sind geringe Abweichungen zwischen einzelnen Einheiten möglich.

6.5 Lieferumfang

- 1 Haupteinheit PRESOFIT PRO mit Touchscreen
- 1 Satz Luftschläuche
- 1 verstellbarer einteiliger Körperanzug
- 2 runde Mehrwege-Anschlüsse

- 1 Netzkabel

- 1 Bedienungsanleitung



ABBILDUNG 07 Körperanzug und textile Schutzhülle.



ABBILDUNG 08 Schlauchbündel und runde Anschlüsse des Anzugs.

07 AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS

7.1 Aufstellort des Geräts

- Stellen Sie die Einheit auf eine stabile, trockene und ebene Fläche in der Nähe der Liege und einer geerdeten Steckdose.
- Lassen Sie rund um das Gehäuse Freiraum für die Belüftung des Kompressors.
- Führen Sie die Schläuche ohne Spannung, ohne enge Knicke und außerhalb von Laufwegen.
- Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, die Nähe von Wasserquellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Arbeiten Sie in einem Raum mit angenehmer Umgebungstemperatur und ausreichender Belüftung.

7.2 Anschluss der Schläuche an die Einheit

Der Anzug wird mit bereits angeschlossenen Schläuchen geliefert, sodass bei der Inbetriebnahme lediglich die beiden runden Anschlüsse mit der Haupteinheit zu verbinden sind.

- 1 Setzen Sie den runden Anschluss vor die entsprechende Buchse auf der Rückseite.
- 2 Bringen Sie die Öffnung des Anschlusses mit dem Stift der Buchse zur Deckung: Das ist die Positionsführung, die den korrekten Sitz sicherstellt.
- 3 Stecken Sie den Anschluss entlang dieser Führung ein, ohne Gewalt anzuwenden.
- 4 Drehen Sie die Rundmutter, bis die Verbindung fixiert ist. Ein vollständiges Festziehen bis zum Anschlag ist für eine korrekte Verbindung nicht erforderlich.
- 5 Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Anschluss.

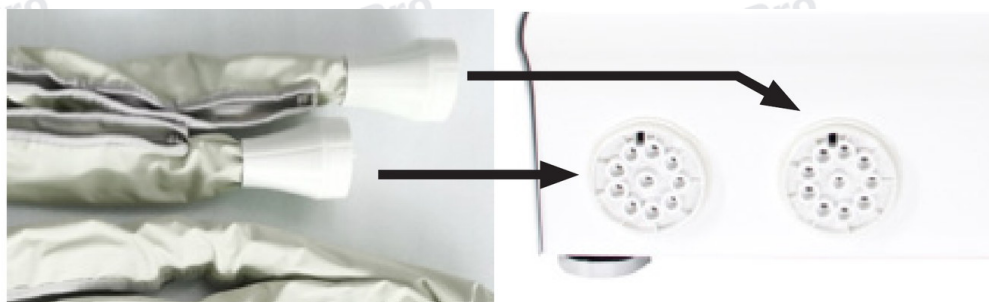


ABBILDUNG 09 Verbinden der runden Anschlüsse des Anzugs mit den Buchsen der Einheit.

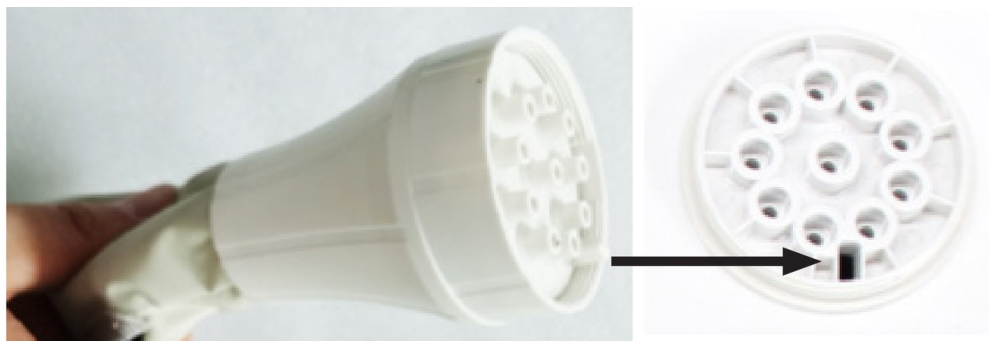


ABBILDUNG 10 Positionsführung: Öffnung des Anschlusses und Stift der Buchse.



ABBILDUNG 11 Fixieren des Anschlusses durch Drehen der Rundmutter.

ACHTUNG

Ein schlecht sitzender Anschluss oder eine nicht angezogene Mutter führt zu Luftverlust, ungleichmäßiger Kanalfüllung und einer Sitzung ohne den programmierten Druck. Prüfen Sie vor jeder Sitzung den Sitz beider Anschlüsse.

7.3 Anpassung des Anzugs an die Größe

Der Anzug lässt drei Größen zu. Die Weitenverstellung erfolgt über die seitlichen Reißverschlussstreifen mit jeweils drei Elementen pro Seite; benötigt der obere Bereich mehr Weite, kann der mittlere Reißverschluss halb oder vollständig geöffnet werden.

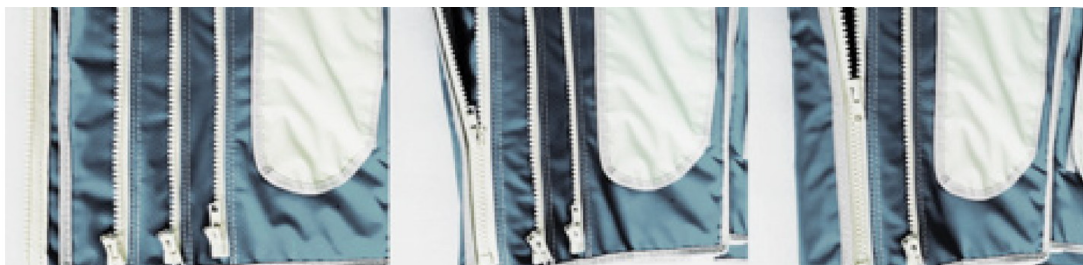


ABBILDUNG 12 Seitliche Reißverschlussstreifen: drei Positionen zur Weitenverstellung.



ABBILDUNG 13 Öffnen des mittleren Reißverschlusses zur Erweiterung des Anzugoberteils.



ABBILDUNG 14 Detail des geöffneten oberen Mittelreißverschlusses.



ABBILDUNG 15 Innenseite des Anzugs und Verstellklappe des oberen Bereichs.

- Wählen Sie die zum Umfang des Kunden passende Position des seitlichen Reißverschlusses, auf beiden Seiten gleich.
- Reicht die seitliche Verstellung für den Oberkörper nicht aus, öffnen Sie den mittleren Reißverschluss halb oder vollständig.
- Prüfen Sie vor Beginn des Füllvorgangs, dass der Anzug anliegt, ohne zu drücken: Die flache Hand muss zwischen Kleidungsstück und Körper passen.
- Die Textilstreifen decken Schläuche und Anschlüsse für ein sauberes Erscheinungsbild während der Sitzung ab und müssen nur zum Anschließen oder Abnehmen der Schläuche bewegt werden.

7.4 Aufbewahrung des Anzugs

- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, kann das Schlauchsystem abgenommen und der Anzug in zwei Teile gefaltet werden, um Platz zu sparen.
- Bewahren Sie das Kleidungsstück trocken, ohne erzwungene Falten und geschützt vor Staub und Hitze auf.
- Lagern Sie den Anzug nicht zusammengedrückt unter anderen Gegenständen oder auf Flächen mit Kanten.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf: Sie ist die beste Grundlage für einen sicheren Transport.

08 BETRIEB

8.1 Inbetriebnahme

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Netzsteckdose an.
- 2 Prüfen Sie, dass beide Anschlüsse des Anzugs korrekt sitzen und fixiert sind.
- 3 Betätigen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite.
- 4 Drücken Sie den Einschalttaster an der Vorderseite der Einheit.
- 5 Warten Sie das Ende des Startbildschirms ab und rufen Sie den Arbeitsbildschirm auf.

8.2 Startbildschirm und Sprache

Nach dem Einschalten erscheint der Startbildschirm mit einem Fortschrittsbalken. Anschließend führt der linke Pfeil zur Sprachauswahl und der rechte Pfeil direkt in den Arbeitsbildschirm. Das Sprachmenü bietet Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Polnisch. Die gewählte Sprache bleibt für die folgenden Sitzungen erhalten.

8.3 Auswahl der Arbeitszonen

Der Bildschirm enthält drei Direktzugriffe für die vier Zonen, in die der Anzug unterteilt ist, und erlaubt so das gleichzeitige Aktivieren oder Deaktivieren mehrerer Kanäle. Die Zonen 3 und 4 werden über einen einzigen Zugriff gemeinsam gesteuert. In der Grundeinstellung sind alle Zonen aktiviert.

DIREKTZUGRIFF	ZONE DES ANZUGS	ÜBLICHE ANWENDUNG
1	Unterer Bereich: Beine	Arbeit konzentriert auf die Beine, der übrige Anzug bleibt ungefüllt
2	Mittlerer Bereich: Oberschenkel, Hüften und Gesäß	Protokolle zur Formung des Unterkörpers
3+4	Oberer Bereich: Bauch und Taille, linke und rechte Seite	Werden immer gemeinsam aktiviert und deaktiviert

8.4 Nummerierung der Kanäle

Zur Erläuterung der Aufblasreihenfolge sind die Kanäle von 1 bis 16 von der unteren zur oberen Körperpartie nummeriert. Die Kanäle des oberen Bereichs arbeiten paarweise: Kanal 9 wirkt gleichzeitig mit 13, 10 mit 14, 11 mit 15 und 12 mit 16. Deshalb werden in der Programmierung nur die Positionen 1 bis 12 verwendet, und jede Einstellung an Kanal 9 wird automatisch auf Kanal 13 übertragen.

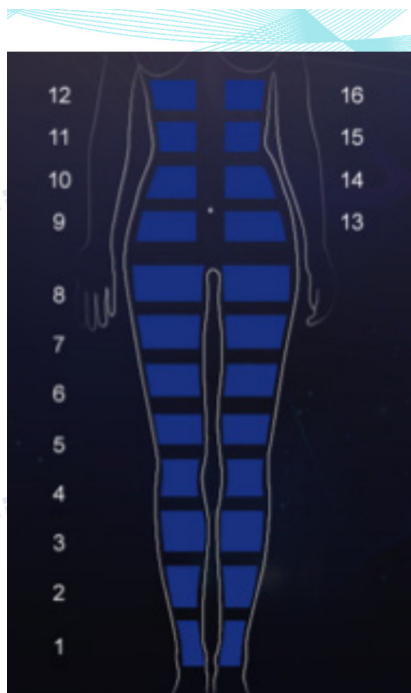


ABBILDUNG 16 Nummerierung der Kanäle des Anzugs von 1 bis 16 mit den Paaren des oberen Bereichs.

HINWEIS

Die Beschreibungen der Arbeitsmodi in Abschnitt 8.5 verwenden diese Nummerierung von 1 bis 12. Beachten Sie das bei der Auslegung der Aufblassequenzen.

8.5 Arbeitsprogramme

Das Gerät enthält 8 automatische Modi von A bis H. Jeder Modus definiert eine andere Abfolge des Aufblasens und Entlüftens der Kanäle. Für einen Moduswechsel muss der Betrieb zuvor pausiert werden. Die Wahl richtet sich nach der gewünschten Kompressionsempfindung, der Toleranz des Kunden und dem kosmetischen Ziel der Sitzung.

Modus A · kombiniert, für den täglichen Gebrauch — durchläuft die Modi B bis H in aufeinanderfolgenden Zyklen und widmet jedem Muster einige Minuten. Es ist die umfassende und vielseitige Option, geeignet für allgemeine kosmetische Erhaltungsprotokolle, für erste Sitzungen und für Kunden, die ein abwechslungsreiches Erlebnis bevorzugen. Die Aufblaszeit der Kanäle kann während des Betriebs dieses Modus nicht verändert werden.

Modus B · sanft peristaltisch — bläst von 1 bis 12 Kanal für Kanal in aufsteigender Folge von unten nach oben auf und wiederholt den Zyklus. Er bietet eine progressive, geordnete Massage ohne starken Druckaufbau. Er

passt gut zu Erhaltungssitzungen, zur regelmäßigen Arbeit und zu Kunden, die eine moderate Kompression bevorzugen.

Modus C · verkettete Kompression — bläst 1 auf, dann 1+2, danach 2+3, 3+4 und so weiter bis 11+12. Der Druck wandert paarweise über die Kanäle und erzeugt ein gleitendes Schubempfinden mit deutlicher Wahrnehmung eines aufsteigenden Verlaufs. Eine Option für kontinuierliche kosmetische Arbeit an Beinen, Gesäß und Bauch.

Modus D · Aufbau und Verschiebung — bläst 1 auf, dann 1+2, danach 1+2+3 und 1+2+3+4; anschließend verschiebt er den Viererblock, 2+3+4+5, 3+4+5+6, 4+5+6+7, bis 9+10+11+12, und wiederholt. Er verbindet Aufbau und Verschiebung und verstärkt so das Empfinden progressiver Kompression über weite Bereiche des Anzugs bei geordnetem Verlauf.

Modus E · aufsteigender progressiver Druck — bläst 1 auf, dann 1+2, danach 1+2+3 und summiert weiter Kanäle auf, bis 1 bis 12 mit dem gesamten Anzug unter Druck vollständig sind. Es ist das intensivste umhüllende Kompressionsmuster mit der ausgeprägtesten kumulativen Wahrnehmung am Unterkörper und im Bauchbereich.

Modus F · doppelter simultaner Verlauf — arbeitet zwei Sequenzen gleichzeitig: eine Linie 1+9, 2+10, 3+11, 4+12 und eine weitere 5+9, 6+10, 7+11, 8+12. Er verteilt die Arbeit auf zwei parallele Verläufe und erzeugt eine hochfrequente Massage mit Ausrichtung auf allgemeine körperliche Entspannung. Üblich in Komfortsitzungen und nach sportlicher Betätigung.

Modus G · doppelter Verlauf mit hohem Rhythmus — folgt demselben Schema zweier simultaner Verläufe wie Modus F, jedoch mit hohem Rhythmus. Der Hersteller stellt ihn als dynamisches Programm für Sitzungen zur körperlichen Erholung und für weniger punktuelle, umfassendere Arbeit vor.

Modus H · Gesamtkompression — bläst den gesamten Anzug gleichzeitig auf, entlüftet ihn gemeinsam und wiederholt den Zyklus. Es ist der gleichmäßigste und direkteste Modus mit sehr klarer Wahrnehmung gemeinsamen Drucks an Beinen, Gesäß, Hüften und Bauch. Er wird üblicherweise am Ende der Sitzung nach anderen Modi eingesetzt, um das Protokoll mit einer umhüllenden Kompression abzuschließen.

HINWEIS

Die beschriebenen Sequenzen entsprechen dem Herstellerhandbuch des Modells IDMRTE8. Sollte der Hersteller künftig die Firmware des Bildschirms aktualisieren, kann sich die Zuordnung zwischen Buchstabe und Muster ändern: Vergleichen Sie stets die in der Kabine beobachtete Sequenz mit dieser Tabelle und melden Sie Abweichungen dem Vertrieb.

8.6 Arbeitsdruck

Die Druckstärke wird am Bildschirm in drei Stufen gewählt. Stufe 1 ist die normale Arbeitseinstellung und der empfohlene Ausgangspunkt für jeden neuen Kunden:

STUFE	DRUCK	ENTSPRECHUNG	ANWENDUNG
1	75 mmHg · 10 kPa	0,1 bar	Ausgangsstufe und übliche Arbeitsstufe in der Kabine
2	150 mmHg · 20 kPa	0,2 bar	Kunden, die Stufe 1 bequem tolerieren und mehr Intensität wünschen
3	225 mmHg · 30 kPa	0,3 bar	Höchste Intensität, nur bei ausdrücklicher Toleranz und ständiger Überwachung

ACHTUNG

Erhöhen Sie den Druck stets schrittweise und nur mit Zustimmung des Kunden. Ein Druck über dem tolerierten Niveau verbessert das kosmetische Ergebnis nicht und kann Beschwerden, Abdrücke oder Hämatome verursachen, besonders bei Personen mit Kapillarfragilität.

8.7 Sitzungsdauer

Die Arbeitszeit wird am Bildschirm mit Minus- und Pluszeichen eingestellt; das programmierbare Maximum beträgt 60 Minuten. Der Hersteller gibt einen Arbeitsbereich von 10 bis 60 Minuten an. Im Modus A kann die Aufblaszeit der Kanäle während des Betriebs nicht verändert werden. Nach Ablauf der programmierten Zeit stoppt das Gerät den Zyklus und die Kammern entleeren sich.

8.8 Aufblaszeit je Kanal

Jeder Kanal kann eine eigene Aufblaszeit von 0 bis 18 Sekunden haben. Der Standardwert beträgt 10 Sekunden pro Kanal, und jeder Tastendruck erhöht die Einstellung um 3 Sekunden, in der Folge 0, 3, 6, 9, 12, 15 und 18. Die Kanäle im rechten und linken oberen Körperbereich werden gemeinsam über die vier Tasten auf der linken Bildschirmseite gesteuert.

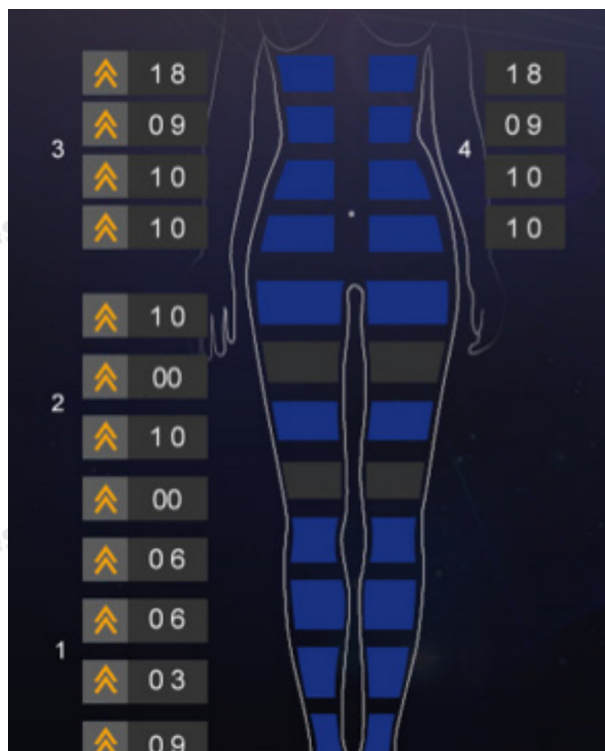


ABBILDUNG 17 Einstellung der Aufblaszeit jedes Kanals. Kanäle mit 00 bleiben geschlossen.

- Eine längere Aufblaszeit erzeugt an dieser Stelle des Verlaufs eine anhaltendere Kompression.
- Eine kürzere Zeit beschleunigt den Druckdurchlauf durch diesen Kanal und vermittelt ein fließenderes Empfinden.
- Wird ein Kanal auf **00** gestellt, bleibt dieser Kanal geschlossen und wird während der Sitzung nicht gefüllt.
- Das einzelne Schließen von Kanälen erlaubt, einen bestimmten Punkt auszunehmen, ohne auf den übrigen Anzug zu verzichten: Es ergänzt die Zonen-Direktzugriffe.
- In einigen Modi kann die Aufblaszeit während des laufenden Zyklus nicht verändert werden.

8.9 Start, Pause und Sitzungsende

- Die Bildschirmanzeige zeigt den Betriebszustand: in Betrieb, mit blinkendem Signal und rückwärts laufendem Timer; pausiert, mit stehendem Signal.
- Pausieren Sie den Zyklus, bevor Sie den Arbeitsmodus wechseln.
- Die Pause bewahrt die Sitzungskonfiguration, sodass ohne erneute Programmierung fortgesetzt werden kann.
- Stoppen Sie am Ende den Zyklus, warten Sie die vollständige Entleerung der Kammern ab und öffnen Sie den Anzug erst bei gestoppter Sitzung.
- Öffnen Sie die Reißverschlüsse nicht, solange die Kanäle unter Druck stehen.

09 BEHANDLUNGSPROTOKOLL

Empfohlener Ablauf für eine vollständige kosmetische Pressotherapie Sitzung in der Kabine:



ABBILDUNG 18 Auf der Liege ausgebreiteter Anzug, bereit für den Kunden.

- 1 Prüfen Sie das Formular zur vorherigen Beurteilung des Kunden und bestätigen Sie, dass keine Gegenanzeige vorliegt.
- 2 Bereiten Sie die Liege vor und breiten Sie den geöffneten Anzug darauf aus, mit den Schläuchen geordnet zur Seite der Einheit.
- 3 Stellen Sie dem Kunden eine Einweghose aus Zellstoff oder ein gleichwertiges Kleidungsstück sowie Hygienebeutel für die Beine bereit.
- 4 Sieht das Protokoll es vor, tragen Sie die drainierende oder reduzierende Kosmetik auf und führen Sie die vorbereitende manuelle Massage durch, bevor Sie den Anzug anlegen.
- 5 Passen Sie den Anzug mit den seitlichen Reißverschlüssen und, falls nötig, mit dem mittleren Reißverschluss an die Größe des Kunden an.
- 6 Prüfen Sie, dass das Kleidungsstück gleichmäßig anliegt, ohne ausgeprägte Falten und ohne an irgendeiner Stelle zu drücken.

- 7 Wählen Sie am Bildschirm die Arbeitszonen, den Modus, die Druckstufe 1 und die Sitzungsdauer.
- 8 Starten Sie den Zyklus und bestätigen Sie das Empfinden mit dem Kunden während der ersten Minuten; passen Sie Druck oder Aufblaszeiten bei Bedarf an.
- 9 Überwachen Sie die gesamte Sitzung und halten Sie Kontakt zum Kunden.
- 10 Stoppen Sie am Ende den Zyklus, warten Sie die vollständige Entleerung ab, öffnen Sie den Anzug und helfen Sie dem Kunden, sich ruhig aufzurichten.
- 11 Entfernen Sie das Einwegmaterial, reinigen und desinfizieren Sie den Anzug und tragen Sie die Sitzung in das Protokoll in Anhang B ein.

HINWEIS

Wird die Pressotherapie in eine kombinierte Behandlung eingebunden, wenden Sie sie am Ende der Sitzung an, nach den übrigen eingesetzten Methoden.

9.1 Richtwerte nach kosmetischem Ziel

ZIEL DES PROTOKOLLS	AUSGANGSKONFIGURATION	ANMERKUNGEN
Erste Sitzung und Toleranzprüfung	Modus A · Druck 1 · 20 Minuten	Zeigt die Reaktion des Kunden auf verschiedene Muster, bevor ein fester Modus gewählt wird
Allgemeine kosmetische Erhaltung	Modus B · Druck 1 · 30 Minuten	Moderate, kontinuierliche Kompression, geeignet für regelmäßige Sitzungen
Formung des Unterkörpers	Modus C oder D · Druck 1 oder 2 · 30 bis 40 Minuten	Deutliche sequenzielle Arbeit an Beinen, Gesäß und Bauch
Gefühl müder Beine	Modus B oder F · Druck 1 · 25 bis 30 Minuten	Zonen 1 und 2 aktiv; der obere Bereich kann geschlossen werden
Sitzung für Komfort und Erholung	Modus F oder G · Druck 1 · 20 bis 30 Minuten	Hoher Rhythmus und umhüllende Wahrnehmung, angezeigt nach körperlicher Anstrengung
Abschluss eines Körperprotokolls	Modus H · Druck 1 · 10 Minuten	Gesamtkompression zum Beenden der Sitzung

Richtwerte für die Kabine, keine Vorschriften. Die Fachkraft passt Modus, Druck und Dauer an jeden Kunden, dessen Toleranz und das gesamte kosmetische Protokoll an.

10 ANLEGEN DES ANZUGS BEIM KUNDEN

Ein sorgfältiges Anlegen des Anzugs bestimmt einen großen Teil des Sitzungsergebnisses und des Komforts des Kunden. Halten Sie bei jedem Besuch diese Reihenfolge ein:

- 1 Breiten Sie den Anzug vollständig geöffnet auf der Liege aus, mit dem Fußbereich zum unteren Ende hin.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der Kunde die Einweghose und die Hygienebeutel angelegt hat.
- 3 Bitten Sie den Kunden, sich auf den geöffneten Anzug zu legen, mit den Beinen mittig in den Beinteilen.
- 4 Schließen Sie zuerst die Beinteile, dann den Hüft- und Gesärbereich und zuletzt Bauch und Taille.
- 5 Stellen Sie die seitlichen Reißverschlüsse auf die passende Größe ein, auf beiden Seiten gleich.
- 6 Sitzt der obere Bereich zu eng, öffnen Sie den mittleren Reißverschluss halb oder vollständig.
- 7 Führen Sie das Schlauchbündel seitlich an der Liege entlang, ohne es über den Kunden zu legen und ohne enge Knicke.
- 8 Prüfen Sie, dass die Textilstreifen Schläuche und Anschlüsse abdecken und nichts gegen die Haut drückt.
- 9 Prüfen Sie mit der flachen Hand, dass das Kleidungsstück anliegt, ohne zu drücken, bevor Sie den Zyklus starten.

ACHTUNG

Der Anzug darf bei einem Kunden, dessen Größe die verfügbare Verstellung übersteigt, nicht mit Gewalt geschlossen werden. Das Erzwingen der Reißverschlüsse beschädigt das Kleidungsstück und beeinträchtigt Sicherheit und Komfort der Sitzung.

HINWEIS

Ein Kleidungsstück mit ausgeprägten Falten verteilt den Druck ungleichmäßig. Nehmen Sie sich vor dem Start einige Sekunden Zeit, das Textil zu glätten: Das verbessert die Wahrnehmung des Kunden am deutlichsten.



ABBILDUNG 19 PRESOFIT PRO in der Kabine, mit der Einheit auf der Arbeitsplatte und dem Anzug auf der Liege.

11 DIE SITZUNGEN

Zu kosmetischen Zwecken liegen Pressotherapiesitzungen üblicherweise zwischen 30 und 45 Minuten, je nach Arbeitsziel und Empfindlichkeit des jeweiligen Kunden. Der Timer des Geräts erlaubt eine Programmierung bis 60 Minuten, und der Hersteller gibt einen Arbeitsbereich von 10 bis 60 Minuten an.

Hinsichtlich der Häufigkeit gilt in der Kabine als allgemeiner Richtwert 2 bis 3 Sitzungen pro Woche an abwechselnden Tagen. Die Gesamtzahl der Sitzungen hängt vom gesetzten kosmetischen Ziel, vom Ausgangspunkt des Kunden und von seiner Regelmäßigkeit ab; eine für alle Fälle gültige feste Zahl gibt es nicht.

Die ersten Sitzungen sollten mit Druckstufe 1 und kurzer Dauer geplant werden, um die Toleranz zu prüfen. Danach entscheidet die Fachkraft, ob die Parameter beibehalten oder angepasst werden, stets innerhalb des vom Kunden angegebenen Komfortbereichs.

Wird die Pressotherapie innerhalb einer kombinierten Behandlung eingesetzt, erfolgt sie am Ende der Sitzung, nach den übrigen eingesetzten Methoden. Die Ergebnisse sind unterschiedlich und hängen von individuellen Faktoren, von der Zahl der Sitzungen und von den persönlichen Gewohnheiten jedes Kunden ab.

12 VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER BEHANDLUNG

- 1 Beginnen Sie stets mit Druckstufe 1 und passen Sie nach den vom Kunden geschilderten Empfindungen an, schrittweise und von niedrig nach hoch.
- 2 Halten Sie während der gesamten Sitzung Kontakt zum Kunden und bestätigen Sie regelmäßig sein Wohlbefinden.
- 3 Lassen Sie den Kunden während des Gerätebetriebs nicht unbeaufsichtigt.
- 4 Deaktivieren Sie vor dem Start des Zyklus die nicht zu bearbeitenden Zonen und schließen Sie die auszunehmenden Kanäle.
- 5 Pausieren Sie den Betrieb, bevor Sie den Arbeitsmodus wechseln.
- 6 Brechen Sie die Sitzung bei Schmerzen, anhaltendem Kribbeln, Schwindel, Blässe oder jeder unangenehmen Empfindung ab.
- 7 Verwenden Sie bei jeder Sitzung und bei jedem Kunden Hygienebeutel und Einwegmaterial.
- 8 Lassen Sie den Kunden nicht mit geschlossenem Anzug oder unter Druck stehenden Kanälen aufstehen.
- 9 Bieten Sie am Ende Wasser an und lassen Sie einige Minuten Ruhe, bevor der Kunde aufsteht.

13 REINIGUNG UND WARTUNG

13.1 Reinigung nach jeder Sitzung

- Stoppen Sie den Zyklus und trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigungsarbeit vom Netz.
- Öffnen Sie den Textilteil des Anzugs, um das Innere unmittelbar nach Sitzungsende zu reinigen und zu desinfizieren.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Anzugs mit einem weichen, mit Wasser oder einem milden Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie vor dem Verstauen vollständig.
- Tauchen Sie weder den Anzug noch ein Bauteil ein und gießen Sie keine Flüssigkeit auf die Einheit.
- Reinigen Sie Gehäuse und Bildschirm mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, ohne Scheuermittel und ohne Lösungsmittel.
- Entfernen Sie das verwendete Einwegmaterial und ersetzen Sie es für den nächsten Kunden.

13.2 Pflege von Schläuchen und Anschlüssen

- Behandeln Sie Verbindung und Schläuche behutsam: nicht ruckartig ziehen und nicht übermäßig knicken.
- Prüfen Sie regelmäßig, dass keine Risse, Quetschungen oder Luftverluste vorliegen.
- Kontrollieren Sie den Zustand der Befestigungsmuttern und des Führungsstifts jedes Anschlusses.
- Ersetzen Sie beschädigte Schläuche oder Anschlüsse durch Originalersatzteile.

13.3 Regelmäßige Wartung

- Prüfen Sie den Zustand der Reißverschlüsse, Nähte und Gurte des Anzugs.
- Kontrollieren Sie das Netzkabel vor jedem Arbeitstag; ist es beschädigt, verwenden Sie das Gerät nicht.
- Halten Sie die Lüftungsgitter der Einheit frei und entfernen Sie angesammelten Staub.
- Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen, trockenen und vor übermäßiger Hitze geschützten Umgebung auf.
- Der Sicherungshalter befindet sich neben dem Netzanschluss auf der Rückseite. Ersetzen Sie die Sicherung ausschließlich durch eine gleicher Kenndaten und bei gezogenem Netzstecker.
- Jeder weitere Eingriff obliegt ausschließlich dem autorisierten technischen Kundendienst.

ACHTUNG

Scheuermittel, Lösungsmittel und hochkonzentrierter Alkohol schädigen die Beschichtung des Textils und die Verschweißungen der Kammern. Verwenden Sie ausschließlich Desinfektionsmittel, die mit technischem Material dieser Art verträglich sind.

14 STÖRUNGSBEHEBUNG

Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den technischen Kundendienst kontaktieren:

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Kabel schlecht angeschlossen; rückseitiger Schalter aus; Sicherung durchgebrannt	Kabel und geerdete Steckdose prüfen, den rückseitigen Schalter betätigen und die Sicherung bei gezogenem Netzstecker durch eine identische ersetzen
Der Bildschirm leuchtet, es kommt aber keine Luft	Zyklus pausiert; alle Zonen deaktiviert; Sitzungsdauer nicht programmiert	Betriebsanzeige prüfen, die benötigten Zonen aktivieren und die Arbeitszeit programmieren
Ein Kanal bläst sich nicht auf	Kanalzeit auf 00 gestellt; Zone deaktiviert; Anschluss schlecht verbunden	Kanalzeit über 00 einstellen, die entsprechende Zone aktivieren und den Sitz des Anschlusses prüfen
Der Druck wirkt schwach	Druckstufe 1 mit kurzen Aufblaszeiten; Leckage an einem Anschluss oder Schlauch	Druckstufe oder Aufblaszeit erhöhen und Sitz beider Anschlüsse sowie Zustand der Schläuche prüfen
Ungleichmäßige Füllung zwischen den Seiten	Anschluss nur teilweise eingesteckt; Schlauch gequetscht oder geknickt	Anschluss abziehen, am Führungsstift ausrichten, erneut einstecken und Mutter fixieren; Knicke aus den Schläuchen nehmen
Der Modus lässt sich nicht wechseln	Der Zyklus läuft	Betrieb pausieren und dann den neuen Modus wählen
Die Aufblaszeit lässt sich nicht einstellen	Modus A in Betrieb oder ein anderer Modus, der die Einstellung im Betrieb nicht zulässt	Zyklus pausieren oder einen Modus wählen, der die Einstellung erlaubt
Der Kunde berichtet von zu hohem Druck	Druckstufe zu hoch; Anzug auf eine zu kleine Größe eingestellt	Auf Stufe 1 zurückgehen, den Zyklus pausieren und die seitlichen Reißverschlüsse nachstellen oder den mittleren Reißverschluss öffnen
Der Anzug verliert Luft	Durchstochene Kammer, offene Naht oder beschädigter Schlauch	Verwendung einstellen, die Leckstelle bestimmen und ein Originalersatzteil beim technischen Kundendienst anfordern

GEFAHR

Besteht das Problem fort oder treten Brandgeruch, ungewöhnliche Geräusche, Feuchtigkeit im Geräteinneren oder sichtbare Schäden auf, trennen Sie die Einheit sofort vom Netz und kontaktieren Sie den technischen Kundendienst. Öffnen Sie das Gehäuse nicht: Alle Reparaturen sind von autorisiertem Fachpersonal auszuführen.

15 TECHNISCHE DATEN UND KONFORMITÄT

Handelsname	PRESOFIT PRO · exklusiv von Sunmarket Wellness
Referenz	IDMRTSE8
Zertifiziertes Modell	IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS · 8432729114645
Kategorie	Professionelle Pressotherapiegeräte · Kosmetikapparate
Verwendung	Professionell, in Kosmetikinstituten
Arbeitskanäle	16
Luftkammern	32, mit teilweiser Überlappung benachbarter Kammern
Kammerverteilung	16 Kammern auf jeder Körperseite
Kanalnummerierung	1 bis 16, mit den Paaren 9=13, 10=14, 11=15 und 12=16
Programme	8 automatische Modi, von A bis H
Arbeitsdruck	75 – 225 mmHg, in 3 Stufen regelbar
Druckbereiche	10 / 20 / 30 kPa · 0,1 / 0,2 / 0,3 bar
Zonen-Direktzugriffe	3, entsprechend den Zonen 1, 2 und 3+4
Sitzungsdauer	10 – 60 Minuten
Aufblaszeit je Kanal	0 – 18 Sekunden, in Schritten von 3 Sekunden
Standardzeit je Kanal	10 Sekunden
Schließen von Kanälen	Durch Einstellen der Aufblaszeit des Kanals auf 00
Bildschirm	8-Zoll-Farb-Touchscreen
Bildschirmsprachen	Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Polnisch
Luftausgänge	2 runde Mehrwege-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzug	Ganzkörperanzug, verstellbar auf 3 Größen
Abdeckung des Anzugs	Beine, Gesäß, Hüften, Bauch und Taille

Arme	Nicht enthalten · das Gerät lässt keine Erweiterung mit Armen zu
Gesamtlänge des Anzugs	etwa 140 cm
Größensystem	Seitliche Reißverschlüsse mit 3 Positionen und oberer Mittelreißverschluss
Stromversorgung	220 – 230 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Energieklasse	C
Elektrischer Schutz	Hauptschalter und Sicherungshalter auf der Rückseite
Aufbau der Einheit	Schlauchanschluss, Notfallgriff, integriertes Netzteil und Einschalter
Herkunft	Entworfen in Italien · Hergestellt in China
Hersteller und Importeur	PostQuam Cosmetic S.L.
Vertrieb	Sunmarket Wellness S.L.U.

15.1 Konformität

Das Gerät trägt die CE-Kennzeichnung. PostQuam Cosmetic S.L. hat die EU-Konformitätserklärung für das Produkt IDMRTSE8, bezeichnet als IDMRTSE8 PRESOTERAPIA LYMPHO-PRESS 8432729114645, ausgestellt, die folgende Richtlinien und harmonisierte Normen umfasst:

CE · Elektromagnetische Verträglichkeit	Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte Normen · EMV	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Niederspannung	Richtlinie 2014/35/EU
Angewandte Normen · Niederspannung	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Richtlinie 2011/65/EU
Angewandte Normen · RoHS	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC 62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC 62321-8:2017

HINWEIS

Die vom Hersteller unterzeichnete Original-EU-Konformitätserklärung ist über den Vertrieb erhältlich. Geben Sie bei der Anforderung die Referenz IDMRTSE8 an. Das Gerät ist kein Medizinprodukt, und seine CE-Kennzeichnung deckt keinerlei medizinische Zweckbestimmung ab.

Der Hersteller behält sich vor, die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sowie die Eigenschaften und Bauteile des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern. Einzelne Bauteile können von den gezeigten Abbildungen abweichen.

16 GARANTIE UND TECHNISCHER KUNDENDIENST

Das Gerät wird mit der Handelsgarantie des Vertriebs geliefert. Haupteinheit und Textilset haben unterschiedliche Fristen, da der Anzug einem Verschleiß unterliegt, der dem fortlaufenden Kabineneinsatz eigen ist.

16.1 Umfang und Fristen

BESTANDTEIL	FRIST	ANMERKUNGEN
Haupteinheit: Steuerelektronik, Kompressor, Bildschirm und Struktur	2 Jahre	Ab dem Datum der Kaufrechnung
Körperanzug und Luftkammern	1 Jahr	Kleidungsstück, das durch den Kabineneinsatz Verschleiß unterliegt
Luftschläuche und Anschlüsse	1 Jahr	Ersatz durch Originalersatzteil
Reißverschlüsse, Gurte und Textilstreifen	Nicht abgedeckt	Verschleißteile mit regelmäßigem Ersatzbedarf
Einweg- und Hygienematerial	Nicht abgedeckt	Verbrauchsmaterial, das bei jeder Sitzung ersetzt wird

Die Frist läuft ab dem Datum der Kaufrechnung und gilt für den darin genannten gewerblichen Käufer. Diese Handelsgarantie gilt unbeschadet der Rechte, die dem Käufer nach den anwendbaren Vorschriften zustehen.

16.2 Was abgedeckt ist

- Herstellungs- und Materialfehler, die den normalen Betrieb des Geräts verhindern.
- Ausfälle der Steuerelektronik, des Kompressors und des Bildschirms innerhalb der angegebenen Frist.
- Luftverluste in Schläuchen, Anschlüssen und Kammern, die auf einen ursprünglichen Fehler zurückgehen.
- Arbeitsleistung und für die Reparatur erforderliche Originalersatzteile.
- Vorabdiagnose und telefonische Unterstützung durch den technischen Kundendienst.

16.3 Was nicht abgedeckt ist

- Der normale Verschleiß des Anzugs, der Reißverschlüsse und der Haltegurte.
- Brüche, Schnitte, Löcher oder Verbrennungen des Textilmaterials, die während der Anwendung entstehen.
- Schäden durch eine von der Angabe auf dem Typenschild abweichende Netzspannung oder durch Installationen ohne Erdung.
- Schäden durch Stöße, Stürze, unsachgemäßen Transport oder Lagerung in feuchter Umgebung.

- Schäden durch Flüssigkeiten, Kosmetika oder Desinfektionsmittel, die auf die Einheit gelangt oder in den Anzug eingebracht wurden.
- Störungen durch Eingriffe, Zerlegung oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal.
- Verwendung des Geräts mit Zubehör oder Ersatzteilen, die keine Originalteile sind.
- Nicht professionelle Nutzung, Nutzung entgegen dieser Anleitung oder Missachtung der Gegenanzeigen sowie der Zeit- und Druckvorgaben.
- Reinigungs- und regelmäßige Wartungsarbeiten gemäß Abschnitt 13.
- Optische Schäden, die den Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigen.

ACHTUNG

Das Öffnen des Gehäuses, der Austausch interner Bauteile oder jeder Eingriff durch nicht autorisiertes Personal führen zum sofortigen Erlöschen der Garantie. Der Austausch der Sicherung und die in Abschnitt 13 beschriebenen Reinigungsarbeiten sind die einzigen Tätigkeiten, die dem Anwender obliegen.

16.4 Vorgehen bei einer Störungsmeldung

- 1 Stoppen Sie das Gerät, trennen Sie es vom Netz und verwenden Sie es nicht weiter.
- 2 Prüfen Sie zuvor Abschnitt 14: Ein großer Teil der Fälle löst sich durch Kontrolle des Sitzes der Anschlüsse, der Aktivierung der Zone am Bildschirm oder der Aufblaszeit des Kanals.
- 3 Halten Sie die Seriennummer vom Typenschild sowie Datum und Nummer der Kaufrechnung bereit.
- 4 Beschreiben Sie die Störung möglichst genau: Arbeitsmodus, Druckstufe, Zeitpunkt des Auftretens und beobachtetes Verhalten.
- 5 Fügen Sie Fotos oder ein kurzes Video des Problems und des Typenschilds bei.
- 6 Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Vertriebs telefonisch, per E-Mail oder per WhatsApp.
- 7 Bewahren Sie die Originalverpackung oder eine gleichwertige auf: Sie ist für einen sicheren Transport unerlässlich, falls die Einheit abgeholt werden muss.
- 8 Versenden Sie das Gerät nicht, ohne die Abholung zuvor mit dem technischen Kundendienst vereinbart zu haben.

16.5 Leistungen des Vertriebs

Sunmarket Wellness unterhält einen eigenen technischen Kundendienst mit Originalersatzteilen und begleitet das Institut über die gesamte Lebensdauer des Geräts:

- Telefonische und WhatsApp-Unterstützung bei Fragen zur Bedienung und zum Anlegen des Anzugs.
- Schulung zur Bedienung des Geräts, telefonisch oder in den Räumen des Vertriebs, auf Anfrage.
- Beratung zur Inbetriebnahme des Geräts im Institut.
- Originalersatzteile für Anzug, Schläuche und Anschlüsse.
- Aktualisierungen dieser Dokumentation.

16.6 Daten Ihres Geräts

Tragen Sie die Daten Ihres Geräts unmittelbar nach Erhalt hier ein. Das Typenschild befindet sich an der Haupteinheit, und die Seriennummer ist die erste Angabe, die der technische Kundendienst erfragt.

Seriennummer

Kaufdatum

Rechnungsnummer

Vertrieb

Kontakt des technischen
Kundendienstes

17 ENTSORGUNG UND RECYCLING

Am Ende ihrer Lebensdauer sind das Gerät und sein Zubehör getrennt vom übrigen Abfall zu entsorgen.

17.1 Haupteinheit

- Geben Sie die Einheit weder in den Hausmüllbehälter noch in den allgemeinen Gewerbeabfallbehälter.
- Geben Sie sie bei einer autorisierten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab oder beim Vertrieb, wenn Sie ein gleichwertiges Gerät erwerben.
- Trennen und entfernen Sie das Netzkabel vor der Abgabe.
- Die getrennte Sammlung ermöglicht die Rückgewinnung verwertbarer Materialien und verhindert, dass elektronische Bauteile in den allgemeinen Abfallstrom gelangen.

17.2 Anzug, Verpackung und Zubehör

- Trennen Sie den Karton der Verpackung ab und geben Sie ihn in den Papier- und Kartonbehälter.
- Geben Sie die Schutzkunststoffe in den entsprechenden Behälter.
- Ausgemusterte Anzüge, Schläuche und Anschlüsse werden als nicht recycelbarer Abfall behandelt, sofern die örtlichen Vorschriften nichts anderes bestimmen.
- Hygienisches Einwegmaterial wird nach dem internen Protokoll des Instituts mit dem allgemeinen Abfall entsorgt.

HINWEIS

Beachten Sie stets die in Ihrer Gemeinde geltenden Sammelvorschriften: Einstufung und Abgabestellen können abweichen.

A ANHANG A · FORMULAR ZUR VORHERIGEN BEURTEILUNG UND EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Dieser Anhang fasst in einem einzigen druckbaren Dokument die vorherige Beurteilung der anwendenden Person und ihre Einwilligung nach Aufklärung für kosmetische Pressotherapiesitzungen zusammen. Füllen Sie vor der ersten Sitzung ein Exemplar aus und unterschreiben Sie es, und prüfen Sie den Fragebogen bei jedem neuen Besuch.

HINWEIS

Orientierungsmuster. Passen Sie es an die Daten und Abläufe Ihres Instituts an und lassen Sie es vor der Verwendung von Ihrer Rechtsberatung prüfen: Sunmarket Wellness erbringt keine Rechtsberatung, und die Verantwortung für das letztlich verwendete Dokument liegt beim Institut.

DATEN DES INSTITUTS UND DER ANWENDENDEN PERSON

Institut _____ Fachkraft _____

Vor- und Nachname _____

Ausweisdokument _____ Geburtsdatum _____

Telefon _____ E-Mail _____

GESUNDHEITSFRAGEBOGEN

Kreuzen Sie das zutreffende Feld an. Die angegebenen Informationen dienen ausschließlich der Beurteilung der Eignung der kosmetischen Sitzung.

BLOCK A · SITUATIONEN, DIE DIE SITZUNG AUSSCHLIESSEN	JA	NEIN
Schwangerschaft oder Verdacht auf Schwangerschaft	☐	☐
Kürzlich aufgetretene tiefe Venenthrombose, Thrombophlebitis oder Phlebothrombose	☐	☐
Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderes implantiertes elektronisches Gerät	☐	☐
Epilepsie	☐	☐
Herzinsuffizienz	☐	☐
Erhebliche Atem- oder Niereninsuffizienz	☐	☐
Aktiver onkologischer Prozess	☐	☐
Fieber, aktive Infektion oder akute Entzündung	☐	☐
Hautinfektion, offene Wunde, Verbrennung oder Dermatitis im Arbeitsbereich	☐	☐
Lymphangitis	☐	☐

BLOCK A · SITUATIONEN, DIE DIE SITZUNG AUSSCHLIESSEN	JA	NEIN
Ausgeprägte oder geschlängelte Krampfadern	☐	☐
Nicht eingestellter Blutdruck	☐	☐
Kreislaufproblem, das nicht von einer medizinischen Fachperson beurteilt wurde	☐	☐
Person unter 18 Jahren	☐	☐

GEFAHR

Eine einzige Ja-Antwort in Block A schließt die Durchführung der Sitzung aus. Wenden Sie die Behandlung nicht an, solange die Situation besteht, und verweisen Sie die anwendende Person an ihre medizinische Fachperson.

BLOCK B · SITUATIONEN, DIE EINE INDIVIDUELLE BEURTEILUNG ERFORDERN	JA	NEIN
Laufende medizinische Behandlung oder offener Diagnoseprozess	☐	☐
Diabetes mit Neuropathie oder Sensibilitätsstörung	☐	☐
Störung der Hautsensibilität	☐	☐
Sehr dünne, überempfindliche Haut oder ausgeprägte Kapillarfragilität	☐	☐
Kürzliche Operation ohne endgültige ärztliche Freigabe	☐	☐
Bauch- oder Leistenbruch	☐	☐
Niedriger Blutdruck	☐	☐
Menstruation, wenn Arbeit am Bauch vorgesehen ist	☐	☐
Höheres Alter mit begleitender Kreislauferkrankung	☐	☐
Neigung zu Hämatomen oder zu leichten Abdrücken	☐	☐

Eine Ja-Antwort in Block B schließt die Sitzung nicht zwingend aus, erfordert jedoch eine individuelle Beurteilung, Druckstufe 1, verkürzte Zeiten, ständige Überwachung und gegebenenfalls eine vorherige schriftliche ärztliche Freigabe.

VORGESEHENE KONFIGURATION DER SITZUNG

- ☐ Zone 1 · Beine
- ☐ Zone 2 · Oberschenkel, Hüften und Gesäß
- ☐ Zonen 3 und 4 · Bauch und Taille
- ☐ Ausgeschlossene Kanäle, falls vorhanden:
- ☐ Vorgesehener Arbeitsmodus und vorgesehene Druckstufe:

ERKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG

Die anwendende Person erklärt und akzeptiert Folgendes:

1. Sie wurde darüber informiert, dass die Behandlung ausschließlich kosmetischen und Wohlfühlzwecken dient, keine ärztliche Handlung darstellt und keine medizinische Beurteilung, Diagnose oder Behandlung ersetzt.
2. Ihr wurde erläutert, worin die kosmetische Pressotherapie besteht und welche Empfindung während der Sitzung normal ist: eine progressive, rhythmische Kompression der Luftkammern auf den vom Anzug bedeckten Bereichen.
3. Sie wurde darüber informiert, dass vorübergehende Reaktionen auftreten können, etwa leichte Rötung, Abdrücke des Textils oder der Nähte des Anzugs sowie ein Gefühl von Leichtigkeit oder Müdigkeit am Ende.
4. Sie erklärt, dass die im Fragebogen gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und dass sie keinen für ihre Sicherheit erheblichen Umstand verschwiegen hat.
5. Sie verpflichtet sich, jede Änderung ihres Gesundheitszustands, ihrer Behandlung oder Medikation vor jeder neuen Sitzung mitzuteilen.
6. Sie verpflichtet sich, der Fachkraft während der Sitzung unverzüglich jeden Schmerz, jedes Unbehagen, jedes übermäßige Druckgefühl oder jede andere unangenehme Empfindung mitzuteilen.
7. Sie versteht, dass die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen, von individuellen Faktoren, von der Zahl der Sitzungen und von persönlichen Gewohnheiten abhängen und dass ihr kein bestimmtes Ergebnis und keine Umfangsreduzierung zugesichert wurde.
8. Sie hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen, und hat vor der Unterzeichnung auf alle eine Antwort erhalten.
9. Sie willigt frei in die Anwendung der Behandlung ein und weiß, dass sie die Einwilligung jederzeit widerrufen kann, ohne dies begründen zu müssen und ohne dass dies ihr Verhältnis zum Institut berührt.
10. Bei Zweifeln über ihren Gesundheitszustand verpflichtet sie sich, vor Erhalt der Sitzung eine vorherige schriftliche ärztliche Freigabe vorzulegen.

INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: das im Kopf genannte Institut. Zweck: Erbringung der kosmetischen Dienstleistung, Beurteilung der Eignung der Sitzungen und Führung der Behandlungshistorie. Rechtsgrundlage: die Einwilligung der anwendenden Person und die Durchführung des Dienstleistungsverhältnisses. Speicherdauer: für die Dauer der Beziehung zum Institut und danach für die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen. Empfänger: Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben, außer bei gesetzlicher Verpflichtung. Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit, schriftlich an das Institut zu richten; ferner kann eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden.

Unterschrift der anwendenden Person

Unterschrift der Fachkraft

Datum

Erfassen Sie jede Sitzung unmittelbar nach ihrem Ende. Die Historie erlaubt die Anpassung der Parameter des nächsten Besuchs, belegt die durchgeführte Nachverfolgung und dokumentiert jedes Vorkommnis.

Institut

Fachkraft

PRESOFIT PRO

C ANHANG C · KURZANLEITUNG FÜR DIE KABINE

Betriebsübersicht zum Aufbewahren neben dem Gerät. Sie ersetzt nicht die vollständige Lektüre der Anleitung.

Vor dem Beginn	Unterzeichnetes und geprüftes Beurteilungsformular · Hygienebeutel und Einweghose für jede Person
Montage	Zwei runde Anschlüsse mit der Positionsführung verbunden und Mutter fixiert
Start	Kabel an geerdete Steckdose · rückseitiger Schalter · Einschalttaster · Arbeitsbildschirm
Zonen	Direktzugriffe 1, 2 und 3+4 · Zonen 3 und 4 werden immer gemeinsam aktiviert
Kanäle	Nummerierung 1 bis 12 am Bildschirm · 9=13, 10=14, 11=15 und 12=16 · ein Kanal auf 00 bleibt geschlossen
Modi	A kombiniert · B Kanal für Kanal · C paarweise · D Aufbau und Verschiebung · E vollständiger Aufbau · F und G doppelter Verlauf · H alles gleichzeitig
Druck	Stufe 1: 75 mmHg · Stufe 2: 150 mmHg · Stufe 3: 225 mmHg · immer mit Stufe 1 beginnen
Zeiten	Sitzung von 10 bis 60 Minuten · Aufblasen je Kanal 0 bis 18 Sekunden in Schritten von 3 · Standardwert 10 Sekunden
Moduswechsel	Zyklus pausieren, bevor ein anderer Modus gewählt wird
Während der Sitzung	Ständiger Kontakt · nie unbeaufsichtigt · bei jedem Unbehagen stoppen
Vollständige Sitzung	üblich 30 bis 45 Minuten · 2 oder 3 Sitzungen pro Woche an abwechselnden Tagen
Am Ende	Zyklus stoppen · vollständige Entleerung abwarten · Anzug öffnen · reinigen und desinfizieren
Sicherung	Neben dem rückseitigen Netzanschluss · nur durch eine Sicherung gleicher Kenndaten und bei gezogenem Netzstecker ersetzen

GEFAHR

Bei Brandgeruch, ungewöhnlichen Geräuschen, Feuchtigkeit im Gerät oder sichtbaren Schäden: Zyklus stoppen, Gerät vom Netz trennen und den technischen Kundendienst kontaktieren. Gehäuse nicht öffnen.

D ABBILDUNGSVERZEICHNIS

01	Haupteinheit PRESOFIT PRO mit dem 8-Zoll-Touchscreen.	12
02	Seitenansicht der Einheit: Tischgehäuse mit rutschfesten Füßen.	12
03	Arbeitsbildschirm mit den von 1 bis 6 nummerierten Bedienbereichen.	13
04	Rückseite: Luftanschlüsse, Hauptschalter und Netzanschluss.	14
05	Körperanzug mit den von 1 bis 7 nummerierten Elementen.	14
06	Ausgebreiteter Körperanzug mit dem Haltegurt des Taillenbereichs.	15
07	Körperanzug und textile Schutzhülle.	16
08	Schlauchbündel und runde Anschlüsse des Anzugs.	16
09	Verbinden der runden Anschlüsse des Anzugs mit den Buchsen der Einheit.	17
10	Positionsführung: Öffnung des Anschlusses und Stift der Buchse.	18
11	Fixieren des Anschlusses durch Drehen der Rundmutter.	18
12	Seitliche Reißverschlussstreifen: drei Positionen zur Weitenverstellung.	19
13	Öffnen des mittleren Reißverschlusses zur Erweiterung des Anzugoberteils.	19
14	Detail des geöffneten oberen Mittelreißverschlusses.	20
15	Innenseite des Anzugs und Verstellklappe des oberen Bereichs.	20
16	Nummerierung der Kanäle des Anzugs von 1 bis 16 mit den Paaren des oberen Bereichs.	22
17	Einstellung der Aufblaszeit jedes Kanals. Kanäle mit 00 bleiben geschlossen.	25
18	Auf der Liege ausgebreiteter Anzug, bereit für den Kunden.	26
19	PRESOFIT PRO in der Kabine, mit der Einheit auf der Arbeitsplatte und dem Anzug auf der Liege.	29

PresoFit Pro

PRESOFIT PRO · IDMRTSE8

Professionelles Pressotherapiegerät für Kosmetik und Wohlbefinden. Nur für geschultes Personal.

VERTRIEB

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Alle Rechte vorbehalten.