

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000

Equipamento profissional de estética 3 em 1: pressoterapia sequencial, calor por infravermelhos e eletroestimulação — Modelo IDMRTSE4



Pressoterapia sequencial

10 câmaras de ar · 3 modos · 5 velocidades · pressão regulável



Calor por infravermelhos

5 zonas de aquecimento · 8 níveis de intensidade



Eletroestimulação

5 saídas independentes · 5 programas · 8 níveis



Manta corporal completa

Pés · pernas · cintura · braços, com módulos independentes

Índice

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 · Manual de instruções

01	Informação geral	03
02	Princípios de funcionamento	05
03	Aplicações estéticas	07
04	Contraindicações	08
05	Normas de segurança	10
06	Descrição do equipamento	12
07	Instalação e ligação	18
08	Funcionamento	20
09	Protocolo de tratamento	23
10	Colocação dos eletrodos	25
11	As sessões	26
12	Precauções durante o tratamento	27
13	Limpeza e manutenção	28
14	Resolução de problemas	29
15	Especificações técnicas	30
16	Garantia e assistência técnica	32
17	Eliminação do equipamento e da embalagem	35
A	Avaliação prévia e consentimento informado	36
B	Registo de sessões	39
C	Guia rápido de cabina	40
D	Índice de figuras	41

01 INFORMAÇÃO GERAL

O TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (modelo certificado ID MRTSE4) é um equipamento profissional 3 em 1 que combina pressoterapia sequencial por câmaras de ar, calor por infravermelhos e eletroestimulação de baixa frequência (ginástica passiva) numa única plataforma com conjunto têxtil corporal completo. A consola tem impressa a referência de fabrico IB-8108.

Descrição do equipamento

O sistema é composto por uma unidade principal sobre rodas com consola de comandos analógica e por uma manta corporal com módulos independentes para pés, pernas, cintura e braços. A unidade gere três tecnologias que podem ser aplicadas de forma combinada ou independente:

- **Pressoterapia:** 10 saídas de ar sob pressão (câmaras 0 a 9) com três modos de enchimento, cinco velocidades e regulação da intensidade da pressão.
- **Calor por infravermelhos:** cinco zonas de aquecimento (braços, cintura e pernas) com oito níveis de intensidade.
- **Eletroestimulação:** cinco saídas independentes com eléktrodos adesivos, cinco programas pré-configurados e oito níveis de intensidade.

Uso previsto e utilizadores

O equipamento destina-se a profissionais da estética e do bem-estar em cabine (centros de estética, spa, fisioestética). Deve ser utilizado exclusivamente por pessoal formado no seu manuseamento, após a leitura completa deste manual. Não se destina ao uso doméstico sem supervisão profissional. O TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 tem uma finalidade exclusivamente estética e de bem-estar: não é um produto sanitário nem se destina à prevenção, ao diagnóstico ou ao tratamento de qualquer patologia.

NOTA

Este equipamento não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Perante qualquer patologia, tratamento médico em curso ou dúvida sobre a adequação do tratamento, solicite autorização médica prévia antes de aplicar qualquer uma das funções.

Símbolos utilizados neste manual

Ao longo do documento são utilizados três níveis de aviso. Respeite-os em todos os momentos:

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
PERIGO	Risco para a segurança das pessoas ou de dano grave ao equipamento. O seu incumprimento pode provocar lesões.
ATENÇÃO	Situação que pode comprometer o resultado do tratamento ou a vida útil do equipamento.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
NOTA	Informação complementar ou recomendação de boas práticas.

02 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

2.1 A pressoterapia estética

A pressoterapia é uma técnica de estética profissional baseada na compressão pneumática controlada. A manta corporal incorpora câmaras de ar independentes que insuflam e desinsuflam seguindo ciclos programados de compressão e descompressão: a pressão avança de forma ordenada desde as zonas mais afastadas do tronco (os pés) até à cintura, ou no sentido inverso, segundo o modo selecionado.

Esta massagem de compressão sequencial ativa a circulação de retorno e favorece o movimento dos líquidos retidos, o que se traduz numa sensação imediata de leveza, especialmente nas pernas. A pressão, a velocidade de enchimento e o percurso das câmaras são reguláveis, de modo que a intensidade da massagem se adapta à sensibilidade e ao objetivo de cada cliente.

Em cabine, a pressoterapia utiliza-se com fins exclusivamente estéticos e de bem-estar: sensação de pernas cansadas, retenção ocasional de líquidos, apoio dos programas anticelulíticos e de remodelação da silhueta, e como complemento que potencia o resultado de outros tratamentos corporais e dos cosméticos aplicados.

2.2 Calor por infravermelhos

Os emissores de infravermelhos integrados na manta fornecem um calor suave e controlado que penetra no tecido, eleva a temperatura local e acelera a circulação sanguínea e o metabolismo da zona. O calor alivia a tensão muscular, relaxa a musculatura e favorece a absorção dos produtos cosméticos aplicados durante o tratamento.

2.3 Eletroestimulação de baixa frequência

O princípio da eletroestimulação é simples e respeita o funcionamento natural do corpo: os impulsos elétricos de baixa frequência reproduzem o sinal que o cérebro envia através das fibras nervosas quando ordena uma contração. O músculo não distingue entre uma contração voluntária e uma contração induzida pelo equipamento — o trabalho realizado é o mesmo —, e por isso esta técnica é conhecida como ginástica passiva.

Aplicadas através de elétrodos adesivos nos pontos corretos, as sequências de contração e relaxamento tonificam a musculatura, ativam a zona tratada e contribuem para os programas de remodelação corporal e refirmação, com especial rendimento em coxas, glúteos, abdómen e braços.

Durante a sessão, o cliente sente um ligeiro formigueiro acompanhado da contração do músculo. Nos níveis suaves a sensação é quase impercetível; nos programas de tonificação a contração é mais marcada, sempre dentro do intervalo de conforto indicado pelo próprio cliente.

2.4 Efeitos combinados

- **Remodelação da silhueta:** a combinação de pressão sequencial, calor e trabalho muscular passivo orienta-se para os programas de redução de volume e de melhoria do aspeto da celulite.
- **Refirmação:** a estimulação das terminações sensoriais da epiderme contribui para um aspeto mais firme e elástico da pele.

- **Relaxamento e bem-estar:** a massagem de ar e o calor infravermelho descarregam a musculatura e proporcionam uma sensação geral de descanso e de pernas leves.
- **Sinergia com cosméticos:** o calor e a ativação da zona favorecem o aproveitamento dos produtos aplicados antes da sessão.

03 APLICAÇÕES ESTÉTICAS

O TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 foi concebido para utilização em cabine com uma finalidade exclusivamente estética e de bem-estar. As suas principais aplicações são:

- Sensação de pernas cansadas e de peso após o dia de trabalho
 - Retenção ocasional de líquidos
 - Melhoria do aspeto da celulite e da pele casca de laranja
 - Programas de remodelação da silhueta e de redução de volume
 - Refirmação e melhoria do aspeto geral da pele
 - Tonificação muscular através de ginástica passiva
 - Sensação de leveza e descanso nas pernas
 - Preparação e fecho de outros tratamentos estéticos corporais
 - Maior aproveitamento dos cosméticos aplicados em cabine
 - Relaxamento e bem-estar geral
-

NOTA

Este equipamento não é um produto sanitário e não se destina à prevenção, ao diagnóstico nem ao tratamento de qualquer patologia. Se o cliente apresentar qualquer condição de saúde, estiver grávida ou seguir um tratamento médico, a avaliação cabe a um profissional de saúde antes de receber a sessão (ver as contraindicações da secção 4).

04 CONTRAINDICAÇÕES

PERIGO

Não aplique o tratamento a nenhuma pessoa incluída nos casos seguintes. Diante a mínima dúvida, exija relatório ou autorização médica por escrito antes da primeira sessão.

4.1 Contraindicações absolutas

- Tromboflebitides ou flebotromboses recentes (trombose venosa profunda)
- Varizes importantes ou tortuosas
- Infecções cutâneas ativas na zona de tratamento
- Linfangite
- Artrite inflamatória em fase aguda
- Descompensação cardiocirculatória
- Perturbações importantes da tensão arterial não controladas
- Enfarte do miocárdio recente
- Neoplasias (processos oncológicos ativos, salvo indicação médica expressa)
- Insuficiência cardíaca, respiratória ou renal importantes
- Inflamações agudas e processos febris ou infecciosos
- Gravidez
- Feridas abertas, queimaduras, dermatites ou lesões cutâneas na zona
- Insuficiência arterial periférica severa

4.2 Contraindicações relativas

Requerem avaliação individual e, se for caso disso, autorização médica prévia; aplique intensidades reduzidas e vigilância contínua:

- Pessoas sob tratamento médico ou em processo de diagnóstico
- Diabetes com neuropatia ou alterações da sensibilidade
- Alterações da sensibilidade cutânea ou térmica
- Hérnias abdominais ou inguinais (evite pressão abdominal)
- Menstruação (evite o programa abdominal se causar desconforto)
- Pós-operatórios sem alta médica definitiva
- Fragilidade capilar importante ou tendência para hematomas
- Idade avançada com patologia circulatória associada

4.3 Específicas da eletroestimulação

- Portadores de pacemaker, desfibriladores ou outros dispositivos eletrônicos implantados: **proibido**
- Epilepsia
- Não aplicar elétrodos sobre o tórax, a zona cardíaca, o peito, o pescoço (seio carotídeo, laringe) nem na cabeça
- Não aplicar sobre zonas com implantes metálicos (osteossíntese, próteses) situados sob os elétrodos
- Não aplicar sobre o abdômen em caso de hérnia ou cirurgia abdominal recente

- Pele irritada, lesionada ou com alterações da sensibilidade no ponto de colocação do adesivo

4.4 Específicas do calor por infravermelhos

- Clientes com problemas circulatorios: não é recomendável a utilização desta função
- Alterações da sensibilidade térmica (risco de queimadura sem perceção de calor excessivo)
- Fotossensibilidade ou medicação fotossensibilizante: avaliar e reduzir a intensidade
- Não aplicar calor sobre zonas com inflamação aguda, processos infecciosos ou traumatismos recentes

05 NORMAS DE SEGURANÇA

5.1 Segurança elétrica

- Ligue o equipamento unicamente a uma tomada com ligação à terra e com tensão coincidente com a indicada nas especificações (CA 110–220 V).
- Não desmonte o equipamento nem realize qualquer operação não indicada nestas instruções. Todas as reparações devem ser realizadas por pessoal técnico autorizado.
- Não utilize o equipamento perto de água nem com as mãos molhadas. Não verta líquidos sobre a unidade nem sobre a consola.
- Não modifique nem altere os cabos. Não coloque o equipamento onde alguém possa pisar o cabo de alimentação.
- Não introduza nenhum objeto no interior do equipamento: risco de incêndio ou choque elétrico. Se algo entrar acidentalmente no seu interior, desligue-o e contacte de imediato o serviço técnico.
- Retire o cabo de alimentação da tomada no final do dia de trabalho.
- Coloque o equipamento sobre uma superfície estável para que não possa danificar-se nem tombar.

PERIGO

Retire imediatamente a ficha da tomada elétrica se ocorrer qualquer uma destas situações:

- O equipamento molhou-se.
 - O equipamento liberta cheiro a queimado ou faz um ruído estranho.
 - O cabo está partido ou deteriorado.
 - O equipamento apresenta rutura ou danos visíveis.
-

5.2 Segurança durante a utilização

- Realize sempre uma anamnese prévia do cliente e descarte todas as contraindicações da secção 4.
- Ajuste as intensidades sempre de menos para mais, segundo as sensações que o cliente indique. O tratamento nunca deve ser doloroso.
- Mantenha comunicação constante com o cliente durante toda a sessão, em especial para verificar a temperatura dos infravermelhos.
- Não deixe o cliente sem supervisão durante o tratamento.
- Mantenha em pausa as funções que não se utilizem na sessão.
- Na função de infravermelhos, não selecione intensidades altas de forma prolongada: a natureza da pele de cada pessoa é diferente e existe risco de queimaduras.

5.3 Higiene

- Utilize sempre calças descartáveis de celulose específicas para este tipo de tratamento, para cada cliente.

- Se utilizar consumíveis não descartáveis, esterilize-os corretamente entre cliente e cliente.
- Limpe e desinfete os eletrodos e as superfícies da manta após cada sessão (ver secção 13).

06 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

6.1 Painel de controlo

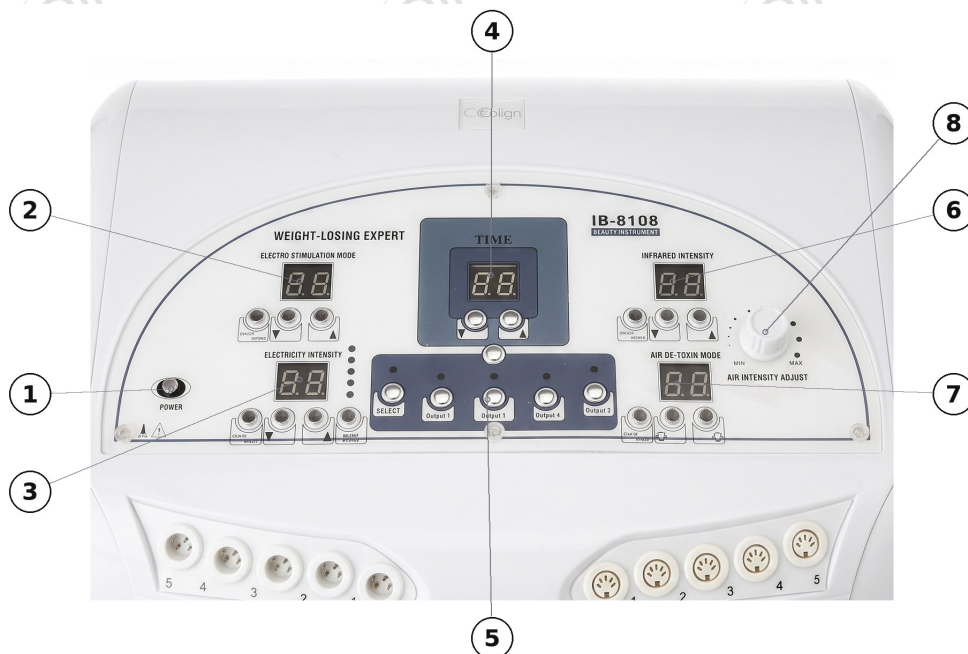


FIGURA 01 Zonas funcionais da consola de comandos do IB-8108.

- | | |
|---|---|
| ① Ligação geral da consola | ⑤ Arranque e paragem geral e seleção das cinco saídas corporais |
| ② Eletroestimulação: ecrã de modo e seleção do programa de trabalho | ⑥ Infravermelhos: ecrã de intensidade e ajuste do nível |
| ③ Eletroestimulação: ecrã de intensidade, botões de ajuste e seletor de saída | ⑦ Pressoterapia: ecrã do modo de enchimento, arranque e paragem, e velocidade |
| ④ Tempo de trabalho: ecrã e ajuste | ⑧ Roda de ajuste da intensidade da pressão de ar |

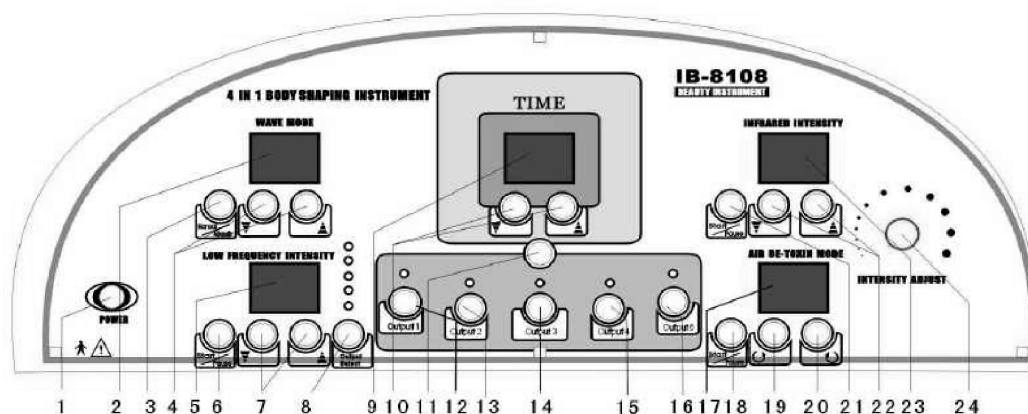


FIGURA 02 Consola de comandos do IB-8108 com os elementos numerados de 1 a 24.

- | | |
|---|---|
| ① Ligar | ⑫ Botão da saída do braço esquerdo |
| ② Visualização do modo de trabalho da eletroestimulação | ⑬ Botão da saída do braço direito |
| ③ Seleção do modo manual / automático da eletroestimulação | ⑭ Botão da saída da cintura |
| ④ Seleção do programa de trabalho da eletroestimulação | ⑮ Botão da saída da perna esquerda |
| ⑤ Ecrã de intensidade da eletroestimulação | ⑯ Botão da saída da perna direita |
| ⑥ Seletor de ligar/desligar da eletroestimulação | ⑰ Ecrã do programa de trabalho da pressoterapia |
| ⑦ Botões de ajuste da intensidade da eletroestimulação | ⑱ Arranque/paragem da função de pressoterapia |
| ⑧ Seletor de cada uma das 5 saídas de eletroestimulação | ⑲ Seleção do modo de enchimento de ar |
| ⑨ Ecrã de visualização do tempo de trabalho | ⑳ Ajuste da velocidade de enchimento (frequência) |
| ⑩ Ajuste do tempo de trabalho | ㉑ Arranque/paragem da função de infravermelhos |
| ⑪ Botão de arranque/paragem do funcionamento geral da máquina | ㉒ Ajuste da intensidade do calor por infravermelhos |
| | ㉓ Ecrã de visualização dos infravermelhos |
| | ㉔ Roda de ajuste da intensidade da pressão de ar |

6.2 Ligações frontais e traseiras



FIGURA 03 Conectores frontais: cinco saídas de eletroestimulação e cinco de infravermelhos, numeradas de 1 a 5.

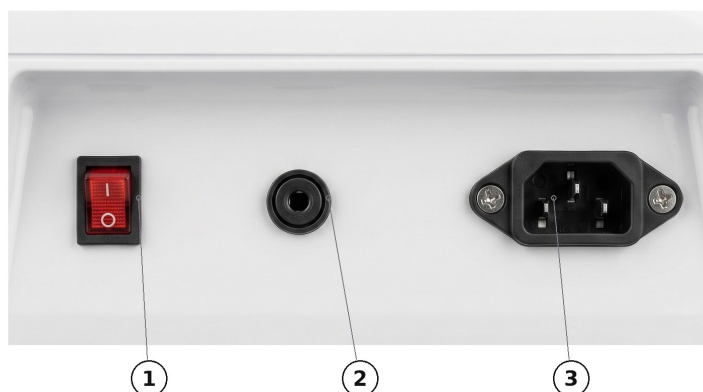


FIGURA 04 Parte traseira da unidade com os elementos numerados de 1 a 3.

- ① Interruptor geral de ligação
- ② Porta-fusíveis
- ③ Tomada de corrente para o cabo de alimentação

- **Frontal:** saídas numeradas de ar sob pressão e de aquecimento por infravermelhos, e conectores das 5 saídas de eletroestimulação.
- **Traseira:** tomada de corrente elétrica, porta-fusíveis e interruptor geral de ligar.

6.3 Manta de pressoterapia e acessórios

A manta corporal é composta por módulos independentes ligados à unidade através de tubos de ar e conectores de infravermelhos, todos eles numerados:



FIGURA 05 Fato modular estendido: cada câmara tem impressa a sua numeração com o prefixo L ou R consoante o lado do corpo.

MÓDULO	SAÍDA DE AR SOB PRESSÃO	SAÍDA DE INFRAVERMELHOS
Acessório de braço	8 / 9	1 / 2
Acessório de cintura	6 / 7	3
Acessórios de pernas	2 / 3 / 4 / 5	4 / 5
Acessório de pés	0 / 1	—
Manta base	—	—
Bolsa organizadora de tubos e cabos	—	—



FIGURA 06 Braço · câmaras 8 e 9



FIGURA 07 Perna · câmaras 2, 3, 4 e 5



FIGURA 08 Cintura · câmaras 6 e 7



FIGURA 09 Bota de pé · câmaras 0 e 1



FIGURA 10 Manta de base da marquesa com a bolsa incorporada para recolher os tubos e os cabos.

Cada câmara tem impressa a sua numeração com o prefixo L ou R para identificar o lado esquerdo e o direito do corpo (L-0 a L-9 e R-0 a R-9): o conjunto completo soma 20 câmaras de ar, dez de cada lado. Os tubos agrupam-se em três conectores múltiplos numerados 1, 2 e 3, e os módulos que incorporam aquecimento acrescentam o seu cabo de infravermelhos numerado de 1 a 5.

6.4 Conteúdo do conjunto

O equipamento é fornecido com os seguintes elementos:

- 1 unidade principal com consola de comandos
- 1 conjunto têxtil de trabalho
- 2 mangas de braço
- 1 cinto-cinta para abdómen e glúteos
- 2 pernas ajustáveis
- 2 botas de pé
- 1 manta de base
- 1 bolsa protetora e organizadora das mangueiras
- 5 cabos de placa para eletroestimulação
- 10 elétrodos grandes e 6 elétrodos pequenos
- 1 conjunto de bandas elásticas de fixação
- 1 cabo de alimentação e 2 fusíveis sobresselentes
- 1 manual de instruções



FIGURA 11 Unidade principal e conjunto completo de módulos do fato.

07 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

7.1 Localização do equipamento

- Coloque a unidade sobre uma superfície estável e nivelada, próxima da marquesa e de uma tomada com terra.
- Deixe espaço livre à volta do equipamento para a ventilação e para o percurso dos tubos sem tensões nem pisadelas.
- Evite ambientes húmidos, a proximidade de fontes de água e a luz solar direta.

7.2 Ligação dos tubos de ar

Ligue cada tubo de ar à saída com o número correto: todos os cabos e tubos têm a numeração correspondente para assegurar uma montagem correta (câmaras 0-9 segundo o módulo, ver a tabela da secção 6.3). Pressione o conector até encaixar. Para o retirar, pressione o ponto azul do conector e puxe suavemente.

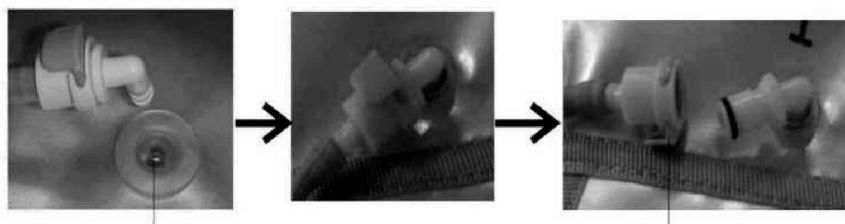


FIGURA 12 Ligação da pressão de ar: ligue aqui; para soltar, pressione o ponto azul do conector.

ATENÇÃO

Um tubo ligado a uma saída com numeração incorreta provocará um enchimento desordenado das câmaras e um tratamento ineficaz. Verifique a numeração de todos os tubos antes de cada sessão.

7.3 Ligação dos elétrodos de eletroestimulação

Ligue os cabos de eletroestimulação na parte frontal da máquina e os elétrodos aos pares (um positivo + um negativo) em cada um dos cabos. Cada adesivo une-se ao cabo através do seu clipe e aplica-se sobre a pele com as cintas elásticas de fixação. Aplique sempre gel condutor de base aquosa em cada adesivo antes de o colocar sobre a pele.



FIGURA 13 Kit de eletroestimulação: 10 elétrodos, cabos de ligação e cintas elásticas de fixação.



FIGURA 14 Elétrodo de placa com o seu cabo e o conector da saída de eletroestimulação.

7.4 Ligação do aquecimento por infravermelhos

Una os conectores de infravermelhos da manta com os cabos da unidade fazendo coincidir a sua numeração (zonas 1-5), e insira o conector na saída correspondente do equipamento até ao batente.



FIGURA 15 Ligação do circuito de aquecimento por infravermelhos.

08 FUNCIONAMENTO

8.1 Colocação em funcionamento

- 1 Ligue o cabo à tomada da rede elétrica.
- 2 Acione o interruptor de ligar situado na parte traseira da máquina.
- 3 Verifique que montou corretamente todos os tubos de ar e infravermelhos, tanto na máquina principal como em cada uma das partes que compõem a manta de pressoterapia (numeração correta).
- 4 Prima o botão POWER na consola principal (1).
- 5 Prima o botão n.º 11, que ativa o funcionamento geral da máquina.

8.2 Ajuste do tempo de trabalho

Ajuste o tempo de trabalho com o botão 10. O tempo mínimo é de 1 minuto e o máximo programável é de 60 minutos. De forma geral recomenda-se programar entre 30 e 60 minutos, segundo o objetivo do tratamento.

8.3 Função de infravermelhos

Com o botão 21 pode ativar ou desativar a função de infravermelhos. Se aparecer um ponto vermelho no ecrã de visualização (23), a função está ativa; premindo novamente o botão 21 desativa-se em qualquer momento e o ponto vermelho desaparece. Dispõe de oito níveis de intensidade ajustáveis com o comando 22, em função das necessidades de cada caso.

ATENÇÃO

Não é recomendável utilizar esta função em clientes com problemas circulatorios. Dado que a natureza da pele de cada pessoa é diferente, não selecione uma intensidade alta de forma prolongada para evitar queimaduras. Pauta recomendada: nível 8 no início e, quando o cliente sentir calor, baixar para o nível 5-6 e manter.

8.4 Função de pressoterapia (AIR DE-TOXIN MODE)

A ativação e desativação do enchimento realiza-se com o botão 18. Se aparecer um ponto vermelho no ecrã 17, a função está selecionada; se não se visualizar, a função não está ativa nesse momento. A máquina dispõe de 3 modos de enchimento do ar, selecionáveis com o botão 19:

Modo 1 — a pressão do ar exerce-se desde os pés até à cintura (sequência ascendente).

Modo 2 — a pressão do ar exerce-se desde a cintura até aos pés (sequência descendente).

Modo 3 — a pressão aplica-se em todas as câmaras ao mesmo tempo (função bombagem).

Com o botão 20 seleciona-se a velocidade de enchimento das câmaras de ar (5 níveis) e com a roda 24 ajusta-se a intensidade da pressão de ar. Os botões 12 a 16 permitem ativar ou excluir cada saída corporal (braço esquerdo, braço direito, cintura, perna esquerda e perna direita).

Velocidades de enchimento

Nível 1 — muito rápido

Nível 2 — rápido

Nível 3 — intermédio

Nível 4 — lento

Nível 5 — muito lento

NOTA

Como medida de higiene, recomenda-se sempre a utilização de calças de celulose específicas para este tipo de tratamento, para cada cliente.

8.5 Função de eletroestimulação

Para que esta função esteja ativa, no ecrã 4 deve visualizar-se um ponto vermelho; pode desativá-la com o botão 6 (o ponto vermelho desaparecerá). Assegure-se de ter ligado os cabos na parte frontal e os elétrodos aos pares (positivo + negativo). Selecione o programa de trabalho com os botões 3 e 4 e visualize-o no ecrã 2. A máquina dispõe de 5 programas pré-configurados:

Programa 1 — base dos programas de silhueta e de redução de volume; adequado a qualquer zona corporal.

Programa 2 — trabalho localizado, pensado para as zonas de maior resistência dentro dos programas de remodelação.

Programa 3 — orientado para a melhoria do aspeto da celulite e da pele de laranja.

Programa 4 — ativa a circulação de retorno e favorece a drenagem estética, com sensação de leveza na zona.

Programa 5 — relaxante; ajuda a descontraír e a soltar a musculatura.

Selecione ainda o modo de trabalho com o botão 2: se aparecer um ponto vermelho no ecrã 2, o funcionamento é automático (a máquina passa de um programa para outro); se não houver ponto vermelho, a seleção é manual, com o programa escolhido previamente.

Com o botão 8 percorra uma a uma as 5 saídas de eletroestimulação: cada vez que o premir, a luz vermelha desloca-se pelos pilotos situados acima do botão. Configure de forma independente a intensidade de cada saída com os botões 7, adequando-a à sensibilidade do cliente. A máquina dispõe de 8 níveis de intensidade.

Quanto maior é a intensidade aplicada, maior é o número de fibras musculares que participam em cada contração. Trabalhe sempre no nível mais alto que resulte confortável para o cliente, subindo de forma progressiva ao longo da sessão e sem alcançar em caso algum o limiar da dor: a sensação normal é um formigueiro acompanhado da contração, não um incômodo.

8.6 Videotutoriais

O fabricante disponibiliza videotutoriais de utilização do equipamento nos seguintes idiomas:

Espanhol — <https://www.youtube.com/watch?v=ox-nc-CfXek>

Italiano — <https://www.youtube.com/watch?v=ZHh9BbdT4ls>

Português — <https://youtu.be/56njBsH90sc>

09 PROTOCOLO DE TRATAMENTO

Sequência de trabalho recomendada para uma sessão completa de remodelação corporal:



FIGURA 16 Colocação da cinta de cintura e abdômen no cliente, com os elétrodos já posicionados.

- 1 Acomode o cliente numa marquesa.
- 2 Coloque-lhe calças especiais para pressoterapia (celulose descartável) ou similar.
- 3 Realize uma massagem prévia durante 15–20 minutos. O efeito será melhor se utilizar cosméticos específicos para o objetivo do tratamento.
- 4 Coloque cada um dos acessórios da manta de pressoterapia e feche os módulos.
- 5 Ligue a máquina com o botão de ligar e verifique que a função de pressoterapia está ativa (ponto vermelho no ecrã 17). Pare a eletroestimulação e o aquecimento por infravermelhos se não forem utilizados nesta fase.
- 6 Selecione o tempo de trabalho e ajuste a pressão do ar e o modo de enchimento segundo as condições particulares de cada cliente. Sessão de pressoterapia: 15–30 minutos.
- 7 Se desejar, ative a função de aquecimento por infravermelhos com a pauta da secção 8.3.
- 8 Terminada a pressoterapia, pode realizar uma sessão de eletroestimulação durante cerca de 10 minutos. Escolha o modo manual ou automático (com a luz vermelha no ecrã 2, o modo é automático).

- 9 Coloque os elétrodos adesivos sempre com gel condutor de base aquosa e no início e no final do músculo, para evitar lesões (ver secção 10).
- 10 O tratamento completo pode durar até 90 minutos.

NOTA

Quando a pressoterapia for utilizada dentro de um tratamento combinado, aplique-a no final da sessão, depois dos outros métodos empregues.

10 COLOCAÇÃO DOS ELÉTRODOS

Os esquemas seguintes provêm da documentação original do fabricante e indicam os pontos de colocação dos adesivos aos pares (cada número e o seu par com apóstrofo formam um circuito). Os adesivos situam-se sobre os pontos motores do músculo, onde o sinal se canaliza com maior rendimento:

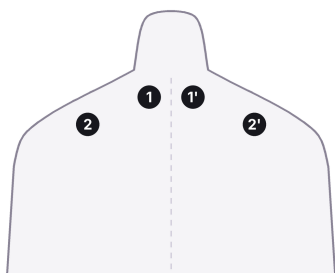


FIGURA 17 Ombro e pescoço. Função: ativar e descarregar a zona.

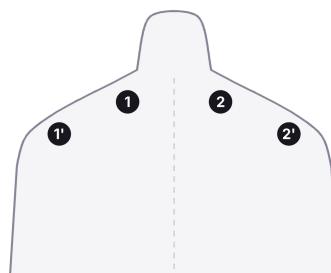


FIGURA 18 Ombro e braço. Função: ativar e tonificar a zona.

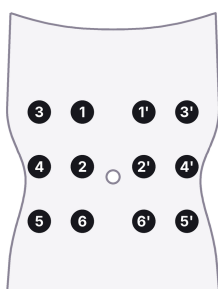


FIGURA 19 Abdômen. Função: tonificar a zona dentro dos programas de silhueta.

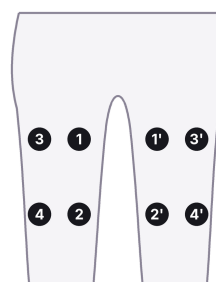


FIGURA 20 Coxas. Função: tonificar a zona dentro dos programas de silhueta.

ATENÇÃO

Coloque os elétrodos sempre aos pares (positivo + negativo) e com gel condutor de base aquosa, no início e no final do músculo; nunca sobre osso, articulações, tórax ou pescoço, e nunca cruzando um mesmo circuito entre a parte da frente e a parte de trás do corpo. Introduza os adesivos nas cintas de fixação previamente colocadas no cliente e verifique o contacto completo com a pele.

NOTA

Utilize exclusivamente gel condutor de base aquosa: garante a transmissão correta do impulso, protege a pele e prolonga a vida útil dos adesivos. Pode adquiri-lo em sunmarket.es.

11 AS SESSÕES

Com finalidade estética, as sessões de pressoterapia duram aproximadamente 30–45 minutos, segundo o objetivo de trabalho e a sensibilidade de cada cliente. O temporizador do equipamento permite programar até 60 minutos.

Quanto à frequência, como medida geral costumam praticar-se 2–3 sessões por semana, embora em alguns casos concretos se possa chegar a uma sessão diária.

Quando a pressoterapia é utilizada dentro de um tratamento combinado, aplica-se no final da sessão, depois dos outros métodos empregues.

12 PRECAUÇÕES DURANTE O TRATAMENTO

- 1 Utilize sempre gel condutor de base aquosa nos elétrodos adesivos da ginástica passiva para obter melhores resultados. Ajuste a intensidade segundo as sensações que o cliente indique, sempre de menos para mais gradualmente. Se houver sensação de dor, verifique que o adesivo se encontra em perfeito contacto com a pele.
- 2 Na função de infravermelhos, estabeleça o nível 8 no início do tratamento e, assim que o cliente sinta calor, diminua o nível para 5 ou 6 e mantenha essa temperatura.
- 3 Durante todo o tratamento, comunique com o cliente a fim de verificar a temperatura e poder fazer o ajuste correspondente.
- 4 Durante o tratamento, coloque a máquina em pausa nas funções que não se realizem nessa sessão.
- 5 Utilize sempre calças descartáveis ou esterilize corretamente o consumível que utilizar para cada cliente.

13 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

13.1 Limpeza após cada sessão

- Desligue o equipamento da rede antes de qualquer limpeza.
- Limpe a superfície da manta e dos módulos com um pano suave humedecido em água ou num desinfetante não agressivo; seque completamente antes de guardar. Não mergulhe nenhum componente.
- Limpe os elétrodos adesivos retirando os restos de gel condutor e desinfete-os; substitua-os quando perderem aderência.
- Limpe a consola e a carcaça com um pano seco ou ligeiramente humedecido; nunca com líquidos vertidos diretamente.

13.2 Manutenção periódica

- Reveja o estado de tubos e conectores: sem dobras permanentes, fissuras nem fugas de ar. Substitua qualquer tubo danificado por peça original.
- Verifique o cabo de alimentação e os cabos dos elétrodos; se apresentarem danos, não utilize o equipamento e solicite peça original.
- Guarde a manta estendida ou dobrada sem ângulos forçados, em local seco e protegido do sol.
- O fusível encontra-se junto à tomada de corrente traseira; substitua-o unicamente por outro com as mesmas características e com o equipamento desligado da tomada.
- Qualquer outra intervenção corresponde em exclusivo ao serviço técnico autorizado.

14 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar o serviço técnico, verifique os pontos seguintes:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O equipamento não liga	Cabo mal ligado; interruptor traseiro desligado; fusível fundido	Reveja o cabo e a tomada com terra; acione o interruptor traseiro; substitua o fusível por outro idêntico
Uma câmara não insufla	Tubo ligado a um número incorreto; conector não encaixado; tubo dobrado	Verifique a numeração, pressione o conector até ao batente e elimine dobras do tubo
A pressão é fraca	Velocidade ou intensidade baixas; fuga num conector	Suba a velocidade (botão 20) e a pressão (roda 24); reveja o encaixe dos conectores
Não há calor de infravermelhos	Função desativada (sem ponto vermelho em 23); conector IV solto; nível baixo	Ative com o botão 21; encaixe o conector de IV; suba o nível com o comando 22
Não se sente a eletroestimulação	Função desativada (sem ponto vermelho em 4); saída sem configurar; falta de gel; adesivo sem contacto	Ative com o botão 6; configure cada saída com o botão 8; aplique gel condutor e verifique o contacto do adesivo
A estimulação é incômoda	Intensidade excessiva; adesivo parcialmente descolado	Baixe a intensidade e recoloque o adesivo com contacto completo

PERIGO

Se o problema persistir, ou perante cheiro a queimado, ruídos anómalos, humidade no equipamento ou danos visíveis, desligue imediatamente o equipamento da rede e contacte o serviço técnico. Não abra a carcaça: todas as reparações devem ser realizadas por pessoal técnico autorizado.

15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo certificado	IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · 8432729013696
Referência na consola	IB-8108
Funções	Pressoterapia · Calor por infravermelhos · Eletroestimulação (3 em 1 com conjunto têxtil)
Fonte de alimentação	220 V. Compatibilidade indicada pelo fabricante: CA 110 / 220 / 230 / 240 V
Frequência	50 – 60 Hz
Potência	350 W
Proteção elétrica	Interruptor geral e porta-fusíveis na parte traseira · são fornecidos 2 fusíveis sobresselentes
Pressoterapia	20 câmaras de ar · 10 setores de pressão numerados (0 – 9) · 3 modos de enchimento · 5 velocidades
Distribuição das câmaras	Abdómen 4 · pernas 4 × 2 · braços 4 × 2 · pés 2 × 2
Pressão de ar	0 – 150 mmHg ($\pm 10\%$). O manual do fabricante indica ainda 20 / 80 / 120 mmHg e 0,10 / 0,22 / 0,32 bar
Infravermelhos	5 zonas (braços 1/2 · cintura 3 · pernas 4/5) · intensidade de 1 a 8
Eletroestimulação	5 canais independentes · 5 programas · intensidade de 1 a 8 · modo manual ou automático
Temporizador	1 – 60 minutos
Dimensões da unidade principal	103 × 55 × 46 cm (99 × 43 × 38 cm segundo a ficha comercial)
Dimensões do conjunto têxtil dobrado	91 × 46 × 12 cm
Peso	Unidade principal 29 kg · conjunto têxtil 6,6 kg · peso bruto 36 kg
Classe de eficiência energética	C

Conformidade

O equipamento dispõe de marcação CE. O fabricante emitiu a declaração UE de conformidade do modelo certificado IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (8432729013696), que indica as diretivas e as normas harmonizadas seguintes:

CE · Compatibilidade eletromagnética	Diretiva 2014/30/UE
Normas aplicadas · EMC	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Baixa tensão	Diretiva 2014/35/UE
Normas aplicadas · Baixa tensão	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Diretiva 2011/65/UE
Normas aplicadas · RoHS	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC 62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC 62321-8:2017

NOTA

A declaração UE de conformidade original, assinada pelo fabricante, está disponível através do distribuidor. Indique a referência do modelo certificado ao solicitá-la.

O fabricante reserva-se o direito de modificar a informação contida neste manual, bem como as características e componentes do produto, sem aviso prévio. Alguns componentes podem diferir das imagens mostradas.

16 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O equipamento é fornecido com garantia comercial do distribuidor. A unidade principal e o conjunto têxtil têm prazos diferentes, porque as peças do fato estão sujeitas ao desgaste próprio da utilização contínua em cabina.

16.1 Cobertura

ELEMENTO	GARANTIA	OBSERVAÇÕES
Unidade principal: eletrónica de controlo, compressor, consola de comandos e estrutura	3 anos	A partir da data da fatura de compra
Fato modular: módulos de braço e de perna, cinta de cintura e botas de pé	1 ano	Peças sujeitas a desgaste pela utilização em cabina, consideradas consumíveis
Manta de base da marquesa e bolsa organizadora	1 ano	Mesmo regime do restante conjunto têxtil
Tubos de ar, conectores e cabos de infravermelhos	1 ano	Substituição por peça original
Eléktrodo, cintas elásticas e gel condutor	Não cobertos	Consumíveis de reposição periódica

O prazo conta-se a partir da data da fatura de compra e abrange o comprador profissional nela identificado. Esta garantia comercial entende-se sem prejuízo dos direitos que a legislação aplicável reconheça ao comprador.

16.2 O que cobre

- Defeitos de fabrico e de materiais que impeçam o funcionamento normal do equipamento.
- Falhas da eletrónica de controlo, do compressor e da consola de comandos dentro do prazo indicado.
- Fugas de ar em tubos, conectores e câmaras atribuíveis a um defeito de origem.
- Mão de obra e peças de substituição originais necessárias à reparação.
- Diagnóstico prévio e assistência telefónica do serviço técnico.

16.3 O que não cobre

- O desgaste normal das peças do fato, das cintas, dos eléctrodo e do gel condutor.
- Roturas, cortes, perfurações ou queimaduras do material têxtil ocorridas durante a utilização.
- Danos resultantes de uma tensão de rede diferente da indicada na placa de características ou de instalações sem ligação à terra.
- Danos por pancadas, quedas, transporte inadequado ou armazenamento em ambientes húmidos.
- Danos por líquidos, cosméticos ou desinfetantes derramados sobre a unidade ou introduzidos nas peças.

- Avarias provocadas por manipulação, desmontagem ou reparação efetuada por pessoal não autorizado.
- Utilização do equipamento com acessórios ou peças que não sejam originais.
- Utilização não profissional, utilização contrária a este manual ou incumprimento das contraindicações e das orientações de tempo, pressão e temperatura.
- Consumíveis e trabalhos de limpeza e manutenção periódica descritos na secção 13.
- Danos estéticos que não afetem o funcionamento do equipamento.

ATENÇÃO

A abertura da estrutura, a substituição de componentes internos ou qualquer intervenção realizada por pessoal não autorizado anulam imediatamente a garantia. A substituição do fusível e as tarefas de limpeza descritas na secção 13 são as únicas operações que competem ao utilizador.

16.4 Como participar uma avaria

- 1 Pare o equipamento, desligue-o da rede e não continue a utilizá-lo.
- 2 Consulte primeiro a secção 14: grande parte das ocorrências resolve-se verificando a numeração dos tubos, o encaixe dos conectores ou a ativação da saída no ecrã.
- 3 Reúna o número de série da placa de características e a data e o número da fatura de compra.
- 4 Descreva a falha com o maior detalhe possível: função afetada, momento em que surge e comportamento observado.
- 5 Junte fotografias ou um vídeo breve do problema e da placa de características.
- 6 Contacte a assistência técnica do distribuidor por telefone, correio eletrónico ou WhatsApp.
- 7 Conserve a embalagem original ou uma equivalente: é imprescindível para um transporte seguro caso a unidade tenha de ser recolhida.
- 8 Não envie o equipamento sem ter acordado previamente a recolha com a assistência técnica.

16.5 Assistência técnica, formação e equipamento de substituição

O distribuidor mantém assistência técnica própria com peças originais e acompanha o centro durante toda a vida útil do equipamento:

- Assistência telefónica e por WhatsApp para esclarecer dúvidas de utilização e de montagem do fato.
- Formação sobre a utilização do equipamento, por telefone ou nas instalações do distribuidor.
- Disponibilidade de equipamento de substituição durante a reparação, segundo as condições em vigor no momento da ocorrência.
- Peças originais de módulos, tubos, conectores, elétrodos e gel condutor.
- Atualizações desta documentação.

16.6 Dados da unidade

Registe aqui os dados do seu equipamento logo que o receba. A placa de características encontra-se na parte traseira da unidade, junto ao interruptor geral, e o número de série é o primeiro dado solicitado pela assistência técnica.

Modelo

Número de série

Data de compra

Número da fatura

Distribuidor e contacto

17 ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DA EMBALAGEM

No fim da sua vida útil, o equipamento e os seus acessórios devem ser retirados separadamente dos restantes resíduos.

17.1 Equipamento elétrico

- Não coloque a unidade no contentor de resíduos domésticos nem no de resíduos comerciais gerais.
- Entregue-a num ponto autorizado de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou ao distribuidor ao adquirir um equipamento equivalente.
- Desligue e retire o cabo de alimentação antes da entrega.
- A recolha separada permite recuperar os materiais aproveitáveis e evita que os componentes eletrónicos acabem no fluxo geral de resíduos.

17.2 Fato, acessórios e embalagem

- Separe o cartão da embalagem e coloque-o no contentor de papel e cartão.
- Coloque os plásticos de proteção no contentor correspondente.
- As peças, tubos, cabos e elétrodos fora de uso são geridos como resíduo não reciclável, salvo indicação diferente da legislação local.
- Os restos de gel condutor e as embalagens vazias seguem as indicações do respetivo rótulo.

NOTA

Consulte sempre as regras de recolha em vigor no seu município: a classificação e os pontos de entrega podem variar.

A ANEXO A · AVALIAÇÃO PRÉVIA E CONSENTIMENTO INFORMADO

Este anexo reúne num único documento imprimível a avaliação prévia da pessoa utilizadora e o seu consentimento informado para as três tecnologias do equipamento. Preencha e assine um exemplar antes da primeira sessão e reveja o questionário em cada nova visita.

NOTA

Modelo orientativo. Adapte-o aos dados e aos procedimentos do seu centro e reveja-o com a sua assessoria jurídica antes de o utilizar: a Sunmarket Wellness não presta aconselhamento jurídico e a responsabilidade pelo documento efetivamente utilizado cabe ao centro.

DADOS DO CENTRO E DA PESSOA UTILIZADORA

Centro _____ Profissional responsável _____

Nome completo _____

Documento de identificação _____ Data de nascimento _____

Telefone _____ Correio eletrónico _____

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA

Assinale a casa que corresponde em cada linha. O questionário é preenchido pela pessoa utilizadora com o apoio do profissional.

BLOCO A · SITUAÇÕES QUE IMPEDEM A SESSÃO	SIM	NÃO
Gravidez ou suspeita de gravidez	☐	☐
Pacemaker, desfibrilhador ou outro dispositivo eletrónico implantado	☐	☐
Epilepsia	☐	☐
Trombose venosa profunda, tromboflebite ou flebotrombose recentes	☐	☐
Varizes importantes ou tortuosas	☐	☐
Afeção cardíaca ou enfarte do miocárdio recente	☐	☐
Insuficiência cardíaca, respiratória ou renal	☐	☐
Tensão arterial não controlada	☐	☐
Processo oncológico ativo	☐	☐
Febre, infeção ativa ou inflamação aguda	☐	☐
Infeção cutânea, ferida aberta, queimadura ou dermatite na zona de trabalho	☐	☐

BLOCO A · SITUAÇÕES QUE IMPEDEM A SESSÃO	SIM	NÃO
Linfangite	☐	☐
Artrite inflamatória em fase aguda	☐	☐
Hérnia abdominal ou inguinal	☐	☐
Descolamento da retina	☐	☐
Processo hemorrágico ativo	☐	☐
Pessoa com menos de 18 anos	☐	☐

PERIGO

Uma única resposta afirmativa no bloco A impede a realização da sessão. Não aplique nenhuma das três tecnologias enquanto a situação se mantiver e encaminhe a pessoa utilizadora para o seu profissional de saúde.

BLOCO B · SITUAÇÕES QUE EXIGEM AVALIAÇÃO	SIM	NÃO
Tratamento médico em curso ou processo de diagnóstico em aberto	☐	☐
Diabetes com neuropatia ou alteração da sensibilidade	☐	☐
Alteração da sensibilidade cutânea ou térmica	☐	☐
Pele muito fina, hipersensível ou fragilidade capilar importante	☐	☐
Cirurgia recente sem alta médica definitiva	☐	☐
Implantes metálicos na zona onde seriam colocados os eletrodos	☐	☐
Medicação fotossensibilizante	☐	☐
Menstruação, se estiver previsto trabalho abdominal	☐	☐
Idade avançada com patologia circulatória associada	☐	☐
Tendência para hematomas ou para marcar com facilidade	☐	☐

Uma resposta afirmativa no bloco B não impede necessariamente a sessão, mas exige avaliação individual, intensidades reduzidas, vigilância contínua e, quando aplicável, autorização médica prévia por escrito.

TECNOLOGIAS PREVISTAS

- ☐ Pressoterapia por compressão pneumática
- ☐ Calor por infravermelhos longínquos
- ☐ Eletroestimulação EMS

☐ Zonas corporais previstas:

DECLARAÇÃO E CONSENTIMENTO

A pessoa utilizadora declara e aceita o seguinte:

1. Foi informada de que o tratamento tem uma finalidade exclusivamente estética e de bem-estar, que não constitui um ato médico e que não substitui qualquer avaliação, diagnóstico ou tratamento de saúde.
2. Foram-lhe explicadas as três tecnologias do equipamento e as sensações normais de cada uma: compressão progressiva das câmaras de ar, calor suave e envolvente nas zonas ativas e formigueiro acompanhado de contração muscular na eletroestimulação.
3. Foi informada de que podem surgir reações transitórias como vermelhidão, sensação de calor durante algum tempo, marcas ligeiras das peças ou das cintas e ligeiro formigueiro residual.
4. Declara que a informação prestada no questionário é verdadeira e completa e que não omitiu qualquer circunstância relevante para a sua segurança.
5. Compromete-se a comunicar qualquer alteração do seu estado de saúde, tratamento ou medicação antes de cada nova sessão.
6. Compromete-se a comunicar de imediato ao profissional qualquer dor, incómodo, sensação excessiva de calor ou qualquer outra sensação desagradável durante a sessão.
7. Compreende que os resultados são variáveis, que dependem de fatores individuais, do número de sessões e dos hábitos pessoais, e que não lhe foi garantido qualquer resultado concreto nem qualquer redução de medidas.
8. Teve oportunidade de colocar questões e recebeu resposta a todas elas antes de assinar.
9. Consente livremente a aplicação das tecnologias assinaladas neste documento e sabe que pode revogar o consentimento a qualquer momento, sem necessidade de o justificar e sem que isso afete a sua relação com o centro.
10. Em caso de dúvida sobre o seu estado de saúde, compromete-se a apresentar autorização médica prévia por escrito antes de receber a sessão.

PROTEÇÃO DE DADOS

Responsável pelo tratamento dos dados: o centro indicado no cabeçalho. Finalidade: gerir a prestação do serviço estético, avaliar a adequação das sessões e manter o histórico de tratamentos. Base jurídica: o consentimento da pessoa utilizadora e a execução da relação de serviço. Conservação: durante a relação com o centro e, posteriormente, pelos prazos legalmente exigíveis. Destinatários: não são cedidos dados a terceiros salvo obrigação legal. Direitos: acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade, mediante pedido escrito ao centro; pode ainda apresentar reclamação junto da autoridade de controlo competente.

Assinatura da pessoa utilizadora

Assinatura do profissional

Data

B ANEXO B · REGISTO DE SESSÕES

Registre cada sessão ao terminá-la. O histórico permite ajustar os parâmetros da visita seguinte, comprova o acompanhamento realizado e documenta qualquer ocorrência.

Nome completo

Centro

Profissional responsável[illegible]

Conserve este registo junto da ficha de avaliação prévia de cada pessoa utilizadora e atualize-o em cada visita.

C ANEXO C · GUIA RÁPIDO DE CABINA

Resumo operacional para ter junto ao equipamento. Não substitui a leitura completa do manual.

Antes de começar	Ficha de avaliação prévia assinada e revista · calças descartáveis para cada pessoa
Montagem	Tubos 0 a 9 e conectores de infravermelhos 1 a 5 no respetivo número · verificar o encaixe antes de cada sessão
Arranque	Cabo em tomada com ligação à terra · interruptor traseiro · botão POWER · botão 11 de funcionamento geral
Pressoterapia	Modo de enchimento 1, 2 ou 3 · pressão de menos para mais com a roda 24 · tempo até 60 minutos
Infravermelhos	Nível 8 no início e baixar para 5 ou 6 assim que sentir calor · nunca as peças a aquecer vazias
Eletroestimulação	Gel condutor de base aquosa · elétrodos aos pares · no início e no fim do músculo · nunca no tórax, pescoço ou cabeça
Durante a sessão	Comunicação constante · nunca sem supervisão · funções não utilizadas em pausa
Sessão completa	Pressoterapia 15 a 30 minutos · eletroestimulação cerca de 10 minutos · tratamento completo até 90 minutos
Frequência	2 ou 3 sessões por semana, em dias alternados
No final	Parar as funções · abrir as peças para dissiparem o calor · limpar elétrodos e superfícies
Perante qualquer incómodo	Baixar a intensidade ou parar a função e desligar o equipamento se necessário
Fusível	Junto à tomada de corrente traseira · substituir apenas por outro com as mesmas características e com o equipamento desligado

PERIGO

Perante cheiro a queimado, ruídos anómalos, humidade no equipamento ou danos visíveis: pare todas as funções, desligue o equipamento da rede e contacte a assistência técnica. Não abra a estrutura.

D ÍNDICE DE FIGURAS

01	Zonas funcionais da consola de comandos do IB-8108.	12
02	Consola de comandos do IB-8108 com os elementos numerados de 1 a 24.	13
03	Conectores frontais: cinco saídas de eletroestimulação e cinco de infravermelhos, numeradas de 1 a 5.	14
04	Parte traseira da unidade com os elementos numerados de 1 a 3.	14
05	Fato modular estendido: cada câmara tem impressa a sua numeração com o prefixo L ou R consoante o lado do corpo.	15
06	Braço · câmaras 8 e 9	16
07	Perna · câmaras 2, 3, 4 e 5	16
08	Cintura · câmaras 6 e 7	16
09	Bota de pé · câmaras 0 e 1	16
10	Manta de base da marquesa com a bolsa incorporada para recolher os tubos e os cabos.	16
11	Unidade principal e conjunto completo de módulos do fato.	17
12	Ligação da pressão de ar: ligue aqui; para soltar, pressione o ponto azul do conector.	18
13	Kit de eletroestimulação: 10 elétrodo, cabos de ligação e cintas elásticas de fixação.	19
14	Elétrodo de placa com o seu cabo e o conector da saída de eletroestimulação.	19
15	Ligação do circuito de aquecimento por infravermelhos.	19
16	Colocação da cinta de cintura e abdómen no cliente, com os elétrodo já posicionados.	23
17	Ombro e pescoço. Função: ativar e descarregar a zona.	25
18	Ombro e braço. Função: ativar e tonificar a zona.	25
19	Abdómen. Função: tonificar a zona dentro dos programas de silhueta.	25
20	Coxas. Função: tonificar a zona dentro dos programas de silhueta.	25



TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · IDMRTSE4

Equipamento profissional para estética e bem-estar. Uso exclusivo por pessoal formado.

D I S T R I B U I D O R

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Todos os direitos reservados.