

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000

Professionelles 3-in-1-Kosmetikgerät: sequenzielle Pressotherapie, Infrarotwärme und Elektrostimulation — Modell IDMRTSE4



Sequenzielle Pressotherapie

10 Luftkammern · 3
Modi · 5
Geschwindigkeiten ·
regulierbarer Druck



Infrarotwärme

5 Heizzonen · 8
Intensitätsstufen



Elektrostimulation

5 unabhängige
Ausgänge · 5
Programme · 8 Stufen



Komplette Körpermanschette

Füße · Beine · Taille ·
Arme, mit
unabhängigen
Modulen

Inhaltsverzeichnis

TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 · Bedienungsanleitung

01	Allgemeine Informationen	03
02	Funktionsprinzipien	05
03	Kosmetische Anwendungen	07
04	Gegenanzeigen	08
05	Sicherheitsvorschriften	10
06	Beschreibung des Geräts	12
07	Installation und Anschluss	18
08	Bedienung	20
09	Behandlungsprotokoll	23
10	Platzierung der Elektroden	25
11	Die Sitzungen	27
12	Vorsichtsmaßnahmen während der Behandlung	28
13	Reinigung und Wartung	29
14	Fehlerbehebung	30
15	Technische Daten	31
16	Garantie und technischer Kundendienst	33
17	Entsorgung des Geräts und der Verpackung	36
A	Vorabbeurteilung und Einwilligungserklärung	37
B	Sitzungsprotokoll	41
C	Kurzanleitung für die Kabine	42
D	Abbildungsverzeichnis	43

01 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (zertifiziertes Modell IDMRTSE4) ist ein professionelles 3-in-1-Gerät, das sequenzielle Pressotherapie mit Luftkammern, Infrarotwärme und niederfrequente Elektrostimulation (passive Gymnastik) auf einer einzigen Plattform mit vollständigem Körpertextilsatz vereint. Auf der Konsole ist die Fertigungsreferenz IB-8108 aufgedruckt.

Beschreibung des Geräts

Das System besteht aus einer fahrbaren Haupteinheit mit analoger Bedienkonsole und einer Körpermanschette mit unabhängigen Modulen für Füße, Beine, Taille und Arme. Die Einheit steuert drei Technologien, die kombiniert oder unabhängig voneinander angewendet werden können:

- **Pressotherapie:** 10 Druckluftausgänge (Kammern 0 bis 9) mit drei Füllmodi, fünf Geschwindigkeiten und regulierbarer Druckintensität.
- **Infrarotwärme:** fünf Heizzonen (Arme, Taille und Beine) mit acht Intensitätsstufen.
- **Elektrostimulation:** fünf unabhängige Ausgänge mit Klebeelektroden, fünf vorkonfigurierten Programmen und acht Intensitätsstufen.

Bestimmungsgemäße Verwendung und Anwender

Das Gerät ist für Fachkräfte aus Kosmetik und Wellness in der Kabine bestimmt (Kosmetikstudios, Spas, Physioästhetik). Es darf ausschließlich von Personal verwendet werden, das in seiner Bedienung geschult ist und diese Anleitung vollständig gelesen hat. Es ist nicht für den häuslichen Gebrauch ohne professionelle Aufsicht bestimmt. Der TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 hat einen ausschließlich kosmetischen und Wellness-Zweck: Er ist kein Medizinprodukt und nicht zur Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung irgendeiner Erkrankung bestimmt.

HINWEIS

Dieses Gerät ersetzt nicht die Beurteilung durch medizinisches Fachpersonal. Bei jeglicher Erkrankung, laufender medizinischer Behandlung oder Zweifeln an der Eignung der Behandlung holen Sie vor der Anwendung jeder Funktion eine ärztliche Genehmigung ein.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

Im gesamten Dokument werden drei Warnstufen verwendet. Beachten Sie diese jederzeit:

SYMBOL	BEDEUTUNG
GEFAHR	Risiko für die Sicherheit von Personen oder schwerer Schäden am Gerät. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.
ACHTUNG	Situation, die das Behandlungsergebnis oder die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen kann.

SYMBOL	BEDEUTUNG
HINWEIS	Ergänzende Information oder Empfehlung bewährter Praxis.

02 FUNKTIONSPRINZIPIEN

2.1 Die kosmetische Pressotherapie

Die Pressotherapie ist eine professionelle Kosmetiktechnik auf der Grundlage kontrollierter pneumatischer Kompression. Die Körpermanschette enthält unabhängige Luftkammern, die sich nach programmierten Zyklen von Kompression und Dekompression füllen und entleeren: Der Druck wandert geordnet von den rumpffernsten Zonen (den Füßen) zur Taille oder in umgekehrter Richtung, je nach gewähltem Modus.

Diese sequenzielle Kompressionsmassage aktiviert den Rückfluss und fördert die Bewegung eingelagerter Flüssigkeiten, was sich in einem unmittelbaren Leichtigkeitsgefühl äußert, besonders in den Beinen. Druck, Füllgeschwindigkeit und Kammverlauf sind regulierbar, sodass sich die Intensität der Massage an die Empfindlichkeit und das Ziel jeder Kundin/jedes Kunden anpasst.

In der Kabine wird die Pressotherapie ausschließlich zu kosmetischen und Wellness-Zwecken eingesetzt: müde Beine, gelegentliche Flüssigkeitseinlagerungen, Unterstützung von Anti-Cellulite- und Körperformungsprogrammen sowie als Ergänzung, die das Ergebnis anderer Körperbehandlungen und der aufgetragenen Kosmetika verstärkt.

2.2 Infrarotwärme

Die in die Manschette integrierten Infrarotstrahler liefern eine sanfte, kontrollierte Wärme, die in das Gewebe eindringt, die lokale Temperatur erhöht und die Durchblutung sowie den Stoffwechsel der Zone beschleunigt. Die Wärme lindert Muskelverspannungen, entspannt die Muskulatur und fördert die Aufnahme der während der Behandlung aufgetragenen Kosmetikprodukte.

2.3 Niederfrequente Elektrostimulation

Das Prinzip der Elektrostimulation ist einfach und respektiert die natürliche Funktionsweise des Körpers: Die niederfrequenten elektrischen Impulse reproduzieren das Signal, das das Gehirn über die Nervenfasern sendet, wenn es eine Kontraktion anordnet. Der Muskel unterscheidet nicht zwischen einer willkürlichen und einer vom Gerät ausgelösten Kontraktion — die geleistete Arbeit ist dieselbe —, weshalb diese Technik als passive Gymnastik bekannt ist.

Über Klebeelektroden auf den richtigen Punkten angewendet, straffen die Kontraktions- und Entspannungssequenzen die Muskulatur, aktivieren die behandelte Zone und unterstützen Programme zur Körperformung und Straffung, mit besonders guter Wirkung an Oberschenkeln, Gesäß, Bauch und Armen.

Während der Sitzung nimmt die Kundin/der Kunde ein leichtes Kribbeln wahr, begleitet von der Kontraktion des Muskels. Auf sanften Stufen ist die Empfindung kaum spürbar; in den Straffungsprogrammen ist die Kontraktion deutlicher, stets innerhalb des Komfortbereichs, den die Kundin/der Kunde selbst angibt.

2.4 Kombinierte Wirkungen

- **Körperformung:** Die Kombination aus sequenziellem Druck, Wärme und passiver Muskularbeit ist auf Programme zur Umfangsreduktion und zur Verbesserung des Erscheinungsbilds von Cellulite ausgerichtet.
- **Straffung:** Die Stimulation der sensorischen Endigungen der Epidermis trägt zu einem strafferen, elastischeren Erscheinungsbild der Haut bei.

- **Entspannung und Wohlbefinden:** Die Luftmassage und die Infrarotwärme entlasten die Muskulatur und vermitteln ein allgemeines Gefühl von Erholung und leichten Beinen.
- **Synergie mit Kosmetika:** Wärme und die Aktivierung der Zone fördern die Aufnahme der vor der Sitzung aufgetragenen Produkte.

03 KOSMETISCHE ANWENDUNGEN

Der TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS 4000 wurde für die Anwendung in der Kabine mit ausschließlich kosmetischer und Wellness-Zielsetzung entwickelt. Seine wichtigsten Anwendungen sind:

- Gefühl müder, schwerer Beine nach dem Arbeitstag
- Gelegentliche Flüssigkeitseinlagerungen
- Verbesserung des Erscheinungsbilds von Cellulite und Orangethaut
- Programme zur Körperformung und Umfangsreduktion
- Straffung und Verbesserung des allgemeinen Hautbilds
- Muskelstraffung durch passive Gymnastik
- Gefühl von Leichtigkeit und Erholung in den Beinen
- Vorbereitung und Abschluss anderer kosmetischer Körperbehandlungen
- Bessere Ausnutzung der in der Kabine aufgetragenen Kosmetika
- Entspannung und allgemeines Wohlbefinden

HINWEIS

Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt und nicht zur Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung irgendeiner Erkrankung bestimmt. Wenn die Kundin/der Kunde eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, schwanger ist oder sich in medizinischer Behandlung befindet, obliegt die Beurteilung vor der Sitzung einem Angehörigen der Gesundheitsberufe (siehe die Gegenanzeigen in Abschnitt 4).

04 GEGENANZEIGEN

GEFAHR

Wenden Sie die Behandlung bei keiner Person an, auf die einer der folgenden Punkte zutrifft. Verlangen Sie beim geringsten Zweifel vor der ersten Sitzung einen schriftlichen ärztlichen Befund oder eine schriftliche Genehmigung.

4.1 Absolute Gegenanzeigen

- Kürzliche Thrombophlebitis oder Phlebothrombose (tiefe Venenthrombose)
- Ausgeprägte oder geschlängelte Krampfadern
- Aktive Hautinfektionen im Behandlungsbereich
- Lymphangitis
- Entzündliche Arthritis in der akuten Phase
- Kardiozirkulatorische Dekompensation
- Erhebliche, nicht kontrollierte Blutdruckstörungen
- Kürzlicher Herzinfarkt
- Neoplasien (aktive onkologische Prozesse, außer bei ausdrücklicher ärztlicher Anweisung)
- Schwere Herz-, Atem- oder Niereninsuffizienz
- Akute Entzündungen sowie fieberhafte oder infektiöse Prozesse
- Schwangerschaft
- Offene Wunden, Verbrennungen, Dermatitis oder Hautläsionen in der Zone
- Schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit

4.2 Relative Gegenanzeigen

Sie erfordern eine individuelle Beurteilung und gegebenenfalls eine vorherige ärztliche Genehmigung; wenden Sie reduzierte Intensitäten und kontinuierliche Überwachung an:

- Personen unter medizinischer Behandlung oder in einem Diagnoseprozess
- Diabetes mit Neuropathie oder Empfindungsstörungen
- Störungen der Haut- oder Temperaturempfindlichkeit
- Bauch- oder Leistenhernien (Bauchdruck vermeiden)
- Menstruation (Bauchprogramm bei Beschwerden vermeiden)
- Postoperative Phasen ohne endgültige ärztliche Entlassung
- Ausgeprägte Kapillarfragilität oder Neigung zu Hämatomen
- Fortgeschrittenes Alter mit begleitender Kreislauferkrankung

4.3 Spezifisch für die Elektrostimulation

- Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen implantierten elektronischen Geräten: **verboten**
- Epilepsie
- Keine Elektroden auf Brustkorb, Herzbereich, Brust, Hals (Karotissinus, Kehlkopf) oder Kopf anbringen

- Nicht über Zonen mit Metallimplantaten (Osteosynthesen, Prothesen) anwenden, die unter den Elektroden liegen
- Nicht am Bauch anwenden bei Hernie oder kürzlicher Bauchoperation
- Gereizte, verletzte Haut oder Haut mit Empfindungsstörungen an der Klebestelle der Elektrode

4.4 Spezifisch für die Infrarotwärme

- Kundinnen und Kunden mit Kreislaufproblemen: Die Verwendung dieser Funktion wird nicht empfohlen
- Störungen der Temperaturempfindlichkeit (Verbrennungsgefahr ohne Wahrnehmung übermäßiger Wärme)
- Fotosensibilität oder fotosensibilisierende Medikamente: beurteilen und Intensität reduzieren
- Keine Wärme auf Zonen mit akuter Entzündung, infektiösen Prozessen oder kürzlichen Traumata anwenden

05 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

5.1 Elektrische Sicherheit

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an, deren Spannung mit den technischen Daten übereinstimmt (AC 110–220 V).
- Demontieren Sie das Gerät nicht und führen Sie keine in dieser Anleitung nicht beschriebenen Arbeiten durch. Alle Reparaturen müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen. Gießen Sie keine Flüssigkeiten über die Einheit oder die Konsole.
- Verändern oder manipulieren Sie die Kabel nicht. Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo jemand auf das Netzkabel treten könnte.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Geräts ein: Brand- oder Stromschlaggefahr. Sollte versehentlich etwas in das Innere gelangen, trennen Sie das Gerät vom Netz und kontaktieren Sie sofort den technischen Service.
- Ziehen Sie das Netzkabel am Ende des Arbeitstages aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche, damit es nicht beschädigt werden oder umkippen kann.

GEFAHR

Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

- Das Gerät ist nass geworden.
 - Das Gerät riecht verbrannt oder macht ein ungewöhnliches Geräusch.
 - Das Kabel ist gebrochen oder beschädigt.
 - Das Gerät weist Bruch oder sichtbare Schäden auf.
-

5.2 Sicherheit während der Anwendung

- Führen Sie stets eine vorherige Anamnese der Kundin/des Kunden durch und schließen Sie alle Gegenanzeigen aus Abschnitt 4 aus.
- Stellen Sie die Intensitäten immer von niedrig nach hoch ein, entsprechend den von der Kundin/dem Kunden angegebenen Empfindungen. Die Behandlung darf niemals schmerzhaft sein.
- Halten Sie während der gesamten Sitzung ständigen Kontakt mit der Kundin/dem Kunden, insbesondere zur Kontrolle der Infrarottemperatur.
- Lassen Sie die Kundin/den Kunden während der Behandlung nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie die in der Sitzung nicht genutzten Funktionen pausiert.
- Wählen Sie bei der Infrarotfunktion keine hohen Intensitäten über längere Zeit: Die Haut jedes Menschen ist unterschiedlich, und es besteht Verbrennungsgefahr.

5.3 Hygiene

- Verwenden Sie für jede Kundin/jeden Kunden stets spezielle Einweg-Zellstoffhosen für diese Art der Behandlung.
- Wenn Sie nicht wegwerfbare Verbrauchsmaterialien verwenden, sterilisieren Sie diese zwischen den Kundinnen/Kunden ordnungsgemäß.
- Reinigen und desinfizieren Sie die Elektroden und die Oberflächen der Manschette nach jeder Sitzung (siehe Abschnitt 13).

06 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

6.1 Bedienfeld

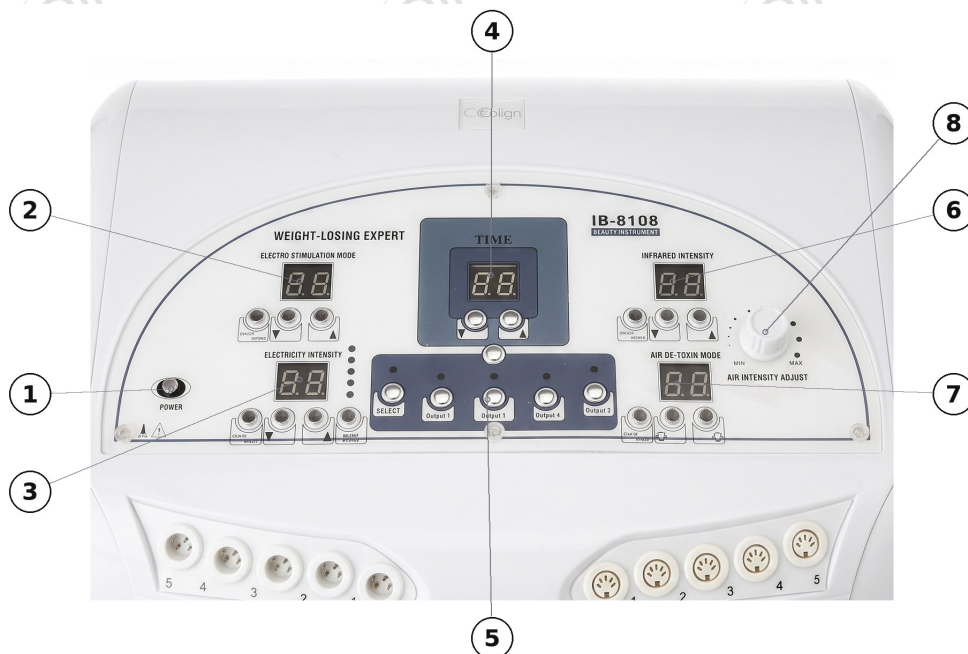


ABBILDUNG 01 Funktionsbereiche der Bedienkonsole des IB-8108.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Hauptschalter der Konsole ② Elektrostimulation: Modusanzeige und Auswahl des Arbeitsprogramms ③ Elektrostimulation: Intensitätsanzeige, Einstelltasten und Ausgangswahlschalter ④ Arbeitszeit: Anzeige und Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Allgemeiner Start und Stopp sowie Auswahl der fünf Körperausgänge ⑥ Ferninfrarot: Intensitätsanzeige und Einstellung der Stufe ⑦ Pressotherapie: Anzeige des Füllmodus, Start und Stopp sowie Geschwindigkeit ⑧ Drehregler zur Einstellung der Luftdruckintensität |
|---|---|

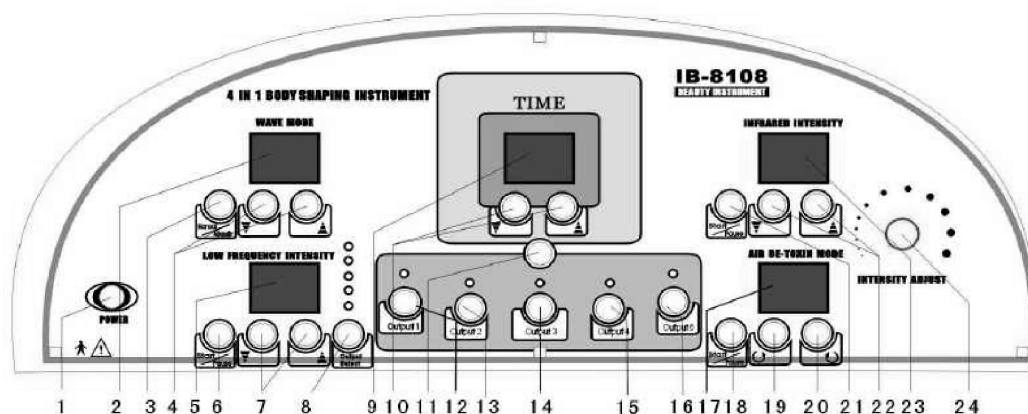


ABBILDUNG 02 Bedienkonsole des IB-8108 mit den von 1 bis 24 nummerierten Elementen.

- | | |
|--|---|
| ① Einschalten | ⑫ Taste für den Ausgang des linken Arms |
| ② Anzeige des Arbeitsmodus der Elektrostimulation | ⑬ Taste für den Ausgang des rechten Arms |
| ③ Auswahl manueller / automatischer Modus der Elektrostimulation | ⑭ Taste für den Ausgang der Taille |
| ④ Auswahl des Arbeitsprogramms der Elektrostimulation | ⑮ Taste für den Ausgang des linken Beins |
| ⑤ Intensitätsanzeige der Elektrostimulation | ⑯ Taste für den Ausgang des rechten Beins |
| ⑥ Ein-/Aus-Wahlschalter der Elektrostimulation | ⑰ Anzeige des Arbeitsprogramms der Pressotherapie |
| ⑦ Tasten zur Intensitätseinstellung der Elektrostimulation | ⑱ Start/Stopp der Pressotherapie-Funktion |
| ⑧ Wahlschalter für jeden der 5 Elektrostimulationsausgänge | ⑲ Auswahl des Luftfüllmodus |
| ⑨ Anzeige der Arbeitszeit | ⑳ Einstellung der Füllgeschwindigkeit (Frequenz) |
| ⑩ Einstellung der Arbeitszeit | ㉑ Start/Stopp der Infrarotfunktion |
| ⑪ Start-/Stopptaste für den allgemeinen Betrieb der Maschine | ㉒ Einstellung der Infrarot-Wärmeintensität |
| | ㉓ Infrarot-Anzeige |
| | ㉔ Drehregler für die Intensität des Luftdrucks |

6.2 Vordere und hintere Anschlüsse



ABBILDUNG 03 Vordere Anschlüsse: fünf Ausgänge für die Elektrostimulation und fünf für Infrarot, von 1 bis 5 nummeriert.

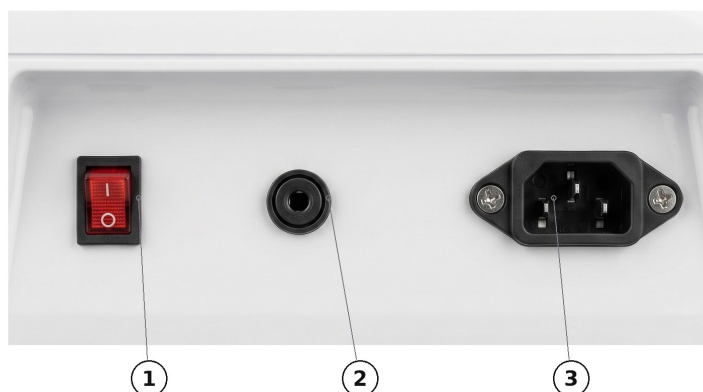


ABBILDUNG 04 Rückseite der Einheit mit den von 1 bis 3 nummerierten Elementen.

- ① Hauptschalter
- ② Sicherungshalter
- ③ Netzanschluss für das Netzkabel

- **Vorderseite:** nummerierte Ausgänge für Druckluft und Infrarotheizung sowie Steckverbinder der 5 Elektrostimulationsausgänge.
- **Rückseite:** Netzanschluss, Sicherungshalter und Hauptnetzschalter.

6.3 Pressotherapie-Manschette und Zubehör

Die Körpermanschette besteht aus unabhängigen Modulen, die über Luftschläuche und Infrarot-Steckverbinder mit der Einheit verbunden sind, alle nummeriert:



ABBILDUNG 05 Ausgebreiteter modularer Anzug: Jede Kammer trägt ihre aufgedruckte Nummer mit dem Präfix L oder R je nach Körperseite.

MODUL	DRUCKLUFTAUSGANG	INFRAROTAUSGANG
Armmodul	8 / 9	1 / 2
Taillenmodul	6 / 7	3
Beinmodule	2 / 3 / 4 / 5	4 / 5
Fußmodul	0 / 1	—
Basismanschette	—	—
Organizertasche für Schläuche und Kabel	—	—



ABBILDUNG 06 Arm ·
Kammern 8 und 9



ABBILDUNG 07 Bein ·
Kammern 2, 3, 4 und 5



ABBILDUNG 08 Taille ·
Kammern 6 und 7



ABBILDUNG 09
Fußstiefel · Kammern 0 und
1



ABBILDUNG 10 Unterlage für die Liege mit integrierter Tasche, in der Schläuche und Kabel gesammelt werden können.

Jede Kammer trägt ihre aufgedruckte Nummer mit dem Präfix L oder R zur Kennzeichnung der linken und der rechten Körperseite (L-0 bis L-9 und R-0 bis R-9): Der komplette Satz umfasst 20 Luftkammern, zehn auf jeder Seite. Die Schläuche sind in drei Mehrfachsteckern mit den Nummern 1, 2 und 3 zusammengefasst, und die beheizten Module besitzen zusätzlich ihr von 1 bis 5 nummeriertes Infrarotkabel.

6.4 Lieferumfang

Das Gerät wird mit den folgenden Bestandteilen geliefert:

- 1 Haupteinheit mit Bedienkonsole
- 1 Arbeits-Textilsatz
- 2 Armmanschetten
- 1 Gurt für Bauch und Gesäß
- 2 verstellbare Beinteile
- 2 Fußstiefel
- 1 Unterlage
- 1 Schutz- und Organizertasche für die Schläuche
- 5 Elektrodenkabel für die Elektrostimulation
- 10 große und 6 kleine Elektroden
- 1 Satz elastischer Haltegurte
- 1 Netzkabel und 2 Ersatzsicherungen
- 1 Bedienungsanleitung



ABBILDUNG 11 Haupteinheit und vollständiger Satz der Anzugmodule.

07 INSTALLATION UND ANSCHLUSS

7.1 Aufstellung des Geräts

- Stellen Sie die Einheit auf eine stabile, ebene Fläche in der Nähe der Liege und einer geerdeten Steckdose.
- Lassen Sie um das Gerät herum Freiraum für die Belüftung und für die Führung der Schläuche ohne Spannungen und ohne Trittgefahr.
- Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, die Nähe von Wasserquellen und direkte Sonneneinstrahlung.

7.2 Anschluss der Luftschläuche

Schließen Sie jeden Luftschlauch an den Ausgang mit der richtigen Nummer an: Alle Kabel und Schläuche tragen ihre entsprechende Nummerierung, um eine korrekte Montage sicherzustellen (Kammern 0–9 je nach Modul, siehe Tabelle in Abschnitt 6.3). Drücken Sie den Steckverbinder, bis er einrastet. Zum Lösen drücken Sie den blauen Punkt am Steckverbinder und ziehen vorsichtig.

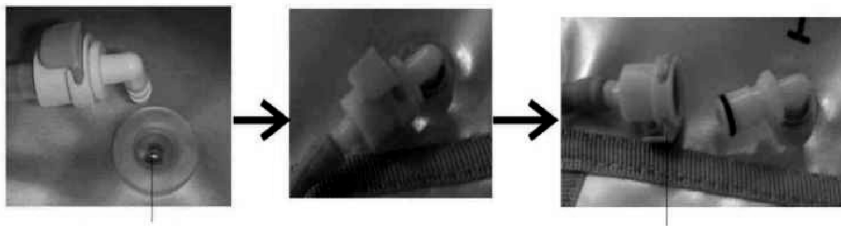


ABBILDUNG 12 Druckluftanschluss: hier anschließen; zum Lösen den blauen Punkt am Steckverbinder drücken.

ACHTUNG

Ein an einen Ausgang mit falscher Nummerierung angeschlossener Schlauch führt zu einer ungeordneten Befüllung der Kammern und einer unwirksamen Behandlung. Überprüfen Sie vor jeder Sitzung die Nummerierung aller Schläuche.

7.3 Anschluss der Elektrostimulationselektroden

Schließen Sie die Elektrostimulationskabel an der Vorderseite der Maschine an und die Elektroden paarweise (eine positive + eine negative) an jedem Kabel. Jede Elektrode wird über ihren Clip mit dem Kabel verbunden und mit den elastischen Haltegurten auf der Haut angebracht. Tragen Sie vor dem Anbringen auf der Haut stets Leitgel auf Wasserbasis auf jede Elektrode auf.



ABBILDUNG 13 Elektrostimulations-Set: 10 Elektroden, Anschlusskabel und elastische Haltegurte.



ABBILDUNG 14 Klebelektrode mit Kabel und Stecker des Stimulationsausgangs.

7.4 Anschluss der Infrarotheizung

Verbinden Sie die Infrarot-Steckverbinder der Manschette mit den Kabeln der Einheit unter Beachtung ihrer Nummerierung (Zonen 1-5) und stecken Sie den Steckverbinder bis zum Anschlag in den entsprechenden Ausgang des Geräts.

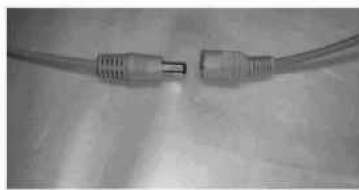


ABBILDUNG 15 Anschluss des Infrarot-Heizkreises.

08 BEDIENUNG

8.1 Inbetriebnahme

- 1 Schließen Sie das Kabel an die Netzsteckdose an.
- 2 Betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite der Maschine.
- 3 Überprüfen Sie, dass alle Luft- und Infrarotschläuche korrekt montiert sind, sowohl an der Hauptmaschine als auch an jedem der Teile der Pressotherapie-Manschette (korrekte Nummerierung).
- 4 Drücken Sie die POWER-Taste an der Hauptkonsole (1).
- 5 Drücken Sie die Taste Nr. 11, die den allgemeinen Betrieb der Maschine aktiviert.

8.2 Einstellung der Arbeitszeit

Stellen Sie die Arbeitszeit mit der Taste 10 ein. Die Mindestzeit beträgt 1 Minute, die maximal programmierbare Zeit 60 Minuten. In der Regel wird empfohlen, zwischen 30 und 60 Minuten zu programmieren, je nach Behandlungsziel.

8.3 Infrarotfunktion

Mit der Taste 21 können Sie die Infrarotfunktion aktivieren oder deaktivieren. Erscheint ein roter Punkt auf der Anzeige (23), ist die Funktion aktiv; durch erneutes Drücken der Taste 21 wird sie jederzeit deaktiviert, und der rote Punkt verschwindet. Es stehen acht Intensitätsstufen zur Verfügung, einstellbar mit dem Regler 22, je nach den Bedürfnissen des Einzelfalls.

ACHTUNG

Die Verwendung dieser Funktion bei Kundinnen/Kunden mit Kreislaufproblemen wird nicht empfohlen. Da die Haut jedes Menschen unterschiedlich ist, wählen Sie keine hohe Intensität über längere Zeit, um Verbrennungen zu vermeiden. Empfohlenes Schema: Stufe 8 zu Beginn und, sobald die Kundin/der Kunde Wärme spürt, auf Stufe 5–6 senken und halten.

8.4 Pressotherapie-Funktion (AIR DE-TOXIN MODE)

Die Aktivierung und Deaktivierung der Befüllung erfolgt mit der Taste 18. Wird auf der Anzeige 17 ein roter Punkt angezeigt, ist die Funktion ausgewählt; wird er nicht angezeigt, ist die Funktion in diesem Moment nicht aktiv. Die Maschine verfügt über 3 Luftfüllmodi, wählbar mit der Taste 19:

Modus 1 — der Luftdruck wirkt von den Füßen bis zur Taille (aufsteigende Sequenz).

Modus 2 — der Luftdruck wirkt von der Taille zu den Füßen (absteigende Sequenz).

Modus 3 — der Druck wird in allen Kammern gleichzeitig angewendet (Pumpfunktion).

Mit der Taste 20 wird die Füllgeschwindigkeit der Luftkammern gewählt (5 Stufen), und mit dem Drehregler 24 wird die Intensität des Luftdrucks eingestellt. Die Tasten 12 bis 16 ermöglichen das Aktivieren oder Ausschließen jedes Körperaushangs (linker Arm, rechter Arm, Taille, linkes Bein und rechtes Bein).

Füllgeschwindigkeiten

Stufe 1 — sehr schnell

Stufe 2 — schnell

Stufe 3 — mittel

Stufe 4 — langsam

Stufe 5 — sehr langsam

HINWEIS

Als Hygienemaßnahme wird stets die Verwendung von speziellen Zellstoffhosen für diese Art der Behandlung empfohlen, für jede Kundin/jeden Kunden.

8.5 Elektrostimulationsfunktion

Damit diese Funktion aktiv ist, muss auf der Anzeige 4 ein roter Punkt sichtbar sein; Sie können sie mit der Taste 6 deaktivieren (der rote Punkt verschwindet). Stellen Sie sicher, dass Sie die Kabel an der Vorderseite und die Elektroden paarweise (positiv + negativ) angeschlossen haben. Wählen Sie das Arbeitsprogramm mit den Tasten 3 und 4 und sehen Sie es auf der Anzeige 2. Die Maschine verfügt über 5 vorkonfigurierte Programme:

Programm 1 — Grundlage der Figur- und Volumenreduktionsprogramme; für jeden Körperbereich geeignet.

Programm 2 — gezielte Arbeit für Bereiche mit größerem Widerstand innerhalb der Formungsprogramme.

Programm 3 — auf die Verbesserung des Erscheinungsbildes von Cellulite und Orangenhaut ausgerichtet.

Programm 4 — aktiviert den Rückfluss und unterstützt die kosmetische Drainage, mit einem Gefühl von Leichtigkeit.

Programm 5 — entspannend; hilft, die Muskulatur zu lockern und zu entlasten.

Wählen Sie außerdem den Arbeitsmodus mit der Taste 2: Erscheint ein roter Punkt auf der Anzeige 2, ist der Betrieb automatisch (die Maschine wechselt von einem Programm zum anderen); ist kein roter Punkt vorhanden, ist die Auswahl manuell, mit dem zuvor gewählten Programm.

Gehen Sie mit der Taste 8 nacheinander die 5 Elektrostimulationsausgänge durch: Bei jedem Drücken wandert das rote Licht entlang der Kontrollleuchten über der Taste. Konfigurieren Sie die Intensität jedes Ausganges

unabhängig mit den Tasten 7 und passen Sie sie an die Empfindlichkeit der Kundin/des Kunden an. Die Maschine verfügt über 8 Intensitätsstufen.

Je höher die angewendete Intensität, desto größer ist die Zahl der Muskelfasern, die an jeder Kontraktion beteiligt sind. Arbeiten Sie stets auf der höchsten Stufe, die für die Kundin/den Kunden noch angenehm ist, steigern Sie im Verlauf der Sitzung schrittweise und erreichen Sie niemals die Schmerzschwelle: Die normale Empfindung ist ein Kribbeln, begleitet von der Kontraktion, keine Beschwerde.

8.6 Videoanleitungen

Der Hersteller stellt Videoanleitungen zur Bedienung des Geräts in den folgenden Sprachen zur Verfügung:

Spanisch — <https://www.youtube.com/watch?v=ox-nc-CfXek>

Italienisch — <https://www.youtube.com/watch?v=ZHh9BbdT4Is>

Portugiesisch — <https://youtu.be/56njBsH90sc>

09 BEHANDLUNGSPROTOKOLL

Empfohlene Arbeitssequenz für eine vollständige Körperperformungsitzung:



ABBILDUNG 16 Anlegen des Gurtes für Taille und Bauch bei der Kundin, die Elektroden sind bereits platziert.

- 1 Lagern Sie die Kundin/den Kunden auf einer Liege.
- 2 Ziehen Sie ihr/ihm spezielle Pressotherapie-Hosen (Einweg-Zellstoff) oder Ähnliches an.
- 3 Führen Sie eine vorbereitende Massage von 15–20 Minuten durch. Die Wirkung ist besser, wenn Sie spezifische Kosmetika für das Behandlungsziel verwenden.
- 4 Bringen Sie jedes der Zubehöerteile der Pressotherapie-Manschette an und schließen Sie die Module.
- 5 Schalten Sie die Maschine mit der Einschalttaste ein und prüfen Sie, dass die Pressotherapie-Funktion aktiv ist (roter Punkt auf Anzeige 17). Stoppen Sie die Elektrostimulation und die Infrarotheizung, wenn sie in dieser Phase nicht verwendet werden.
- 6 Wählen Sie die Arbeitszeit und stellen Sie Luftdruck und Füllmodus entsprechend den besonderen Bedingungen jeder Kundin/jedes Kunden ein. Pressotherapie-Sitzung: 15–30 Minuten.
- 7 Aktivieren Sie auf Wunsch die Infrarot-Heizfunktion nach dem Schema in Abschnitt 8.3.
- 8 Nach Abschluss der Pressotherapie können Sie eine Elektrostimulationssitzung von etwa 10 Minuten durchführen. Wählen Sie den manuellen oder automatischen Modus (mit dem roten Licht auf Anzeige 2 ist der Modus automatisch).

- 9 Bringen Sie die Klebeelektroden stets mit Leitgel auf Wasserbasis und am Anfang und Ende des Muskels an, um Verletzungen zu vermeiden (siehe Abschnitt 10).
 - 10 Die vollständige Behandlung kann bis zu 90 Minuten dauern.
-

HINWEIS

Wenn die Pressotherapie innerhalb einer kombinierten Behandlung eingesetzt wird, wenden Sie sie am Ende der Sitzung an, nach den anderen verwendeten Methoden.

10 PLATZIERUNG DER ELEKTRODEN

Die folgenden Schemata stammen aus der Originaldokumentation des Herstellers und zeigen die Platzierungspunkte der Elektroden paarweise (jede Nummer und ihr Partner mit Apostroph bilden einen Stromkreis). Die Elektroden werden auf den motorischen Punkten des Muskels platziert, wo das Signal mit der besten Wirkung kanalisiert wird:

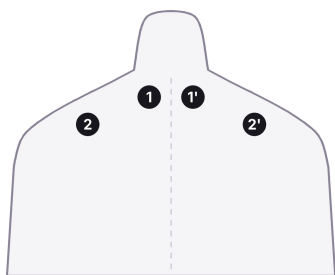


ABBILDUNG 17 Schulter und Nacken. Funktion: die Zone aktivieren und entlasten.

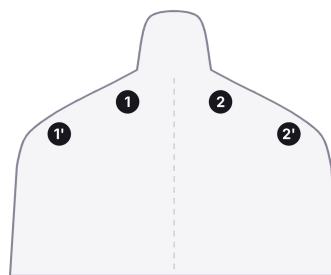


ABBILDUNG 18 Schulter und Arm. Funktion: die Zone aktivieren und straffen.



ABBILDUNG 19 Bauch. Funktion: die Zone im Rahmen der Silhouette-Programme straffen.

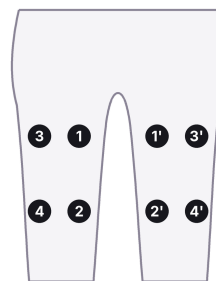


ABBILDUNG 20 Oberschenkel. Funktion: die Zone im Rahmen der Silhouette-Programme straffen.

ACHTUNG

Bringen Sie die Elektroden stets paarweise (positiv + negativ) und mit Leitgel auf Wasserbasis an, am Anfang und Ende des Muskels; niemals über Knochen, Gelenken, Brustkorb oder Hals, und ohne jemals einen Stromkreis zwischen Vorder- und Rückseite des Körpers zu kreuzen. Führen Sie die Elektroden in die zuvor an der Kundin/dem Kunden angebrachten Haltegurte ein und prüfen Sie den vollständigen Hautkontakt.

HINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich Leitgel auf Wasserbasis: Es gewährleistet die korrekte Übertragung des Impulses, schützt die Haut und verlängert die Lebensdauer der Elektroden. Erhältlich auf sunmarket.es.

11 DIE SITZUNGEN

Zu kosmetischen Zwecken dauern die Pressotherapie-Sitzungen etwa 30–45 Minuten, je nach Arbeitsziel und Empfindlichkeit der Kundin/des Kunden. Der Timer des Geräts erlaubt eine Programmierung von bis zu 60 Minuten.

Was die Häufigkeit betrifft, werden in der Regel 2–3 Sitzungen pro Woche durchgeführt, wobei in einigen konkreten Fällen eine tägliche Sitzung erreicht werden kann.

Wenn die Pressotherapie innerhalb einer kombinierten Behandlung eingesetzt wird, wird sie am Ende der Sitzung angewendet, nach den anderen verwendeten Methoden.

12 VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER BEHANDLUNG

- 1 Verwenden Sie stets Leitgel auf Wasserbasis auf den Klebeelektroden der passiven Gymnastik, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie die Intensität entsprechend den von der Kundin/dem Kunden angegebenen Empfindungen ein, immer schrittweise von niedrig nach hoch. Bei Schmerzempfinden prüfen Sie, dass die Elektrode in perfektem Kontakt mit der Haut steht.
- 2 Stellen Sie bei der Infrarotfunktion zu Beginn der Behandlung Stufe 8 ein und senken Sie die Stufe auf 5 oder 6, sobald die Kundin/der Kunde Wärme spürt, und halten Sie diese Temperatur.
- 3 Kommunizieren Sie während der gesamten Behandlung mit der Kundin/dem Kunden, um die Temperatur zu überprüfen und die entsprechende Anpassung vornehmen zu können.
- 4 Stellen Sie während der Behandlung die Funktionen der Maschine auf Pause, die in dieser Sitzung nicht durchgeführt werden.
- 5 Verwenden Sie stets Einweghosen oder sterilisieren Sie das für jede Kundin/jeden Kunden verwendete Verbrauchsmaterial ordnungsgemäß.

13 REINIGUNG UND WARTUNG

13.1 Reinigung nach jeder Sitzung

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Netz.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Manschette und der Module mit einem weichen, mit Wasser oder einem nicht aggressiven Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch; trocknen Sie vollständig vor der Aufbewahrung. Tauchen Sie kein Bauteil ein.
- Reinigen Sie die Klebeelektroden von Leitgelresten und desinfizieren Sie sie; ersetzen Sie sie, wenn sie an Haftung verlieren.
- Reinigen Sie Konsole und Gehäuse mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch; niemals mit direkt aufgegossenen Flüssigkeiten.

13.2 Regelmäßige Wartung

- Überprüfen Sie den Zustand von Schläuchen und Steckverbindern: keine dauerhaften Knicke, Risse oder Luftlecks. Ersetzen Sie beschädigte Schläuche durch Originalersatzteile.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und die Elektrodenkabel; bei Schäden verwenden Sie das Gerät nicht und fordern Sie ein Originalersatzteil an.
- Bewahren Sie die Manschette ausgebreitet oder ohne erzwungene Knicke gefaltet auf, an einem trockenen, sonnengeschützten Ort.
- Die Sicherung befindet sich neben dem hinteren Netzanschluss; ersetzen Sie sie nur durch eine mit denselben Eigenschaften und bei vom Netz getrenntem Gerät.
- Jeder andere Eingriff obliegt ausschließlich dem autorisierten technischen Service.

14 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie den technischen Service kontaktieren, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

PROBLEM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Kabel schlecht angeschlossen; hinterer Schalter aus; Sicherung durchgebrannt	Kabel und geerdete Steckdose prüfen; hinteren Schalter betätigen; Sicherung durch eine identische ersetzen
Eine Kammer wird nicht befüllt	Schlauch an falscher Nummer angeschlossen; Steckverbinder nicht eingerastet; Schlauch geknickt	Nummerierung prüfen, Steckverbinder bis zum Anschlag drücken und Knicke im Schlauch beseitigen
Der Druck ist schwach	Geschwindigkeit oder Intensität niedrig; Leck an einem Steckverbinder	Geschwindigkeit (Taste 20) und Druck (Drehregler 24) erhöhen; Sitz der Steckverbinder prüfen
Keine Infrarotwärme	Funktion deaktiviert (kein roter Punkt auf 23); IR-Steckverbinder lose; Stufe niedrig	Mit Taste 21 aktivieren; IR-Steckverbinder einrasten; Stufe mit Regler 22 erhöhen
Elektrostimulation nicht spürbar	Funktion deaktiviert (kein roter Punkt auf 4); Ausgang nicht konfiguriert; fehlendes Gel; Elektrode ohne Kontakt	Mit Taste 6 aktivieren; jeden Ausgang mit Taste 8 konfigurieren; Leitgel auftragen und Elektrodenkontakt prüfen
Die Stimulation ist unangenehm	Übermäßige Intensität; Elektrode teilweise gelöst	Intensität senken und Elektrode mit vollständigem Kontakt neu anbringen

GEFAHR

Wenn das Problem weiterhin besteht oder bei Brandgeruch, ungewöhnlichen Geräuschen, Feuchtigkeit im Gerät oder sichtbaren Schäden trennen Sie das Gerät sofort vom Netz und kontaktieren Sie den technischen Service. Öffnen Sie das Gehäuse nicht: Alle Reparaturen müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

15 TECHNISCHE DATEN

Zertifiziertes Modell	IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · 8432729013696
Referenz auf der Konsole	IB-8108
Funktionen	Pressotherapie · Infrarotwärme · Elektrostimulation (3 in 1 mit Textilsatz)
Stromversorgung	220 V. Vom Hersteller angegebene Kompatibilität: AC 110 / 220 / 230 / 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistung	350 W
Elektrischer Schutz	Hauptschalter und Sicherungshalter an der Rückseite · 2 Ersatzsicherungen im Lieferumfang
Pressotherapie	20 Luftkammern · 10 nummerierte Drucksektoren (0 – 9) · 3 Füllmodi · 5 Geschwindigkeiten
Kammerverteilung	Bauch 4 · Beine 4 × 2 · Arme 4 × 2 · Füße 2 × 2
Luftdruck	0 – 150 mmHg (± 10 %). Die Herstelleranleitung nennt zudem 20 / 80 / 120 mmHg und 0,10 / 0,22 / 0,32 bar
Infrarot	5 Zonen (Arme 1/2 · Taille 3 · Beine 4/5) · Intensität von 1 bis 8
Elektrostimulation	5 unabhängige Kanäle · 5 Programme · Intensität von 1 bis 8 · manueller oder automatischer Modus
Zeitschaltuhr	1 – 60 Minuten
Abmessungen der Haupteinheit	103 × 55 × 46 cm (99 × 43 × 38 cm laut Verkaufsdatenblatt)
Abmessungen des gefalteten Textilsatzes	91 × 46 × 12 cm
Gewicht	Haupteinheit 29 kg · Textilsatz 6,6 kg · Bruttogewicht 36 kg
Energieeffizienzklasse	C

Konformität

Das Gerät trägt die CE-Kennzeichnung. Der Hersteller hat die EU-Konformitätserklärung für das zertifizierte Modell IDMRTSE4 TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS (8432729013696) ausgestellt, in der die folgenden Richtlinien und harmonisierten Normen aufgeführt sind:

CE · Elektromagnetische Verträglichkeit	Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte Normen · EMV	EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 · EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
CE · Niederspannung	Richtlinie 2014/35/EU
Angewandte Normen · Niederspannung	EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023 · EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 · EN 62233:2008
RoHS	Richtlinie 2011/65/EU
Angewandte Normen · RoHS	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV · IEC 62321-5:2013 · IEC 62321-6:2015 · IEC 62321-7-1:2015 · IEC 62321-7-2:2017 · IEC 62321-8:2017

HINWEIS

Die vom Hersteller unterzeichnete EU-Konformitätserklärung im Original ist über den Vertriebspartner erhältlich. Geben Sie bei der Anforderung die Referenz des zertifizierten Modells an.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sowie die Eigenschaften und Komponenten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Komponenten können von den gezeigten Abbildungen abweichen.

16 GARANTIE UND TECHNISCHER KUNDENDIENST

Das Gerät wird mit der Handelsgarantie des Vertriebspartners geliefert. Für die Haupteinheit und den Textilsatz gelten unterschiedliche Fristen, da die Teile des Anzugs dem Verschleiß des laufenden Kabinenbetriebs unterliegen.

16.1 Umfang

BESTANDTEIL	GARANTIE	ANMERKUNGEN
Haupteinheit: Steuerelektronik, Kompressor, Bedienkonsole und Struktur	3 Jahre	Ab dem Datum der Kaufrechnung
Modularer Anzug: Arm- und Beinmodule, Taillengurt und Fußstiefel	1 Jahr	Verschleißteile im Kabinenbetrieb, als Verbrauchsmaterial eingestuft
Unterlage für die Liege und Organizertasche	1 Jahr	Gleiche Regelung wie für den übrigen Textilsatz
Luftschläuche, Anschlüsse und Infrarotkabel	1 Jahr	Ersatz durch Originalersatzteile
Elektroden, elastische Haltegurte und Kontaktgel	Nicht abgedeckt	Verbrauchsmaterial mit regelmäßigem Ersatz

Die Frist läuft ab dem Datum der Kaufrechnung und gilt für den darin genannten gewerblichen Käufer. Diese Handelsgarantie gilt unbeschadet der Rechte, die dem Käufer nach den anwendbaren Vorschriften zustehen.

16.2 Was abgedeckt ist

- Herstellungs- und Materialfehler, die den normalen Betrieb des Geräts verhindern.
- Ausfälle der Steuerelektronik, des Kompressors und der Bedienkonsole innerhalb der angegebenen Frist.
- Luftlecks in Schläuchen, Anschlüssen und Kammern, die auf einen ursprünglichen Fehler zurückzuführen sind.
- Arbeitszeit und Originalersatzteile, die für die Reparatur erforderlich sind.
- Vorabdiagnose und telefonische Unterstützung durch den technischen Kundendienst.

16.3 Was nicht abgedeckt ist

- Der normale Verschleiß der Anzugteile, der Haltegurte, der Elektroden und des Kontaktgels.
- Risse, Schnitte, Löcher oder Verbrennungen des Textilmaterials, die während des Gebrauchs entstehen.
- Schäden durch eine andere Netzspannung als auf dem Typenschild angegeben oder durch Installationen ohne Erdung.
- Schäden durch Stöße, Stürze, unsachgemäßen Transport oder Lagerung in feuchter Umgebung.

- Schäden durch Flüssigkeiten, Kosmetik oder Desinfektionsmittel, die über die Einheit gegossen oder in die Anzugteile eingebracht wurden.
- Störungen durch Eingriffe, Zerlegung oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal.
- Verwendung des Geräts mit Zubehör oder Ersatzteilen, die keine Originalteile sind.
- Nicht gewerbliche Nutzung, Nutzung entgegen dieser Anleitung oder Missachtung der Gegenanzeigen und der Vorgaben zu Zeit, Druck und Temperatur.
- Verbrauchsmaterial sowie die in Abschnitt 13 beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
- Optische Schäden, die den Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigen.

ACHTUNG

Das Öffnen des Gehäuses, der Austausch interner Bauteile oder jeder Eingriff durch nicht autorisiertes Personal führen zum sofortigen Erlöschen der Garantie. Der Austausch der Sicherung und die in Abschnitt 13 beschriebenen Reinigungsarbeiten sind die einzigen Tätigkeiten, die dem Anwender obliegen.

16.4 So melden Sie einen Defekt

- 1 Gerät anhalten, vom Netz trennen und nicht weiter verwenden.
- 2 Zuerst Abschnitt 14 prüfen: Ein Großteil der Vorfälle löst sich durch Kontrolle der Schlauchnummerierung, des Sitzes der Stecker oder der Aktivierung des Ausgangs auf dem Bildschirm.
- 3 Seriennummer vom Typenschild sowie Datum und Nummer der Kaufrechnung zusammenstellen.
- 4 Den Fehler möglichst genau beschreiben: betroffene Funktion, Zeitpunkt des Auftretens und beobachtetes Verhalten.
- 5 Fotos oder ein kurzes Video des Problems und des Typenschilds beifügen.
- 6 Den technischen Kundendienst des Vertriebspartners telefonisch, per E-Mail oder über WhatsApp kontaktieren.
- 7 Originalverpackung oder eine gleichwertige aufbewahren: Sie ist für einen sicheren Transport unerlässlich, falls die Einheit abgeholt werden muss.
- 8 Das Gerät nicht ohne vorher mit dem Kundendienst vereinbarte Abholung versenden.

16.5 Kundendienst, Schulung und Ersatzgerät

Der Vertriebspartner unterhält einen eigenen technischen Kundendienst mit Originalersatzteilen und begleitet das Institut über die gesamte Lebensdauer des Geräts:

- Telefonische Unterstützung und Unterstützung über WhatsApp bei Fragen zur Bedienung und zum Anlegen des Anzugs.
- Schulung zur Bedienung des Geräts, telefonisch oder in den Räumen des Vertriebspartners.
- Bereitstellung eines Ersatzgeräts während der Reparatur, nach den zum Zeitpunkt des Vorfalls geltenden Bedingungen.
- Originalersatzteile für Module, Schläuche, Anschlüsse, Elektroden und Kontaktgel.

- Aktualisierungen dieser Dokumentation.

16.6 Daten Ihrer Einheit

Tragen Sie die Daten Ihres Geräts unmittelbar nach Erhalt hier ein. Das Typenschild befindet sich an der Rückseite der Einheit neben dem Hauptschalter; die Seriennummer ist die erste Angabe, die der Kundendienst erfragt.

Modell

Seriennummer

Kaufdatum

Rechnungsnummer

Vertriebspartner und Kontakt

17 ENTSORGUNG DES GERÄTS UND DER VERPACKUNG

Am Ende der Lebensdauer müssen das Gerät und sein Zubehör getrennt von den übrigen Abfällen entsorgt werden.

17.1 Elektrogerät

- Die Einheit nicht über den Hausmüll oder den allgemeinen Gewerbeabfall entsorgen.
- Geben Sie sie bei einer autorisierten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte ab oder beim Vertriebspartner beim Kauf eines gleichwertigen Geräts.
- Vor der Abgabe das Netzkabel trennen und entfernen.
- Die getrennte Sammlung ermöglicht die Rückgewinnung verwertbarer Materialien und verhindert, dass elektronische Bauteile in den allgemeinen Abfallstrom gelangen.

17.2 Anzug, Zubehör und Verpackung

- Den Karton der Verpackung trennen und in den Papier- und Kartonbehälter geben.
- Die Schutzfolien in den entsprechenden Behälter geben.
- Ausgemusterte Anzugteile, Schläuche, Kabel und Elektroden werden als nicht recycelbarer Abfall behandelt, sofern die örtlichen Vorschriften nichts anderes bestimmen.
- Reste von Kontaktgel und leere Behälter folgen den Angaben auf dem jeweiligen Etikett.

HINWEIS

Beachten Sie stets die in Ihrer Gemeinde geltenden Sammelvorschriften: Einstufung und Abgabestellen können abweichen.

A ANHANG A · VORABBEURTEILUNG UND EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Dieser Anhang fasst in einem einzigen druckbaren Dokument die Vorabbeurteilung der Kundin und ihre informierte Einwilligung für die drei Technologien des Geräts zusammen. Füllen Sie vor der ersten Sitzung ein Exemplar aus und lassen Sie es unterschreiben; prüfen Sie den Fragebogen bei jedem weiteren Besuch erneut.

HINWEIS

Muster zur Orientierung. Passen Sie es an die Daten und Abläufe Ihres Instituts an und lassen Sie es vor der Verwendung von Ihrer Rechtsberatung prüfen: Sunmarket Wellness erbringt keine Rechtsberatung, und die Verantwortung für das letztlich verwendete Dokument liegt beim Institut.

DATEN DES INSTITUTS UND DER KUNDIN

Institut _____ Verantwortliche Fachkraft _____

Vor- und Nachname _____

Ausweisdokument _____ Geburtsdatum _____

Telefon _____ E-Mail _____

FRAGEBOGEN ZUR VORABBEURTEILUNG

Kreuzen Sie in jeder Zeile das zutreffende Feld an. Der Fragebogen wird von der Kundin mit Unterstützung der Fachkraft ausgefüllt.

BLOCK A · UMSTÄNDE, DIE DIE SITZUNG AUSSCHLIESSEN	JA	NEIN
Schwangerschaft oder Verdacht auf Schwangerschaft	☐	☐
Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderes implantiertes elektronisches Gerät	☐	☐
Epilepsie	☐	☐
Kürzlich aufgetretene tiefe Venenthrombose, Thrombophlebitis oder Phlebothrombose	☐	☐
Ausgeprägte oder geschlängelte Krampfadern	☐	☐
Herzerkrankung oder kürzlich erlittener Herzinfarkt	☐	☐
Herz-, Atem- oder Niereninsuffizienz	☐	☐
Nicht eingestellter Blutdruck	☐	☐
Aktiver onkologischer Prozess	☐	☐
Fieber, aktive Infektion oder akute Entzündung	☐	☐

BLOCK A · UMSTÄNDE, DIE DIE SITZUNG AUSSCHLIESSEN	JA	NEIN
Hautinfektion, offene Wunde, Verbrennung oder Dermatitis im Behandlungsbereich	☐	☐
Lymphangitis	☐	☐
Entzündliche Arthritis im akuten Stadium	☐	☐
Bauchwand- oder Leistenbruch	☐	☐
Netzhautablösung	☐	☐
Aktiver Blutungsprozess	☐	☐
Person unter 18 Jahren	☐	☐

GEFAHR

Eine einzige bejahte Frage in Block A schließt die Durchführung der Sitzung aus. Wenden Sie keine der drei Technologien an, solange der Umstand besteht, und verweisen Sie die Kundin an ihre medizinische Fachkraft.

BLOCK B · UMSTÄNDE, DIE EINE BEURTEILUNG ERFORDERN	JA	NEIN
Laufende medizinische Behandlung oder offener Diagnoseprozess	☐	☐
Diabetes mit Neuropathie oder gestörter Empfindlichkeit	☐	☐
Gestörte Haut- oder Temperaturempfindlichkeit	☐	☐
Sehr dünne, überempfindliche Haut oder ausgeprägte Kapillarfragilität	☐	☐
Kürzliche Operation ohne endgültige ärztliche Freigabe	☐	☐
Metallimplantate im Bereich der geplanten Elektrodenplatzierung	☐	☐
Photosensibilisierende Medikamente	☐	☐
Menstruation, wenn Arbeit am Bauch vorgesehen ist	☐	☐
Fortgeschrittenes Alter mit begleitender Kreislauferkrankung	☐	☐
Neigung zu Hämatomen oder leichter Markenbildung	☐	☐

Eine bejahte Frage in Block B schließt die Sitzung nicht zwingend aus, erfordert aber eine individuelle Beurteilung, reduzierte Intensitäten, ständige Beobachtung und gegebenenfalls eine vorherige schriftliche ärztliche Freigabe.

VORGESEHENE TECHNOLOGIEN

- ☐ Pressotherapie mit pneumatischer Kompression
- ☐ Wärme durch Ferninfrarot
- ☐ EMS-Elektrostimulation

☐ Vorgesehene Körperbereiche:

ERKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG

Die Kundin erklärt und akzeptiert Folgendes:

1. Sie wurde darüber informiert, dass die Behandlung ausschließlich kosmetischen und Wellnesszwecken dient, keinen medizinischen Eingriff darstellt und keine gesundheitliche Beurteilung, Diagnose oder Behandlung ersetzt.
2. Ihr wurden die drei Technologien des Geräts sowie die normalen Empfindungen jeder einzelnen erläutert: fortschreitende Kompression der Luftkammern, sanfte, umhüllende Wärme in den aktiven Zonen und Kribbeln zusammen mit Muskelkontraktion bei der Elektrostimulation.
3. Sie wurde darüber informiert, dass vorübergehende Reaktionen auftreten können, etwa Rötung, ein anhaltendes Wärmegefühl, leichte Abdrücke der Anzugteile oder der Haltegurte und ein leichtes Restkribbeln.
4. Sie erklärt, dass die im Fragebogen gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und dass sie keinen für ihre Sicherheit erheblichen Umstand verschwiegen hat.
5. Sie verpflichtet sich, jede Änderung ihres Gesundheitszustands, ihrer Behandlung oder ihrer Medikation vor jeder neuen Sitzung mitzuteilen.
6. Sie verpflichtet sich, der Fachkraft während der Sitzung jeden Schmerz, jedes Unbehagen, jedes übermäßige Wärmegefühl oder jede andere unangenehme Empfindung unverzüglich mitzuteilen.
7. Sie versteht, dass die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen, von individuellen Faktoren, von der Anzahl der Sitzungen und von persönlichen Gewohnheiten abhängen und dass ihr kein bestimmtes Ergebnis und keine Reduzierung von Maßen zugesichert wurde.
8. Sie hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen, und hat vor der Unterschrift auf alle eine Antwort erhalten.
9. Sie willigt frei in die Anwendung der in diesem Dokument angekreuzten Technologien ein und weiß, dass sie die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann, ohne dass dies ihr Verhältnis zum Institut berührt.
10. Bei Zweifeln über ihren Gesundheitszustand verpflichtet sie sich, vor der Sitzung eine vorherige schriftliche ärztliche Freigabe vorzulegen.

DATENSCHUTZ

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: das im Kopf genannte Institut. Zweck: Abwicklung der kosmetischen Dienstleistung, Beurteilung der Eignung der Sitzungen und Führung der Behandlungshistorie. Rechtsgrundlage: die Einwilligung der Kundin und die Durchführung des Dienstleistungsverhältnisses. Speicherdauer: für die Dauer der Beziehung zum Institut und danach für die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen. Empfänger: Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht. Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit durch schriftliche Anfrage an das Institut; zudem kann eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden.

Unterschrift der Kundin

Unterschrift der Fachkraft

Datum

B ANHANG B · SITZUNGSPROTOKOLL

Tragen Sie jede Sitzung unmittelbar nach Abschluss ein. Die Historie erlaubt es, die Parameter des nächsten Besuchs anzupassen, belegt die durchgeführte Begleitung und dokumentiert jeden Vorfall.

Vor- und Nachname

Institut**Verantwortliche Fachkraft**[illegible]

Bewahren Sie dieses Protokoll zusammen mit dem Beurteilungsbogen jeder Kundin auf und aktualisieren Sie es bei jedem Besuch.

C ANHANG C · KURZANLEITUNG FÜR DIE KABINE

Betriebliche Zusammenfassung zum Aufbewahren neben dem Gerät. Sie ersetzt nicht das vollständige Lesen der Anleitung.

Vor dem Start	Unterschriebener und geprüfter Beurteilungsbogen · Einweghose für jede Person
Aufbau	Schläuche 0 bis 9 und Infrarotstecker 1 bis 5 auf ihrer Nummer · Sitz vor jeder Sitzung prüfen
Inbetriebnahme	Kabel an geerdete Steckdose · rückseitiger Schalter · POWER-Taste · Taste 11 für den allgemeinen Betrieb
Pressotherapie	Füllmodus 1, 2 oder 3 · Druck von niedrig nach hoch mit dem Drehregler 24 · Zeit bis 60 Minuten
Ferninfrarot	Stufe 8 zu Beginn, dann 5 oder 6, sobald Wärme spürbar wird · Anzugteile niemals leer aufheizen
Elektrostimulation	Wasserbasiertes Kontaktgel · Elektroden paarweise · am Anfang und Ende des Muskels · niemals an Brustkorb, Hals oder Kopf
Während der Sitzung	Ständiger Kontakt · niemals unbeaufsichtigt · nicht genutzte Funktionen auf Pause
Vollständige Sitzung	Pressotherapie 15 bis 30 Minuten · Elektrostimulation etwa 10 Minuten · Gesamtbehandlung bis 90 Minuten
Häufigkeit	2 oder 3 Sitzungen pro Woche an abwechselnden Tagen
Zum Abschluss	Funktionen stoppen · Anzugteile öffnen, damit die Wärme entweicht · Elektroden und Oberflächen reinigen
Bei Beschwerden	Intensität senken oder Funktion stoppen und das Gerät bei Bedarf vom Netz trennen
Sicherung	Neben der rückseitigen Netzbuchse · nur durch eine Sicherung gleicher Kenndaten ersetzen, bei gezogenem Netzstecker

GEFAHR

Bei Brandgeruch, ungewöhnlichen Geräuschen, Feuchtigkeit im Gerät oder sichtbaren Schäden: alle Funktionen stoppen, das Gerät vom Netz trennen und den technischen Kundendienst kontaktieren. Das Gehäuse nicht öffnen.

D ABBILDUNGSVERZEICHNIS

01	Funktionsbereiche der Bedienkonsole des IB-8108.	12
02	Bedienkonsole des IB-8108 mit den von 1 bis 24 nummerierten Elementen.	13
03	Vordere Anschlüsse: fünf Ausgänge für die Elektrostimulation und fünf für Infrarot, von 1 bis 5 nummeriert.	14
04	Rückseite der Einheit mit den von 1 bis 3 nummerierten Elementen.	14
05	Ausgebreiteter modularer Anzug: Jede Kammer trägt ihre aufgedruckte Nummer mit dem Präfix L oder R je nach Körperseite.	15
06	Arm · Kammern 8 und 9	16
07	Bein · Kammern 2, 3, 4 und 5	16
08	Taille · Kammern 6 und 7	16
09	Fußstiefel · Kammern 0 und 1	16
10	Unterlage für die Liege mit integrierter Tasche, in der Schläuche und Kabel gesammelt werden.	16
11	Haupteinheit und vollständiger Satz der Anzugmodule.	17
12	Druckluftanschluss: hier anschließen; zum Lösen den blauen Punkt am Steckverbinder drücken.	18
13	Elektrostimulations-Set: 10 Elektroden, Anschlusskabel und elastische Haltegurte.	19
14	Klebeelektrode mit Kabel und Stecker des Stimulationsausgangs.	19
15	Anschluss des Infrarot-Heizkreises.	19
16	Anlegen des Gurtes für Taille und Bauch bei der Kundin, die Elektroden sind bereits platziert.	23
17	Schulter und Nacken. Funktion: die Zone aktivieren und entlasten.	25
18	Schulter und Arm. Funktion: die Zone aktivieren und straffen.	25
19	Bauch. Funktion: die Zone im Rahmen der Silhouette-Programme straffen.	25
20	Oberschenkel. Funktion: die Zone im Rahmen der Silhouette-Programme straffen.	25



TERMO SLIM BODY SHAPER EXCELLENS · ID MRTSE4

Professionelles Gerät für Kosmetik und Wellness. Ausschließliche Nutzung durch geschultes Personal.

VERTRIEB

Sunmarket Wellness S.L.U.

www.sunmarket.es · 961 040 660 · info@sunmarket.es

© Sunmarket Wellness. Alle Rechte vorbehalten.