

IDIOMA: ES

MARCA: VIBBEL

MODEL: RUKBA

HZ-3805

Camilla eléctrica para spa

1. Desde DDUUEETT EUROPE SL le agradecemos su confianza por comprar productos Vibbel. Esperamos que este manual de instrucciones le sea de ayuda para sacar el máximo provecho de este producto.
En caso de duda respecto de su utilización y/o funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor.

2. ANTES DE NADA

- 2.1. Lea detenidamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Tenga en cuenta las advertencias que constan en este manual.
- 2.2. Conserve siempre este manual de instrucciones y si transfiere el aparato, entregue el manual con él ya que constituye una parte esencial del producto.
- 2.3. Algunos componentes del producto pueden diferir de la imagen que aparece en catálogos, web, folletos comerciales, etc.
- 2.4. Con la finalidad de efectuar mejoras del producto, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y/o componentes de este sin previo aviso.

3. USO CORRECTO DEL APARATO

- 3.1. Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales del sector estético en centros de belleza y no debe ser usado para otros fines.
- 3.2. Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía.
- 3.3. No realice ninguna modificación en el aparato sin la autorización de DDUUEETT EUROPE SL.
- 3.4. DDUUEETT EUROPE SL no se hará responsable de ningún daño material o personal debido al mal uso del producto.

4. PRECAUCIONES

- 4.1. Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso, compruebe si hay daños en el aparato y en el cable de red.
- 4.2. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza o cualquier tipo de mantenimiento.
- 4.3. No use el producto al aire libre ni en ningún lugar donde pueda verse afectado por la humedad o las inclemencias meteorológicas.
- 4.4. Si el cable de alimentación eléctrica presenta cualquier defecto, desconecte el aparato inmediatamente e informe a su distribuidor o técnico especializado.
- 4.5. Coloque el cable de alimentación debidamente de manera que no se pueda tropezar con él y conéctelo a un enchufe con toma de tierra.

- 4.6. Diariamente, después de finalizar la jornada, desconecte el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.
- 4.7. Si detecta cualquier anomalía en el funcionamiento del producto, consulte con su distribuidor o técnico especializado.

5. INDICACIONES DE SEGURIDAD

- 5.1. El aparato y los accesorios deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- 5.2. Conecte el aparato exclusivamente a una toma de corriente debidamente instalada. La tensión de red local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.
- 5.3. La toma de corriente debe estar accesible por si se tiene que desenchufar rápidamente el aparato en un momento dado.
- 5.4. Tire siempre de la clavija y no del cable de red.
- 5.5. No manipule nunca ningún componente eléctrico ni abra o repare ningún componente del aparato.
- 5.6. Únicamente su distribuidor o técnico especializado deben reparar el aparato.
- 5.7. No ponga en marcha el aparato si este o el cable de red presentan daños visibles.
- 5.8. Nunca toque el aparato o el cable de red con las manos mojadas.
- 5.9. Nunca exponga sus manos o alguna parte de su cuerpo en algún orificio o vacío de la camilla mientras está en funcionamiento.


6. CONTENIDO DE LA CAJA

- 6.1. Camilla eléctrica para spa x 1 unidad
- 6.2. Cojín x 1 unidad
- 6.3. Reposabrazos x 2 unidades
- 6.4. Portarrollos x 1 unidad
- 6.5. Manual de instrucciones x 1 unidad

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	187x72-95x67-85 cm
Peso neto	61 kg
Carga máxima	150 kg
Motores	1
Tapizado	PU
Tensión	220-240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz

8. CROQUIS Y DIMENSIONES

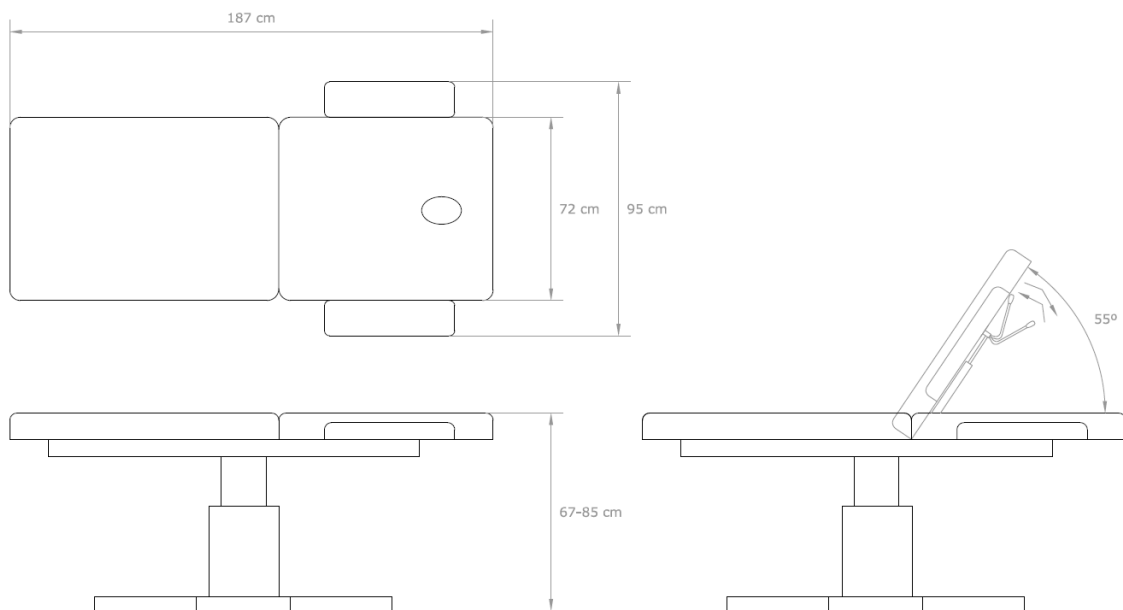

9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 9.1. Introduzca el reposabrazos en la posición correcta para que el pasador encaje con la pieza de plástico del cuerpo de la camilla y empuje hacia adentro hasta hacer tope.
- 9.2. Realice el mismo procedimiento en los 2 reposabrazos.
- 9.3. Introduzca el portarrollos en su soporte. Apriete la palomilla de fijación hasta que quede bien sujeto.

10. FUNCIONAMIENTO

- 10.1. Conecte la camilla a una toma de corriente eléctrica mediante el cable de alimentación.
- 10.2. Utilice los pulsadores  y  del mando de control para ajustar la altura de la camilla.
- 10.3. Utilice la palanca situada en la parte trasera del respaldo para activar el pistón de gas que permite el movimiento del respaldo. Al dejar de presionar la palanca, el respaldo se mantendrá en la posición donde se haya situado.

11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 11.1. Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la red.
- 11.2. Limpie el aparato con un paño suave y seco. No utilice líquidos para limpiarlo.
- 11.3. Para mantenimientos o reparación de alguna parte del producto, debe contactar con su distribuidor o técnico especializado.

12. RECICLAJE

Si necesita deshacerse del producto o de alguna de sus partes o accesorios, consulte y respete las leyes y normativa aplicable a la gestión de residuos y protección del medio ambiente.